


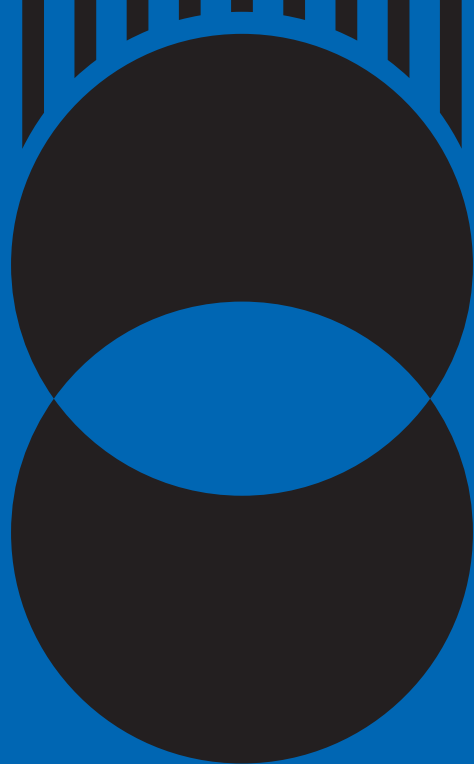

2025

**КАТАЛОГ
СКЛАДСКИХ
И РЕЦЕПТУРНЫХ
ЛИНЗ**

HOYA
FOR THE VISIONARIES

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ?

Название продукта

Основные преимущества

Особенности фотоматричного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции:
покрытия Mirgor и Polarized

Материалы и свойства

Номер страницы

Hoyalux iD MYSELF

ПРОГРЕССИВНЫЕ ДИДЫНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

ПЕРВЫЙ КЛАСС

16 мм
15 мм
14 мм
13 мм
12 мм
11 мм

Еще больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Легкая диагностика взгляда на все расстояния
- Отличное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с анизометрией благодаря применению технологии ID Бинокрутного зрения и технологии бинокрульной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение поля зрения работы и сферических расстояний без потери качества зрения вдаль.



Мин. установочных высота

Hoyalux iD MYSELF	
Знач. минимальной высоты при работе на расстоянии	Из центра зрения до края зрения
16 мм	20 мм
15 мм	18 мм
14 мм	16 мм
13 мм	14 мм
12 мм	12 мм
11 мм	10 мм

Дополнительные опции

16 мм опция

SENTRY

Создание персонального и персонализированного дизайна линзы, оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии.

15 мм опция

SENTRY

Создание персонального и персонализированного дизайна линзы, оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии. Оптимизация зрения в центре и в периферии.

Гарантии

Гарантия на покрытие
04: 3 года гарантии на покрытие Hi-Index Mirgor, Hi-Index Bioclear, Hi-Index UV Cut и Hi-Index GDR Pro.

Гарантия на линзы из материала
PMMA 123 и 128 1,00
G2: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
02: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Гарантия полировки и дублирования
Единица 100% удовлетворения клиентов Hoyalux iD MYSELF (02).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте онлайн-калькулятор для расчета оптимального индивидуального диоптричного диапазона. Для точной работы линз используйте вычислительную систему онлайн.

Материалы и свойства

Детали	Линзы с двусторонней прогрессией				
Характеристики	Двусторонняя Freeform				
Материал	Кристал 1.56	Борла 1.67	Фтор 1.63	PMMA 1.51	Полемар 1.601 и 1.6040
Число АБВ	31	31	31	41	58
Угловый шаг, град	1.47	1.37	1.30	1.11	1.32
Макс. угол наклона, град	400	360	360	360	340/360
Прочность на разрыв, кгс	10-20	70-80	50-60	60-65	10-20
Для бинокулярных оправо	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для монобифокальных оправо	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

90

КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ДИДЫН 2025

Hoyalux iD MySelf							Доступные материалы		
ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM									
 КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	EYMA		EYMA		EYAS 2.0		PKX	ПОЛИМЕР	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	MY		MY		MS		MX	MS	
	ГВАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ		ГВАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ		ГВАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ		ГВАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ	ГВАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ	
	СРОК ПОСТАВКИ		СРОК ПОСТАВКИ		СРОК ПОСТАВКИ		СРОК ПОСТАВКИ	СРОК ПОСТАВКИ	
И-Plan Myself (HVO) 	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
MYL BioCentral (SLC) 	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
MYL UV Control (UVS) 	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СРОК ПОСТАВКИ	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SENKITY ДОПОЛНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + SENS/SENSING						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	+						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SENKITY ДОПОЛНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + SENS/SON/SDG						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	+						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SENKITY ПОЛНАЯ ЦЕНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + SCL/SCLSL						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	—						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SENKITY ПОЛНАЯ ЦЕНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + HSP						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	[]						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Light Mirror Матрица 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
MBROR Матрица 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
COLOURS	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
COLOURS	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV						[]	[]	КАТЕГОРИИ КОЛОРИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Нужна лиг. - MCL - (или), пром. оптика	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИЙ ДОБАВОК + MCL/MCLM/LV								

Howalux iD MySelf (бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16/15/4/13 mm EYU4 1.74

Диапазон производства

800: +1,00* - 6,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 875: +1,00* - 6,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 800: +10,00* - 15,00* of +0,00
 Адресация: 0,75-1,16
 Препятств до 5 см.
 МЕТУ-элементы.

12/11 mm EYU4 1.74

Диапазон производства

875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 800: +10,00* - 15,00* of +0,00
 Адресация: 0,75-1,16
 Препятств до 5 см.
 МЕТУ-элементы.

16/15/4/13 mm EYU6 1.67

Диапазон производства

800: +1,00* - 6,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 875: +1,00* - 6,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 800: +10,00* - 15,00* of +0,00
 Адресация: 0,75-1,16
 Препятств до 5 см.
 МЕТУ-элементы.

12/11 mm EYU6 1.67

Диапазон производства

875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 875: +1,00* - 10,00* of +0,00
 800: +10,00* - 15,00* of +0,00
 Адресация: 0,75-1,16
 Препятств до 5 см.
 МЕТУ-элементы.

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные и с покрытием Sensity)

Номер страницы

Контактная информация	2–3
Склады компании «Линзы Хойя Рус»	4
Мастерская компании «Линзы Хойя Рус»	5
Гарантийные программы HOYA	6–9
Покрытия HOYA	10

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СКЛАД)

SYNC III 1.50 (STRX)	13
Nulux iDentity (STRX)	15–18
SupeReader A 1.50 (STRX)	19
Nulux	20–23
Hilux	24–31
Nulux Sensity и Hilux Sensity	32–34
Hilux 1.60 – окрашенные линзы	35
Hilux 1.50 – окрашенные линзы	36
Addpower 60	37
Линзы для детей Hilux Kids	38

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Sync III и Sync III i	42–46
Nulux iDentity V+	48–50
Nulux TrueForm	52–54
Hilux TrueForm	56–58
Линзы для высоких рефракций	59–62

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Hoyalux iD WorkStyle 3	68–71
Hoyalux WorkStyle Business 400/200	74–77
Hoyalux WorkSmart Room 400/200	80–83
SUPEREADER A/B	86–88

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Hoyalux iD MySelf	92–95
Hoyalux iD MySelf Profile	98–101
Hoyalux iD LifeStyle 4i	104–107
Hoyalux iD LifeStyle 4	108–111
Hoyalux Balansis	114–117
Hoyalux Daynamic	120–122
Hoyalux Amplitude Plus	124–126

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Nulux iDentity V+ EyeGenius	128–130
EnRoute и EnRoute Pro	132–137
Спортивные	138–144

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Бифокальные линзы TrueForm	146–147
----------------------------	---------

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

Однофокальные поляризационные	155–165
Прогрессивные поляризационные	166–175
HOYA Mirror	178

ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окрашивание	180–183
Ограничения	184–186
Гравировка	187–188
Специальные опции	189–190
Нормативы ЕС	191

ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

	193–216
--	---------

Контактная информация

Клиентский сервис

Телефон горячей линии 8 (800) 770-06-61.

Единый адрес электронной почты клиентского сервиса order@hoya-lens.ru

График работы:

— Москва: понедельник–пятница 8:00–18:00 (МСК)

воскресенье 8:00–16:00 (МСК)

— Новосибирск: понедельник–пятница 9:00–17:00 (МСК +4 часа)

СУПЕРВАЙЗЕР СЕРВИСА

Шабанова Юлия

доб. 433

СОТРУДНИКИ СЕРВИСА

Ананьева Екатерина

доб. 425

Бриткина Кристина (Санкт-Петербург)

доб. 439

Вересова Елена

доб. 428

Войнова Елена

доб. 434

Мамошина Юлия (Новосибирск)

доб. 427

Новикова Татьяна

доб. 424

Репина Татьяна

доб. 432

Шипота Татьяна

доб. 423

Адрес местонахождения
ООО «Линзы Хойя Рус»
127273, Москва, ул. Отрадная,
д. 2Б, стр. 9, 7 этаж

Веб-сайт
www.hovavision.com/ru

HOYA в социальных сетях
vk.com/hoyafacultyrussia

Отдел продаж

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Федотов Григорий	grigory.fedotov@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 798-03-22
------------------	------------------------------	-------------------------

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Беляев Александр (ПФО, УрФО)	alexandr.belyaev@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 158-73-50
Горбенко Роман (Москва, ЦФО, СЗФО)	roman.gorbenko@hoya-lens.ru	моб. +7 (915) 059-10-45
Ермошкин Вячеслав (Москва, ЦФО, ЮФО, СКФО)	vyacheslav.ermoshkin@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 003-32-38
Ушаков Максим (СФО, ДФО)	maxim.ushakov@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 011-06-34

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Акимова Таисия (Санкт-Петербург)	taisiya.akimova@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 019-96-25
Антипин Александр (Москва)	alexander.antipin@hoya-lens.ru	моб. +7 (915) 222-95-43
Бессонов Константин (Омск)	konstantin.bessonov@hoya-lens.ru	моб. +7 (915) 230-26-61
Жмурин Владислав (Москва)	vladislav.zhmurin@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 620-27-41
Зайнуллина Любовь (Казань)	lyubov.zainullina@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 417-85-96
Зыкова Кристина (Екатеринбург)	kristina.zykova@hoya-lens.ru	моб. +7 (985) 235-71-83
Канина Евгения (Москва)	evgeniya.kanina@hoya-lens.ru	моб. +7 (963) 610-98-47
Касаткина Анастасия (Новосибирск)	anastasiya.kasatkina@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 760-98-21
Ксыкин Роман (Волгоград)	roman.ksykin@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 188-82-53
Недоступ Дарья (Краснодар)	daria.nedostup@hoya-lens.ru	моб. +7 (908) 998-17-68
Пахомова Анна (Санкт-Петербург)	anna.pakhomova@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 217-48-03
Пынзарь Дмитрий (Санкт-Петербург)	dmitry.pynzar@hoya-lens.ru	моб. +7 (917) 540-09-70
Сафиуллина Алина (Казань)	alina.safiullina@hoya-lens.ru	моб. +7 (919) 786-75-58
Севостьянов Евгений (Самара)	evgeniy.sevostyanov@hoya-lens.ru	моб. +7 (985) 300 44 92
Сырцев Владислав (Москва)	vladislav.sertsev@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 620-32-38
Толкаев Тимур (Красноярск)	timur.tolkaev@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 050-15-03
Ушевой Дмитрий (Владивосток)	dmitry.ushevoi@hoya-lens.ru	моб. +7 (910) 460-26-58
Шульгина Станислава (Челябинск)	stanislava.shulgina@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 503-65-82

Склады компании «Линзы Хойя Рус»



Склад		Адрес	График работы и сроки поставки в зависимости от времени размещения заказа	
Доставка небольших заказов по Москве			Заказ поступил до 11:00 в рабочие дни	Будет доставлен в этот же день
Москва		Технопарк «Отрадное» ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9	Понедельник–пятница с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье с 8:00 до 17:00 (только отгрузка по Москве выделенной группе клиентов)	
Доставка небольших заказов (до 100 линз) из Москвы			Заказ поступил до 13:00 в рабочие дни и в субботу	Будет отгружен до 19:00
Доставка заказов (пополнение склада) из Москвы			Заказ поступил до 17:30	Будет отгружен в течение 3-х рабочих дней
Доставка небольших заказов со складов в регионах				
Санкт-Петербург		ул. Гороховая, д. 47, стр. 2, 3 этаж	Заказ поступил до 12:00	Будет доставлен в тот же рабочий день до 17:00
Екатеринбург		ул. Белинского, д. 222, 4 этаж, офис 22		
Самара		Торгово-офисный центр «Скала» Московское ш., д. 4, стр. 15, офис 602		
Краснодар		БЦ «Кутузовский» ул. Северная, д. 490, 2 этаж, офис 203		
Новосибирск		ул. Гоголя, д. 42, 2 этаж, офис 1		

Под сроком поставки подразумевается отгрузка получателю со склада HOYA.
Любые вопросы по отгрузке заказов вы можете задать своему менеджеру HOYA или по телефону горячей линии 8 (800) 770-06-61.

Мастерская компании «Линзы Хойя Рус»

	СКЛАД И МАСТЕРСКАЯ В МОСКВЕ			
	Доставка в пределах МКАД		Доставка за МКАД	
Тип заказа	Время поступления заказа* в ООО «Линзы Хойя Рус»	День и время доставки заказа получателю	Время поступления заказа* в ООО «Линзы Хойя Рус»	День и время доставки заказа получателю
Заказы линз без услуг обточки и изготовления очков	До 11:00	Будет доставлен в этот же день до 18:00	До 12:00	Будет передан в курьерскую службу в этот же день до 18:00
	После 11:00	Будет доставлен на следующий рабочий день до 18:00	После 12:00	Будет передан в курьерскую службу на следующий рабочий день до 18:00
Заказы на обточку линз	До 19:00	Будет доставлен на следующий рабочий день до 18:00	До 08:00	Будет передан в курьерскую службу в этот же день до 18:00
	После 19:00	В течение двух рабочих дней, до 18:00	После 08:00	Будет передан в курьерскую службу на следующий рабочий день до 18:00
Заказы линз с услугой обточки и изготовления очков*	До 13:00	В течение двух рабочих дней, до 18:00	До 18:00	В течение двух рабочих дней, будет передан в курьерскую службу до 18:00
	После 13:00	В течение трех рабочих дней, до 18:00		

	Доставка в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре	
Тип заказа	Время поступления заказа* в ООО «Линзы Хойя Рус»	День и время доставки заказа получателю
Заказы линз без услуг обточки и изготовления очков	До 12:30	Будет передан в этот же день до 14:00
	После 12:30	Будет передан на следующий рабочий день до 14:00
Заказы на обточку линз	До 19:00	Будет передан на следующий рабочий день до 14:00
	После 19:00	В течение двух рабочих дней, до 14:00
Заказы линз с услугой обточки и изготовления очков*	До 14:00	В течение двух рабочих дней, до 14:00

* Время размещения заказов с услугой изготовления очков = прибытие оправы либо прибытие заказанных линз (по последнему событию).

Производственные дефекты регламентируются законом «О защите прав потребителя», однако компания ООО «Линзы Хойя Рус» предоставляет дополнительные гарантии качества на очковые линзы.


G1

2 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect Plus



G2

2 месяца гарантии адаптации к прогрессивным линзам Hoyalux, прогрессивным линзам EnRoute (Pro), офисным прогрессивным линзам и линзам для поддержки аккомодации

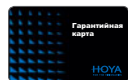

G3

1 год гарантии на линзы из материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 и Eyas 2.0 1.60



G4

3 года гарантии на линзы с покрытиями Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat



iDG

2 месяца гарантии полного удовлетворения на адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux iD MySelf и Hoyalux ID MySelf Profile



G1 2 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect Plus

Компания HOYA гарантирует замену линз в случае обнаружения отслоения покрытий Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect Plus. Гарантия распространяется на линзы, не подвергавшиеся никаким химическим, механическим или экстремальным температурным воздействиям.

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентский сервис, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.
2. Сотрудник клиентского сервиса запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентского сервиса рассмотрит запрос на

предмет его соответствия условиям гарантийной программы.

4. Сотрудник клиентского сервиса сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

G2

2 месяца гарантии адаптации к прогрессивным линзам Hoyalux, линзам EnRoute (Pro), офисным прогрессивным линзам и линзам для поддержки аккомодации

Компания HOYA гарантирует адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux, офисным прогрессивным линзам и линзам

для поддержки аккомодации. В случае неадаптации HOYA заменит линзы данному потребителю на аналогичные. Потребитель должен полностью следовать рекомендациям специалистов в оптике по адаптации к новым очкам.

В крайнем случае компания HOYA может заменить линзы на бифокальные или одну/две пары однофокальных линз, которые будут соответствовать ранее выписанному рецепту для дали и для близи.

Список линз по гарантии G2

Hoyalux iD Myself, Hoyalux ID MySelf Profile, Hoyalux iD Life-Style 4 (i), Hoyalux Balansis, прогрессивные линзы EnRoute (Pro), Hoyalux Daynamic, Hoyalux Amplitude Plus, Hoyalux Sportive TF, Hoyalux iD WorkStyle 3, Hoyalux WorkStyle Business 400/200, Hoyalux Work Smart Room 400/200, и SYNC III (i).

Иные условия

- Если Партнер с учетом пожеланий потребителя хочет заменить линзы на другие с улучшенными характеристиками, он будет обязан доплатить разницу в стоимости.
- Если Партнер с учетом пожеланий потребителя хочет заменить линзы на бифокальные или однофокальные, разница в стоимости не компенсируется.
- Во избежание повторных ошибок при заказе линз сотрудники Партнера должны обратиться к медицинским представителям HOYA.
- Гарантия действительна только в том случае, если сотрудники Партнера прошли курс обучения HOYA по прогрессивным, офисным прогрессивным линзам и по линзам для поддержки аккомодации у соответствующих сотрудников HOYA.
- Гарантия действует в течение 2 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен заполнить все поля бланка анализа случая неадаптации и выслать его сотрудникам клиентского сервиса HOYA по электронной почте.
2. Сотрудник клиентского сервиса запросит Партнера HOYA выслать линзы, оригинальные конверты либо гарантийную карту, а также документы, подтверждающие их покупку.

3. Медицинский представитель HOYA рассмотрит запрос на его соответствие условиям гарантийной программы.
4. Медицинский представитель свяжется с Партнером в течение 2 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации для обсуждения возможных причин неадаптации и способов решения.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы. Заказ должен быть размещен Партнером через программу HOYA iLog либо должен быть заполнен бланк заказа и направлен в клиентский сервис. При этом Партнер обязан правильно внести все параметры заказа.
 - Партнер HOYA должен оповестить клиентский сервис о размещенном заказе, указав номер заказа (в случае его самостоятельного размещения через iLog).
6. Срок поставки новых линз будет соответствовать стандартному времени поставки.
7. Условия замены и стоимость новых линз:
 - Если новые линзы имеют стоимость, аналогичную предыдущим, HOYA отгрузит новые по цене 1 рубль за штуку без оформления возвратных документов.
 - Если новые линзы дороже предыдущих, HOYA вышлет новые по цене, равной разнице в стоимости, без оформления возвратных документов на первую пару.
 - Если новые линзы дешевле предыдущих, HOYA предоставит новую пару (пары) линз по цене 1 рубль за штуку без оформления возвратных документов. Разница в стоимости не компенсируется.
8. Если запрос будет признан обоснованным, будут заказаны новые линзы согласно стандартному времени поставки. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

Негарантийные случаи

1. Повторный заказ по гарантии.
2. Линзы были отгружены бесплатно (по 1 рублю).
3. Частые случаи неадаптации / повторение одних и тех же ошибок*.

* Если процент неадаптаций в объеме продаж вышеперечисленных линз Партнера превышает 3% в квартал, HOYA оставляет за собой право приостановить действие гарантийных программ в следующих случаях:

Гарантийные программы HOYA

- Ошибки при размещении заказа. **Пример:** заказ не соответствует выписанному рецепту.
- Неверный выбор оправы.
- Ошибки при нанесении разметки. **Пример:** несоответствие горизонтали линзы горизонтали оправы, неправильное межзрачковое расстояние, некорректная установочная высота и т. д.
- Рекомендованный потребителю дизайн не соответствует его потребностям.
- Неверный выбор длины коридора прогрессии.
- Неверная коррекция (слишком высокая/низкая аддидация, недокоррекция зрения вдаль и т. д.).

В таких случаях HOYA предоставит Партнеру полную статистику для обоснования приостановки гарантийной программы.

G3 1 год гарантии на линзы из материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 и Eyas 2.0 1.60

HOYA гарантирует прочность и долговечность материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 и Eyas 2.0 1.60.

В случае обнаружения признаков механического повреждения линз из материала PNX 1.53 (линза треснула или сломалась), будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.

HOYA также заменит линзы из материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 или Eyas 2.0 1.60 на новые линзы с идентичными параметрами в случае обнаружения сколов или трещин в области крепления винтов или лески.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентский сервис, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.
2. Сотрудник клиентского сервиса запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентского сервиса рассмотрит запрос на предмет его соответствия условиям гарантийной программы.
4. Сотрудник клиентского сервиса сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.

5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки, по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

G4 3 года гарантии на линзы с покрытиями Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat

Компания HOYA гарантирует замену линз в случае обнаружения отслоения покрытий Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat. Гарантия распространяется на линзы, не подвергавшиеся никаким химическим, механическим или экстремальным температурным воздействиям.

Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентский сервис, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.
2. Сотрудник клиентского сервиса запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентского сервиса рассмотрит запрос на предмет его соответствия условиям гарантийной программы.
4. Сотрудник клиентского сервиса сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки, по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

iDG Гарантия полного удовлетворения – 2 месяца гарантии на адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux iD MySelf и Hoyalux ID MySelf Profile

Если клиент не может адаптироваться к приобретенным линзам, полная стоимость линз будет выплачена обратно.

В идеале компания HOYA и Партнер должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы потребитель остался пользователем прогрессивных линз HOYA и сохранил лояльность салону оптики, в котором ему подобрали прогрессивные линзы. Для этого вначале следует рекомендовать потребителю применить гарантийную программу G2 для всех случаев. Однако, если потребитель все еще недоволен или не желает пытаться решить проблему путем замены линз по гарантии G2, Партнер сможет прибегнуть к Гарантии полного удовлетворения.

В этом случае HOYA возвращает Партнеру стоимость линз, уплаченную Партнером в компанию ООО «Линзы Хойя Рус». Дополнительные расходы не компенсируются.

Гарантия действительна только в том случае, если сотрудники Партнера прошли курс обучения по прогрессивным линзам у соответствующих сотрудников HOYA.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Компания HOYA совместно с Партнером вначале принимают попытку применить Гарантийную программу G2.
2. В случае отказа потребителя применить программу G2 Партнер может прибегнуть к Гарантии полного удовлетворения путем направления соответствующего запроса по электронной почте в клиентский сервис.
3. Партнер должен выслать линзы, оригинальные конверты/либо гарантийную карту, а также документы, подтверждающие их покупку.
4. Сотрудник клиентского сервиса рассмотрит запрос и сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос будет признан обоснованным, Партнеру будет возвращена полная стоимость линз, уплаченная Партнером в компанию ООО «Линзы Хойя Рус», путем уменьшения дебиторской задолженности Партнера перед HOYA.

Покрытия HOYA



HI-VISION MEIRYO

Лучшее по долговечности и прозрачности покрытие первого класса в ассортименте HOYA

- Самая высокая устойчивость к царапинам с защитой поверхности линз*.
- Лучшие просветляющие свойства*.
- 100% защита по передней поверхности линзы и дополнительная защита от УФ-излучения по ее задней поверхности.
- Превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Наличие антистатических свойств.
- Легкость в уходе.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов рецептурных очковых линз HOYA и для материалов 1.53, 1.60, 1.67 и 1.74 складских линз.



HVLL UV CONTROL

Просветляющее покрытие первого класса в ассортименте покрытий HOYA

- Высокопрочное и устойчивое к царапинам покрытие.
- Отличные просветляющие свойства.
- 100% защита по передней поверхности линзы и дополнительная защита от УФ-излучения по ее задней поверхности.
- Превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Наличие антистатических свойств.
- Легкость в уходе.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов рецептурных очковых линз HOYA. Наличие в складском ассортименте см. в разделе «СКЛАД».



HI-VISION AQUA

Стандартное просветляющее покрытие HOYA

- Помогает устранить раздражающие глаз блики и отраженный свет.
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
- Обеспечивает хорошее качество зрения.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Покрытие обеспечивает прекрасную адгезию с линзой.
- В подтверждение качества предоставляется 2 года гарантии.

Доступно с материалами (Rx/Stock) 1.50, PNХ 1.53, Eуas 1.60 и Eуas 2.0 1.60, сочетается с фотохромной технологией.



HI-VISION SUN PRO

Покрытие первого класса для повышения зрительной эффективности, долговечности и эстетики окрашенных, фотохромных и поляризационных линз

- Привлекательный внешний вид.
- Защита от вредного УФ-излучения с передней и внутренней поверхности линзы.
- Усиленная защита от царапин для лучшей износостойкости благодаря базовому покрытию HVLL.
- Улучшенная контрастность по сравнению с обычными окрашенными линзами благодаря уменьшению бликов.
- Водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства для более легкого ухода.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.



HVLL BLUECONTROL

Покрытие первого класса. Нейтрализует часть синего света, исходящего от цифровых устройств

Помогает обеспечить комфортное и контрастное зрение в течение всего дня. Рекомендуются всем пользователям цифровых устройств, которые используют их два и более часов в день. Всегда наносится на линзу в сочетании с покрытием Hi-Vision LongLife.

- Помогает предотвратить появление напряжения и усталости глаз, а также может препятствовать развитию ЦЗС.
- Помогает устранить блики и улучшить контрастность.
- Способствует сохранению здоровья глаз и организма в целом.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

* Среди покрытий HOYA.

Покрытия Hi-Vision LongLife и Super Hi-Vision будут выводиться из ассортимента.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СКЛАД)

СКЛАД

HOYA

Отдых для глаз в цифровом мире

Наши глаза не созданы для экранов. Для этого есть Sync III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышению зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета варибельного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния (при заказе METS).
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами SYNC III.
- Рекомендован заказ с опцией METS.

Установка

Минимальная установочная высота

От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм.**

От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм.**

Установка в оправу

Центр зрачка – на уровне красной полоски по горизонтали.



Разметка

Положение центра зрачка при взгляде вдаль при естественном положении головы и тела.

Заказ


Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5 ➤ добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип SY9 ➤ добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип SY13 ➤ добавка 13 (+1,32 дптр).

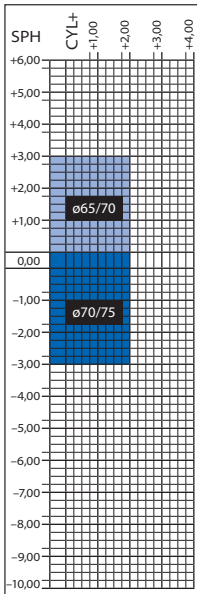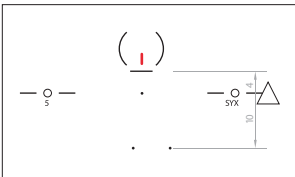

Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

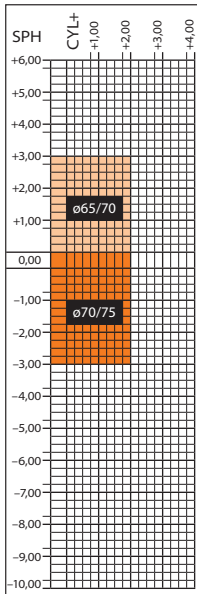

Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ



ø65/75: +0,25 ➤ +3,00
ø70/75: 0,00 ➤ -3,00
cyl ≤ 2,00

HVLL
UV CONTROL

ø65/75: +0,25 ➤ +3,00
ø70/75: 0,00 ➤ -3,00
cyl ≤ 2,00



	Срок поставки – 7 раб. дней	Срок поставки – 7 раб. дней
КОД 0,57/0,95/1,32	QS135/QS55/QS95	QS135/QS55/QS95
Гарантийные программы	G2+G4	G2+G4
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Верт. асферическ.	Верт. асферическ.
Покрытие	HVLL BlueControl	HVLL UV Control
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.



NULUX

IDENTITY

Безгранично четкое зрение

Однофокальные линзы по технологии FREEFORM от HOYA

- Безгранично четкое и естественно ясное зрение при любом направлении взгляда.
- Разработаны для современного динамичного образа жизни.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


Nulux iDentity 1.74 (STRX)

- Однофокальные линзы по технологии FreeForm от HOYA.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

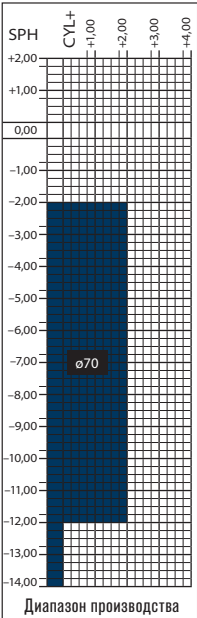

Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ø70: -2,25 ► -12,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -12,25 ► -14,00
только
стигматические



Срок поставки – 7 раб. дней

КОД	QNIV
Гарантийные программы	G4
Материал	Eyvia 1.74
Дизайн	Асферический
Hi-Vision Meiryo	[]
HVLL UV Control	[]
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Nulux iDentity 1.67 (STRX)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


Nulux iDentity 1.67 (STRX)

- Однофокальные линзы по технологии FreeForm от HOYA.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

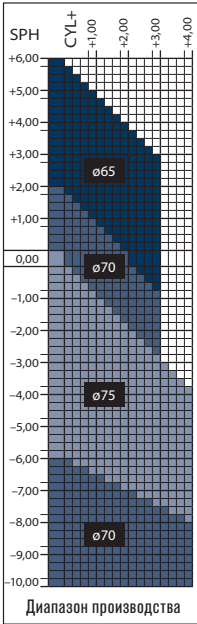

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
cyl ≤ 3,00
ø70: -6,25 ► -10,00
ø75: 0,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00

Срок поставки – 7 раб. дней

КОД	QNIY
Гарантийные программы	G4
Материал	Eynoa 1.67
Дизайн	Асферический
Hi-Vision Meiryo	[]
HVLL UV Control	[]
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



Nulux iDentity 1.60 (STRX)

- Однофокальные линзы по технологии FreeForm от HOYA.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

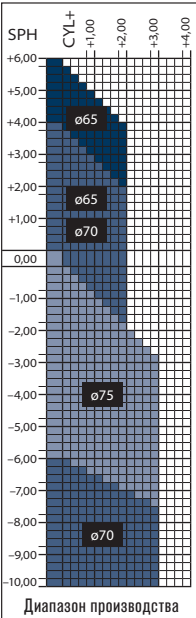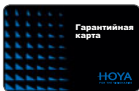

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ø65: +6,00 ▶ +0,25
ø70: +4,00 ▶ +0,25
cyl ≤ 2,00
ø70: -6,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00

Срок поставки – 7 раб. дней

КОД	QNI6
Гарантийные программы	G3+G4
Материал	Eyas 2.0 1.60
Дизайн	Асферический
Hi-Vision Meiryo	[]
HVLL UV Control	[]
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Nulux iDentity 1.50 UV400 (STRX)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


Nulux iDentity 1.50 (STRX)

- Однофокальные линзы по технологии FreeForm от HOYA.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

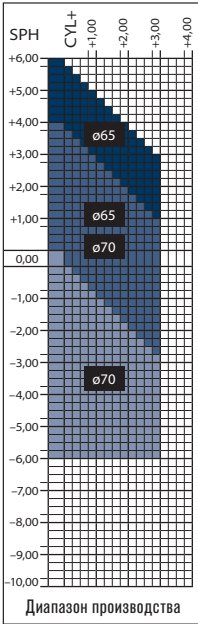

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ø65: +6,00 ► +0,25
ø70: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 3,00



КОД	QNIU
Гарантийные программы	G4
Материал	Полимер 1.50 UV400
Дизайн	Асферический
Hi-Vision Meiryo	[]
HVLL UV Control	[]
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ

Срок поставки – 7 раб. дней

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SUPEREADER A (STRX)

- Большая глубина зрения по сравнению с обычными очками для чтения.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Естественное положение головы с меньшим поворотом глаз при работе на близком расстоянии.

Характеристики

ТИП А: линзы с дегрессией ~0,75 дптр.

- Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
- Комфорт при чтении и использовании цифровых устройств.


Установка

Горизонтально. В соответствии с монокулярным межзрачковым расстоянием для близи.

Вертикально. по нижней границе зрачка или по нижнему веку (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении).


Заказ

Укажите диаметр в соответствии с монокулярным PD для близи и значение коррекции для близи.

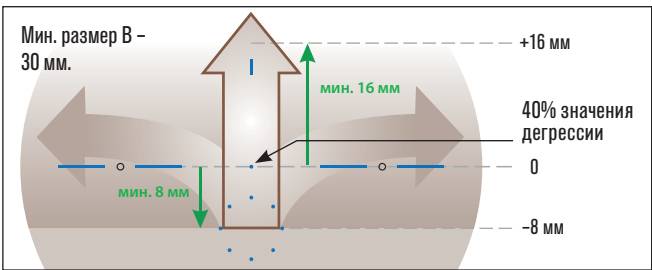

РЕКОМЕНДАЦИИ

Показанные установочные параметры являются минимальными, поэтому при определении размера В для заказа добавляйте дополнительно 4 мм вверх и вниз к минимальным параметрам для более удобного ношения очков.

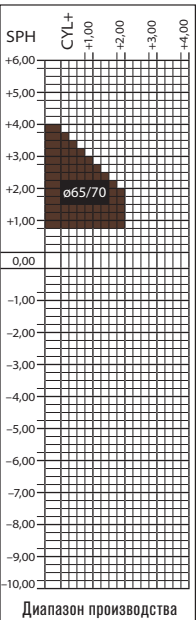


СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ø65/70: +4,00 ► +1,00
cyl ≤ 2,00

Аддикация: +0,75

НОВИНКА!

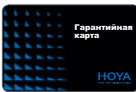

Срок поставки – 7 раб. дней

КОД		QSRAU
Гарантийные программы		G4
Материал		Полимер 1.50 UV400
Дизайн		Дегрессивный
HVLL BlueControl	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]
HVLL UV Control	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]
Hi-Vision Aqua	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Nulux Eyvia 1.74 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux Eyvia 1.74

- Ультратонкие и эстетичные.
- Легкие и комфортные.
- Безопасные – из долговечного полимерного материала.
- Отлично подходят для безободковых и полуободковых оправ.

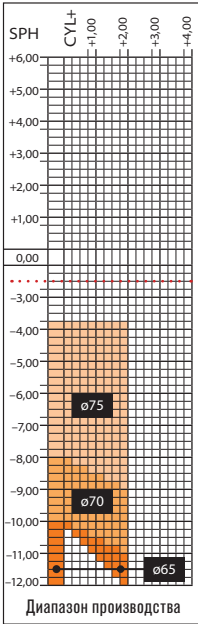

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION MEIRYO


- ø75: -3,75 ► -8,00
ø70: -8,25 ► -10,00
ø65: -10,25 ► -12,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 12 раб. дней

КОД	NVM
Гарантийные программы	G4
Материал	Eyvia 1.74
Дизайн	Асферический
Покрытие	Hi-Vision Meiryo
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

- Nulux Eynoa 1.67
- Экстратонкие.
 - Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
 - Визуально в меньшей степени изменяют размер глаз за линзой.
 - Отлично подходят для безободковых и полубоковых оправ.

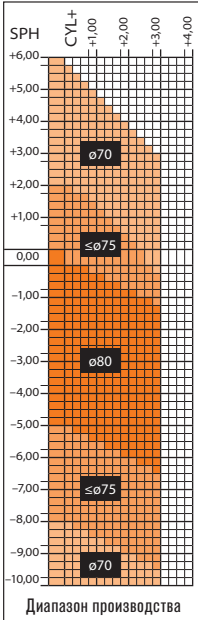


СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION MEIRYO
ø70: +6,00 ▶ +2,25
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: +2,00 ▶ +0,25
ø75: -5,25 ▶ -8,00
ø80: 0,00 ▶ -5,00
cyl ≤ 3,00

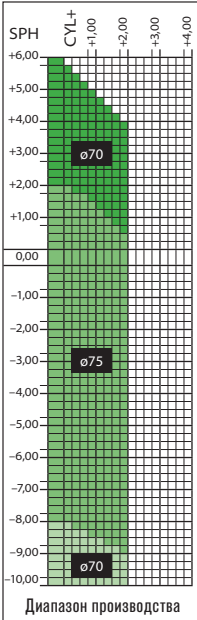


СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION MEIRYO
ø70: +6,00 ▶ +2,25
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00

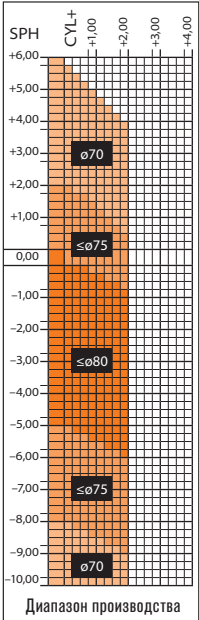


СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL
ø70: +6,00 ▶ +2,25
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: +2,00 ▶ +0,25
ø75: -5,25 ▶ -8,00
ø80: 0,00 ▶ -5,00
cyl ≤ 2,00

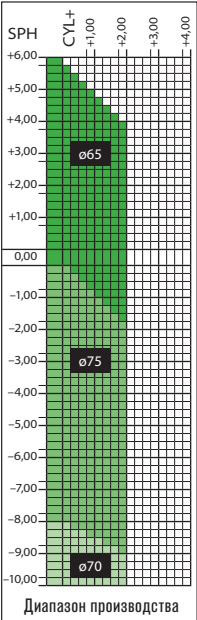

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL
ø65: +6,00 ▶ 0,00
ø75: -0,25 ▶ -8,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
cyl ≤ 2,00

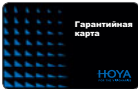

	Срок поставки – 7 раб. дней		Срок поставки – 1 раб. день		Срок поставки – 7 раб. дней	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	NY		NYM		NY	NYU
Гарантийные программы	G4		G4		G4	
Материал	Eynoa 1.67		Eynoa 1.67		Eynoa 1.67	
Дизайн	Асферический		Асферический		Асферический	
Покрытие	Hi-Vision Meiryo		Hi-Vision Meiryo		HVLL UV Control	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]		[]	


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Nulux Eyas 1.60 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА


Nulux Eyas 1.60

- Тонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально в меньшей степени изменяют размер глаз за линзой.
- Отлично подходят для безободковых и полуободковых оправ.

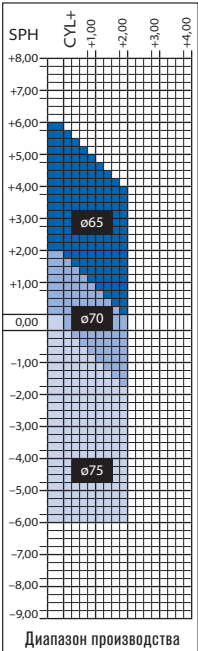


СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION MEIRYO
ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +2,00 ▶ +0,25
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00

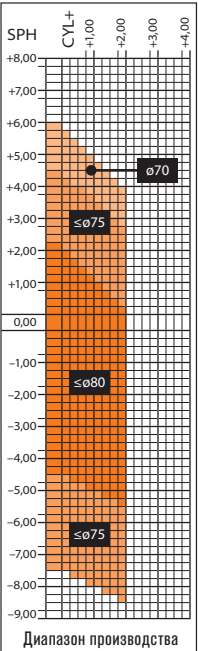

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION MEIRYO
ø70: +6,00 ▶ +4,50
ø75: +4,25 ▶ -7,50
ø80: +2,25 ▶ -4,50
cyl ≤ 2,00

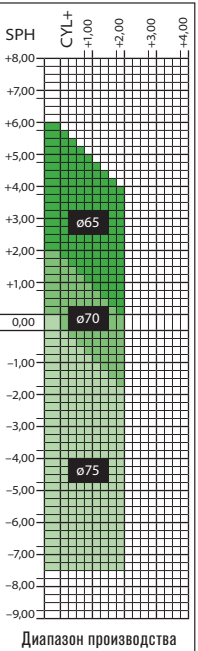

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION MEIRYO
ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +2,00 ▶ +0,25
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00




КОД	QN6B	IA6	N6M
Гарантийные программы	G3+G4	G3+G4	
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	
Дизайн	Асферический	Асферический	
Покрытие	HVLL BlueControl	Hi-Vision Meiryo	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	[]	

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux Eyas 1.60

- Тонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально в меньшей степени изменяют размер глаз за линзой.
- Отлично подходят для безободковых и полуободковых оправ.

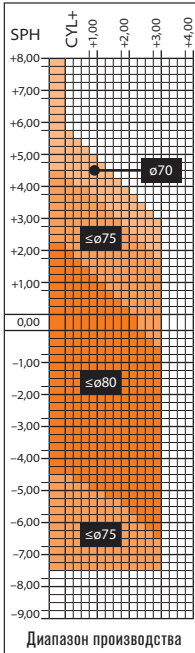


Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL
ø70: +6,00 ► +4,75
ø75: +4,25 ► -7,50
ø80: +2,25 ► -4,50
cyl ≤ 3,00
ø70: +8,00 ► +6,25
только стигматич.

Срок поставки – 7 раб. дней

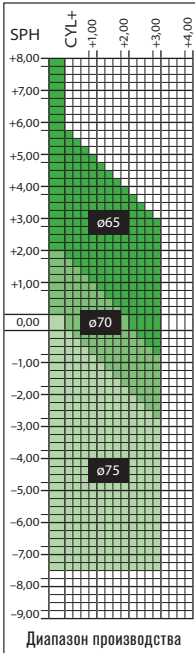

Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL
ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -7,50
cyl ≤ 3,00
ø65: +8,00 ► +6,25
только стигматич.

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	IA6	N6U
Гарантийные программы	G3+G4	
Материал	Eyas 1.60	
Дизайн	Асферический	
Покрытие	HVLL UV Control	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

HOYA SL982 1.60, Nulux PNX 1.53 и Nulux 1.50 (СКЛАД)


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux PNX 1.53

- Ультралегкие и ультрапрочные.
- Плоская поверхность.
- Подходят для безободковых и полубодковых оправ.


Nulux 1.50

- Плоская поверхность.
- Визуально в меньшей степени изменяют размер глаз за линзой.

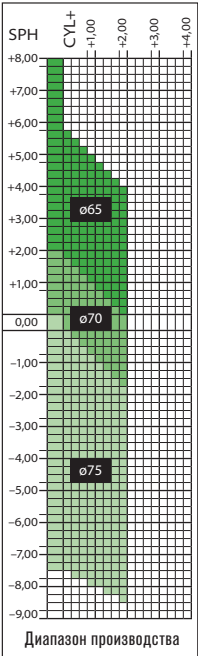


Диапазон производства

HI-VISION AQUA
ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -7,50
cyl ≤ 2,00
ø65: +8,00 ► +6,25
только стигматич.

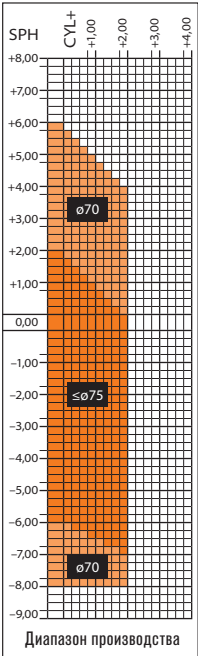


Диапазон производства

NULUX PNX 1.53
HVLL UV CONTROL
ø70: +6,00 ► -8,00
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

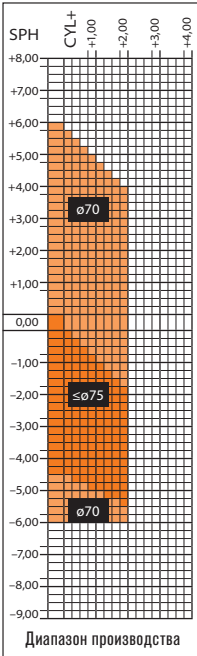


Диапазон производства

NULUX 1.50
HI-VISION AQUA
ø70: +6,00 ► +0,25
ø70: -4,75 ► -6,00
ø75: 0,00 ► -4,50
cyl ≤ 2,00

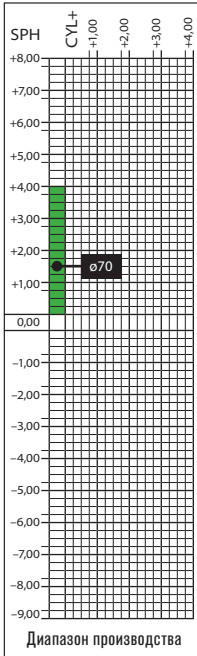

Диапазон производства

NULUX 1.50
HI-VISION AQUA
ø70: +4,00 ► +0,25
только стигматические

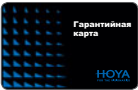

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 7 раб. дней


Срок поставки - 1 раб. день

КОД	SL982	PXA	IA5	PNL5
Гарантийные программы	G1	G3+G4	G1	G1
Материал	Полимер 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический	Асферический
Покрытие	Hi-Vision Aqua	HVLL UV Control	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]	[]

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Hilux Eynoa 1.67


- Очень тонкие даже в случае большой рефракции.
- Отлично подходят для безободковых и полуободковых оправ.

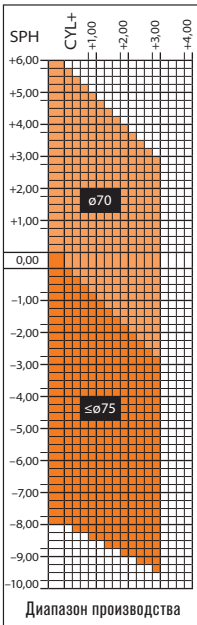

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION MEIRYO


ø70: +6,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 3,00

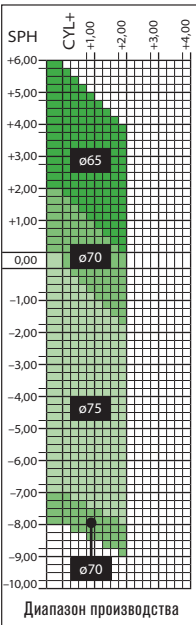

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION MEIRYO


ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
ø70: -7,25 ► -8,00
ø75: 0,00 ► -7,00
cyl ≤ 2,00

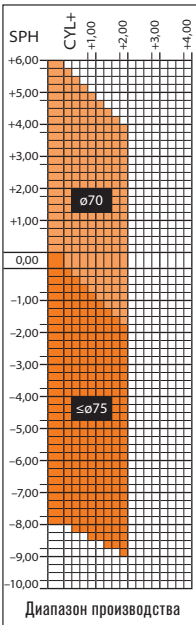

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL


ø70: +6,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00

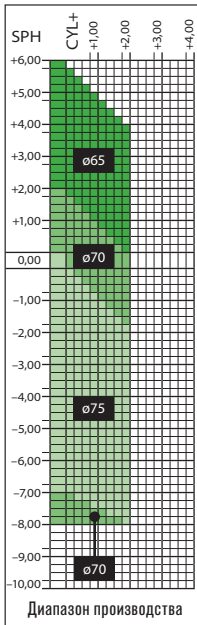

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL

ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
ø70: -7,25 ► -8,00
ø75: 0,00 ► -7,00
cyl ≤ 2,00

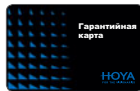

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	НУ	НУМ	НУ	НУУ
Гарантийные программы	G4		G4	
Материал	Eynoa 1.67		Eynoa 1.67	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Meiryo		HVLL UV Control	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]	

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.


Hilux Eyas 1.60 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА


- Hilux Eyas 1.60
- Тонкие.
 - Подходят для безободковых и полуободковых оправ.

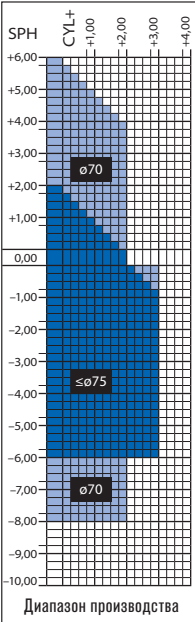


СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

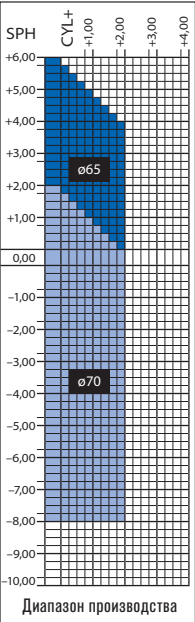

СКЛАД В МОСКВЕ

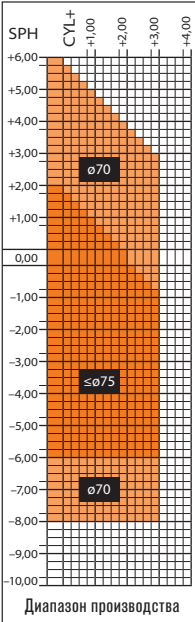

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

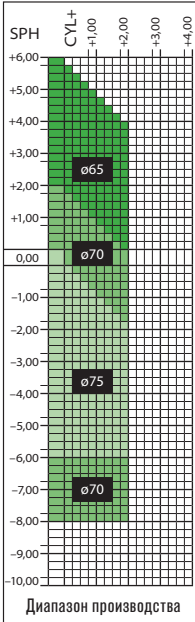

СКЛАД В МОСКВЕ



ø70: +6,00 ▶ +2,25
ø75: +2,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -0,25 ▶ -0,75
ø70: -0,25 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00



ø65: +6,00 ▶ +0,25
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



ø70: +6,00 ▶ -8,00
ø75: +2,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00



ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +2,00 ▶ +0,25
ø70: -6,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	I16	QH6B	I16	H6M
Гарантийные программы	G3+G4		G3+G4	
Материал	Eyas 2.0 1.60		Eyas 1.60	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	HVLL BlueControl		Hi-Vision Meiryo	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]	

Hilux Eyas 1.60 и HOYA SL82 1.60 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Hilux Eyas 1.60


- Тонкие.
- Подходят для безободковых и полубодковых оправ.

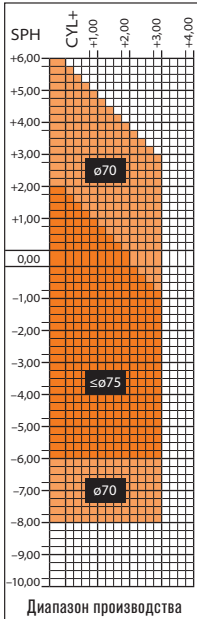

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL


ø70: +6,00 ► +2,25
ø70: -6,25 ► -8,00
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 3,00

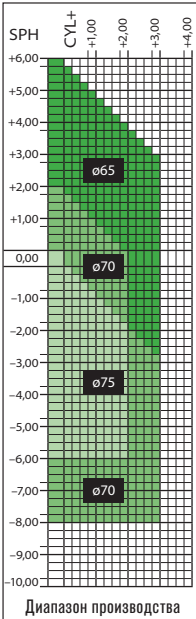

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL


ø65: +6,00 ► +2,25
ø70: +2,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00
ø65: +3,75 ► -2,75
ø70: -2,25 ► -8,00
cyl ≤ 3,00

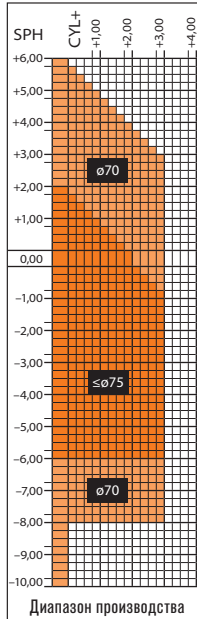

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION AQUA


ø70: +6,00 ► +2,25
ø70: -6,25 ► -8,00
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 3,00
ø70: -8,25 ► -10,00
только
стигматические

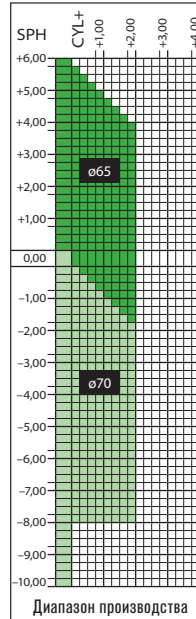

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION AQUA

ø65: +6,00 ► +0,25
ø70: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -8,25 ► -10,00
только
стигматические

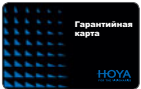

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	I16	H6U	I16	SL82
Гарантийные программы	G3+G4		G1+G3	G1
Материал	Eyas 1.60		Eyas 1.60	Полимер 1.60
Дизайн	Сферический		Сферический	Сферический
Покрытие	HVLL UV Control		Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]		[]	[]


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Nilux PNX 1.53 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nilux PNX 1.53


- Ультралегкие и ультра-прочные.
- Подходят для безободковых и полубо-
дковых оправ.

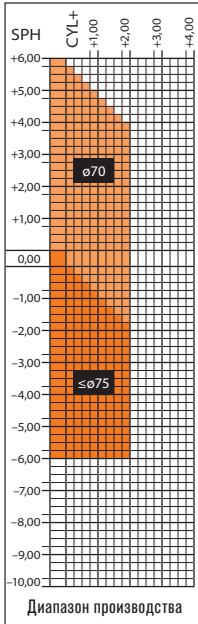

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION MEIRYO


ø70: +6,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

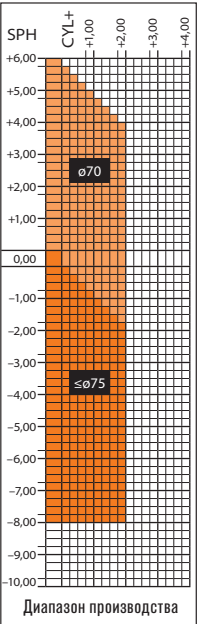

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL


ø70: +6,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00

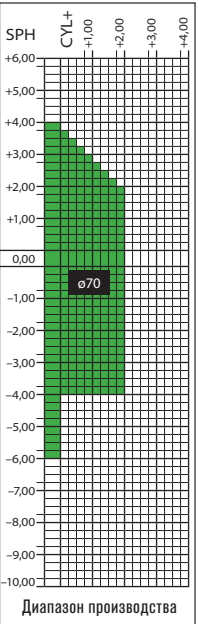

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL


ø70: +4,00 ► -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ► -6,00
только
стигматические

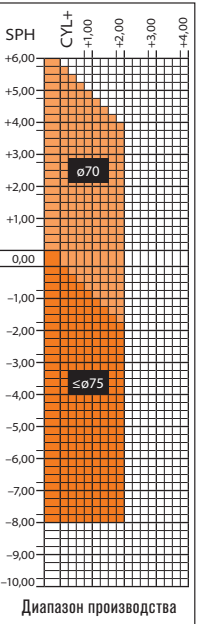

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HI-VISION AQUA

ø70: +6,00 ► +0,25
ø75: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00

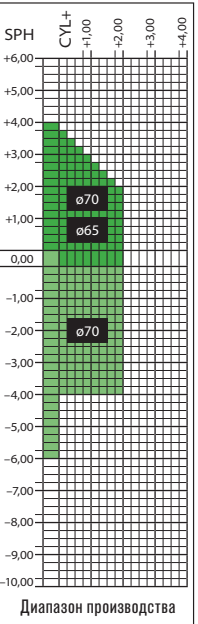

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION AQUA

ø65: +4,00 ► +0,25
ø70: +4,00 ► -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ► -6,00
только
стигматические



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 7 раб. дней


Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	PX1	PX1	HXU	PX1	EPI
Гарант. программы	G3+G4	G3+G4		G1+G3	
Материал	PNX 1.53	PNX 1.53		PNX 1.53	
Дизайн	Сферический	Сферический		Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Meiryo	HVLL UV Control		Hi-Vision Aqua	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ		2 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	[]		[]	

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

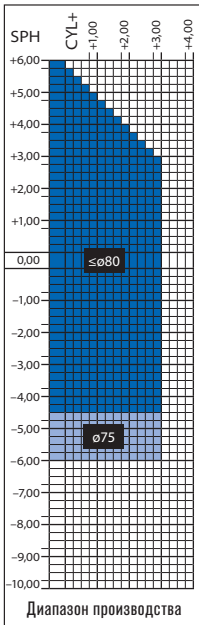


Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

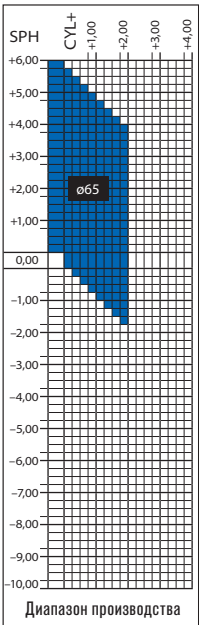


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

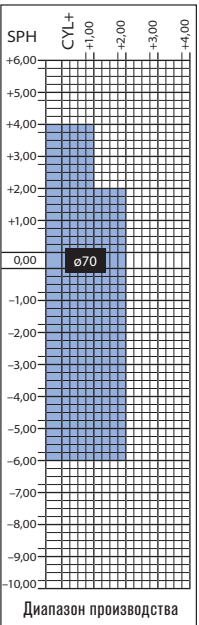


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

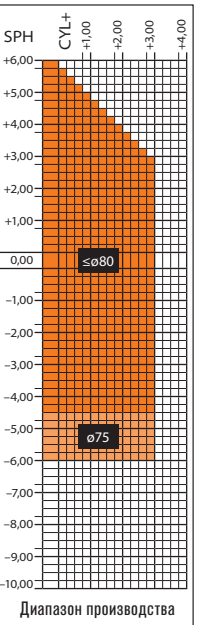

Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

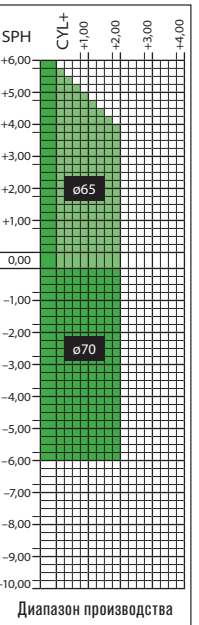

Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

ø75: -4,75 ► -6,00
ø80: +6,00 ► -6,00
cyl ≤ 3,00

ø65: +6,00 ► +0,25
cyl ≤ 2,00

ø70: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

ø75: -4,75 ► -6,00
ø80: +6,00 ► -4,50
cyl ≤ 3,00

ø65: +5,75 ► 0,00
ø70: -0,25 ► -6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: +6,00 ► -6,00
только
стигматические



Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней


Срок поставки - 1 раб. день

КОД	HI	QH5B	HU	HUM
Гарант. программы	G4		G4	
Материал	Полимер 1.50		Полимер 1.50 UV400	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	HVLL BlueControl		Hi-Vision Meiryo	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]	

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Hilux 1.50 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

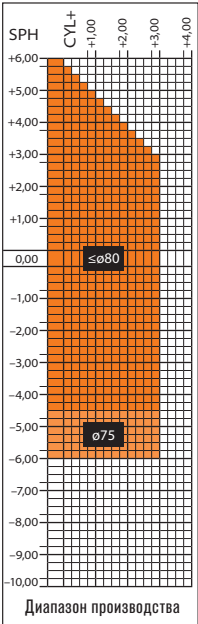


Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HVLL UV CONTROL

ø75: -4,75 ▶ -6,00
ø80: +6,00 ▶ -4,50
cyl ≤ 3,00

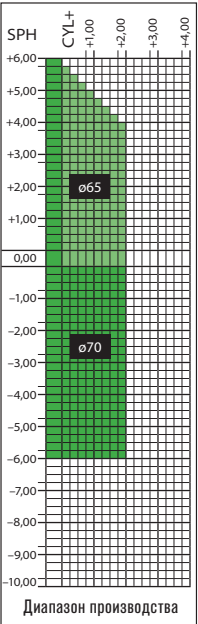


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HVLL UV CONTROL

ø65: +5,75 ▶ 0,00
ø70: -0,25 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
только
СТИГМАТИЧЕСКИЕ

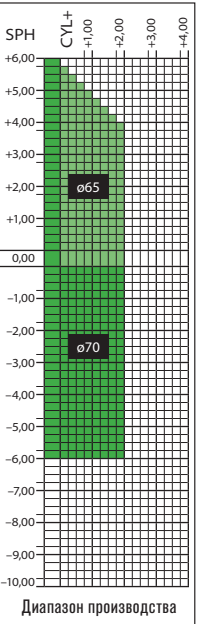


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION VIEW PROTECT PLUS

ø65: +5,75 ▶ 0,00
ø70: -0,25 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
только
СТИГМАТИЧЕСКИЕ

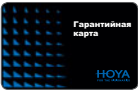

Срок поставки – 7 раб. дней

НУ

G4

Полимер 1.50 UV400

Сферический

HVLL UV Control

3 ГОДА ГАРАНТИИ

[]

Срок поставки – 1 раб. день

НУУ

G1

Полимер 1.50 UV400

Сферический

Hi-Vision View Protect Plus

2 ГОДА ГАРАНТИИ

[]

Срок поставки – 1 раб. день

НУVP

G1

Полимер 1.50 UV400

Сферический



Hi-Vision View Protect Plus


2 ГОДА ГАРАНТИИ

[]

Nilux 1.50 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

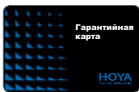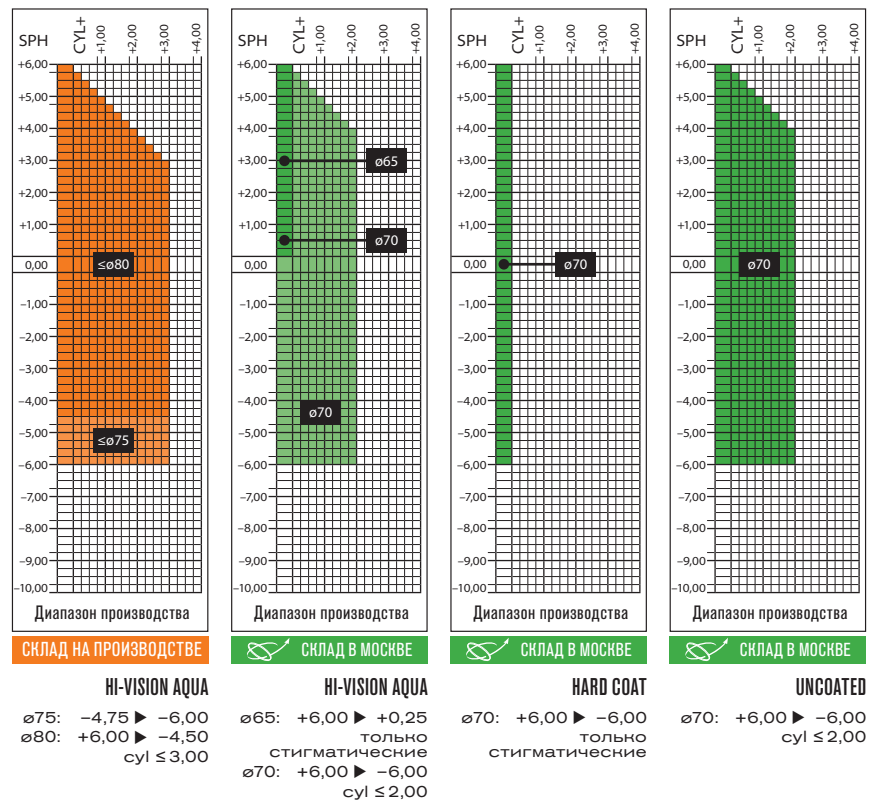

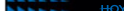	Срок поставки – 7 раб. дней		Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	HI	IMT	ITI	ENI	
Гарантийные программы	G1		—	—	
Материал	Полимер 1.50		Полимер 1.50	Полимер 1.50	
Дизайн	Сферический		Сферический	Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Aqua		Hard Coat	Без покрытия	
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ		—	—	
Стоимость	[]		[]	[]	

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Sensity 2


Nulux 1.67 Sensity 2 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ (КОРИЧНЕВЫЕ/СЕРЫЕ/ЗЕЛЕННЫЕ) АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



ЛИНЗЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СВЕТУ

Высококачественное
фотохромное покрытие
от HOYA

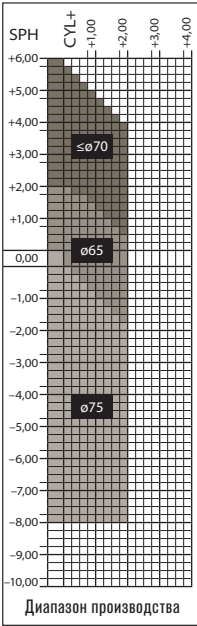

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

NULUX EYNOA 1.67 SENSITY 2
HVLL UV CONTROL


ø65: +6,00 ► +0,25
ø70: +6,00 ► +2,25
ø75: 0,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки – 7 раб. дней

КОД	QNYB2/QNYG2/QNYN2
Гарантийные программы	G4
Материал	Eynoa 1.67
Дизайн	Асферический
Цвет	Серый, коричневый, зеленый
Покрытие	HVLL UV Control
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]

Hilux 1.60 Sensity 2 | Sensity Original (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ (КОРИЧНЕВЫЕ/СЕРЫЕ) СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

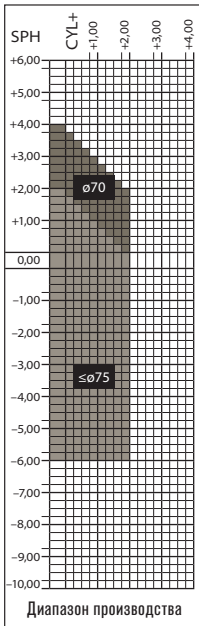


Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HILUX EYAS 1.60
SENSITY 2
HVLL UV CONTROL

ø70: +4,00 ► +2,25
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 7 раб. дней

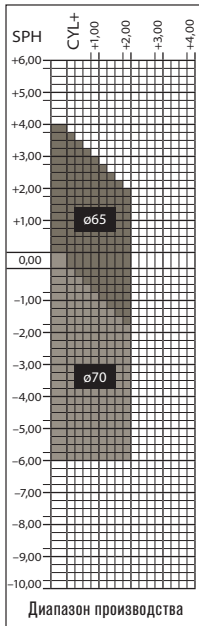


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX EYAS 1.60
SENSITY 2
HVLL UV CONTROL

ø65: +4,00 ► +0,25
ø70: 0,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 1 раб. день

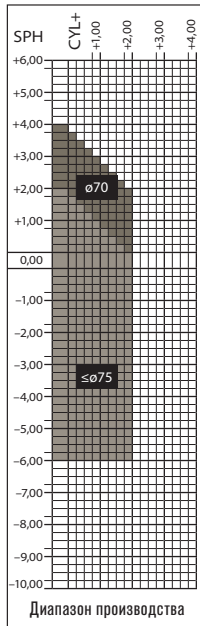


Диапазон производства

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HILUX EYAS 1.60
SENSITY ORIGINAL
SUPER HI-VISION

ø70: +4,00 ► +2,25
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 7 раб. дней

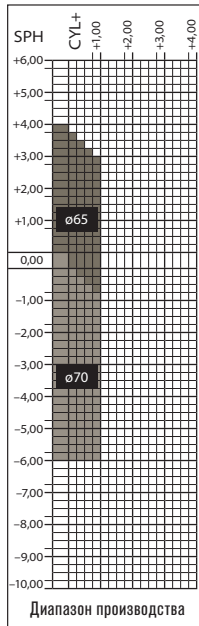

Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX EYAS 1.60
SENSITY ORIGINAL
SUPER HI-VISION

ø65: +4,00 ► +0,25
ø70: 0,00 ► -6,00
cyl ≤ 1,00

Срок поставки - 1 раб. день




КОД	I16	QH6G2 / QH6B2	I16	QH6OG / QH6OB
Гарантийные программы	G3+G4		G3+G4	
Материал	Eyas 1.60		Eyas 1.60	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Цвет	Серый/коричневый		Серый/коричневый	
Покрытие	HVLL UV Control		Super Hi-Vision	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]	

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.


Hilux 1.50 Sensity 2 | Sensity Original (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ (КОРИЧНЕВЫЕ/СЕРЫЕ) СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

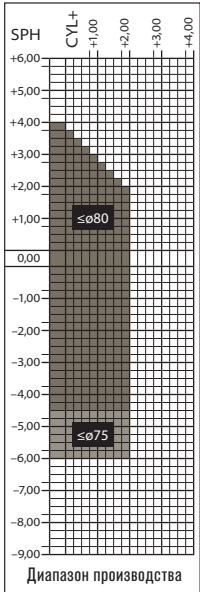


СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

**HILUX 1.50
SENSITY 2
HVLL UV CONTROL**
ø75: -4,75 ▶ -6,00
ø80: +4,00 ▶ -4,50
cyl ≤ 2,00

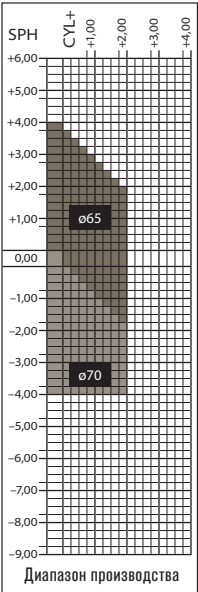

СКЛАД В МОСКВЕ

**HILUX 1.50
SENSITY 2
HVLL UV CONTROL**
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00

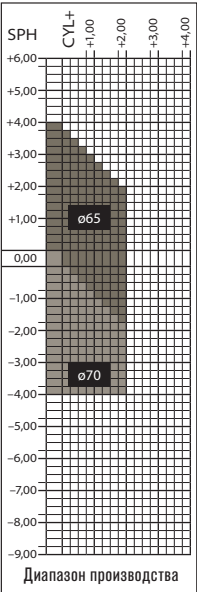

СКЛАД В МОСКВЕ


**HILUX 1.50
SENSITY ORIGINAL
SUPER HI-VISION**
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 1 раб. дней			
КОД	HI	QH5G2 / QH5B2	QH5OG / QH5OB
Гарантийные программы	G4		
Материал	Полимер 1.50		
Дизайн	Сферический		
Цвет	Серый/коричневый		
Покрытие	HVLL UV Control		
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		
Стоимость	[]		

HiLux 1.60 – окрашенные линзы (СКЛАД)


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

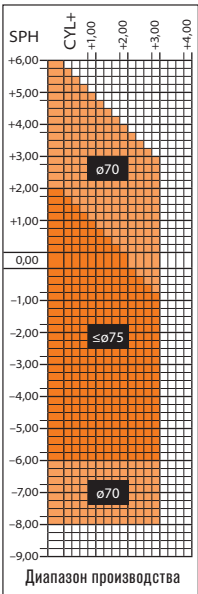

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HIUX EYAS 1.60 COLOR

ø70: +6,00 ► +2,25
ø70: -6,00 ► -8,00
ø75: +2,00 ► -6,00
cyl ≤ 3,00

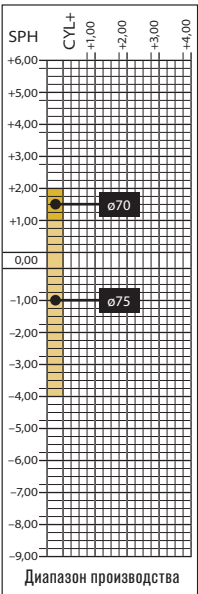

СКЛАД В МОСКВЕ

HIUX EYAS 2.0 1.60 COLOR

ø70: +2,00 ► +1,25
ø75: +1,00 ► -4,00
только
стигматические



на данную позицию скидки клиента не распространяются

КОД	I16	RH6R
Гарантийные программы	G1+G3+G4	G3+G4
Материал	Eyas 1.60	Eyas 2.0 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический
Hi-Vision Sun Pro (HVSP) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]
Hi-Vision Meiryō (HVM) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	—
HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	—
Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	—
COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	Да	Maroon (MR85), Granite (GR85), Am. Gray (G15) 85%

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.


Hilux 1.50 – окрашенные линзы (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ И ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

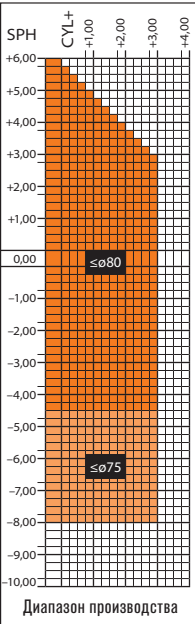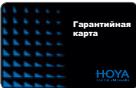

СКЛАД НА ПРОИЗВОДСТВЕ

HILUX 1.50 COLOR
≤ø80: +6,00 ► -4,50
ø75: -4,75 ► -8,00
cyl ≤ 3,00

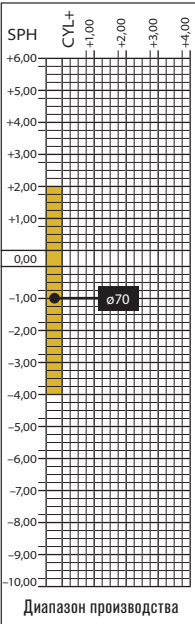

СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX 1.50 COLOR
ø70: +2,00 ► -4,00
только
стигматические


на данную позицию скидки клиент не распространяются

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	HI	RHUR
Гарантийные программы	G1+G4	G4
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Дизайн	Сферический	Сферический
Hi-Vision Sun Pro (HVSP) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]
HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	—
Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	—
Hard Coat (HC)	[]	—
COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	Да	Maroon (MR85), Granite (GR85), Am. Gray (G15) 85%
UV400 (Maroon A)	Да	—


ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

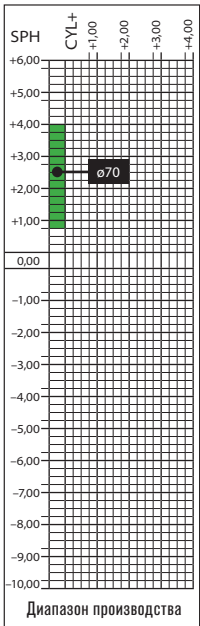

Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION
ø70: +4,00 ► +1,00
только
стигматические

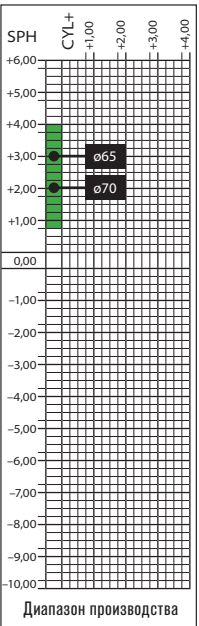


Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION AQUA
ø65: +4,00 ► +1,00
ø70: +4,00 ► +1,00
только
стигматические

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 1 раб. день

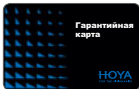


КОД	APS	APV
Гарантийные программы	G4	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Стоимость	[]	[]
Стоимость	—	—
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в наш клиентский сервис.

Addpower 60


Hilux Kids (СКЛАД)

ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

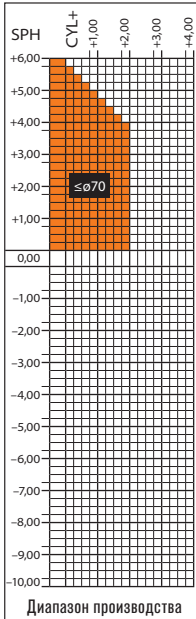


Склад на производстве

HILUX KIDS PNX 1.53 HI-VISION AQUA
ø70: +6,00 ► +0,25
cyl ≤2,00

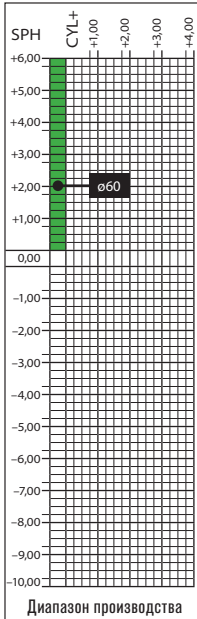


Склад в Москве

HILUX KIDS PNX 1.53 HI-VISION AQUA
ø60: +0,25 ► +6,00
только
стигматические

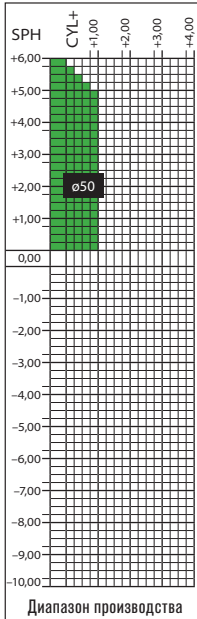

Склад в Москве

HILUX KIDS PNX 1.53 HI-VISION AQUA
ø50: +0,25 ► +6,00
cyl ≤1,00

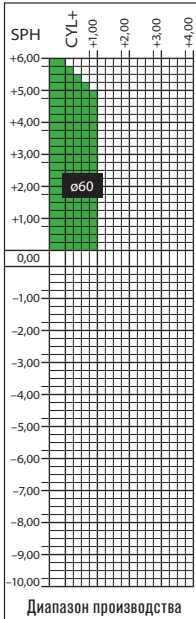

Склад в Москве

HILUX KIDS 1.50 HI-VISION AQUA
ø60: +0,25 ► +6,00
cyl ≤1,00



	Срок поставки – 7 раб. дней		Срок поставки – 1 раб. день	
	Срок поставки – 1 раб. день		Срок поставки – 1 раб. день	
КОД	PX1		KNXV	
Гарантийные программы	G1+G3		G1	
Материал	PNX 1.53		Полимер 1.50	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Aqua		Hi-Vision Aqua	
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ		2 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]		[]	

Линзы для детей

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



HOYA

Особенности

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

SYNC
III



NULUX
IDENTITY V+



NULUX



HILUX



Варианты изготовления

	EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50
SYNC II					
NULUX IDENTITY V+					
NULUX					
HILUX					



Отдых для глаз в цифровом мире

Наши глаза не созданы для экранов. Для этого есть Sync III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM




- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета варибельного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния и параметров посадки оправы.
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами Sync III i.

Установка

Минимальная установочная высота
От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм.**
От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм.**

Установка в оправу
Центр зрачка – на уровне красной полоски по горизонтали.

Разметка
Положение центра зрачка при взгляде вдаль при естественном положении головы и тела.

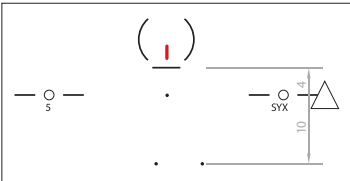

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84%** Зеленый 7 ► 86%** Серый 7 ► 88%** Синий* 7 ► 85%**
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
		Линзы Sync III i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Заказ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5_ ► добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип SY9_ ► добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип SY13_ ► добавка 13 (+1,32 дптр).

METS является обязательным. Кроме установочных данных и параметров размера оправы укажите вертексное расстояние (FCD), пантиоскопический угол (WPA) и угол изгиба оправы (FFFA).

Материалы и свойства

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	FreeForm по внутренней поверхности				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	SY5V SY9V SY13V	SY5Y SY9Y SY13Y	SY56 SY96 SY136	SY5X SY9X SY13X	SY55 SY95 SY135
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
		[]	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами Sync III.

Установка

Минимальная установочная высота
От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм**.
От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм**.

Установка в оправу
Центр зрачка – на уровне красной полоски
по горизонтали.

Разметка
Положение центра зрачка при взгляде вдаль
при естественном положении головы и тела.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%* Синий* 7 ► 85%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
		Линзы Sync III доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Заказ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5_ ► добавка 5 (+0.57 дптр).
- Тип SY9_ ► добавка 9 (+0.95 дптр).
- Тип SY13_ ► добавка 13 (+1.32 дптр).

METS является обязательным для оптимизации дизайна линзы.

Материалы и свойства

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	FreeForm по внутренней поверхности				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	S5V S9V S13V	S5Y S9Y S13Y	S56 S96 S136	S5X S9X S13X	S55 S95 S135
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISIONSUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
		[]	[]	[]	[]	[]
	HOYAMIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	MIRROR Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

EYVIA 1.74
кроме Sensity

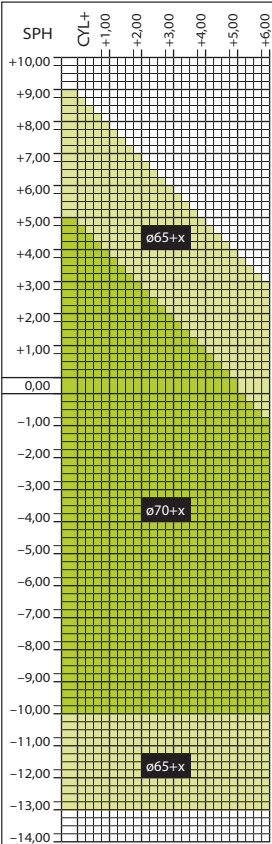


Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00
ø65+x: +9,00 ► -13,00

cyl ≤ 6,00
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при размещении с METS

EYNOA 1.67

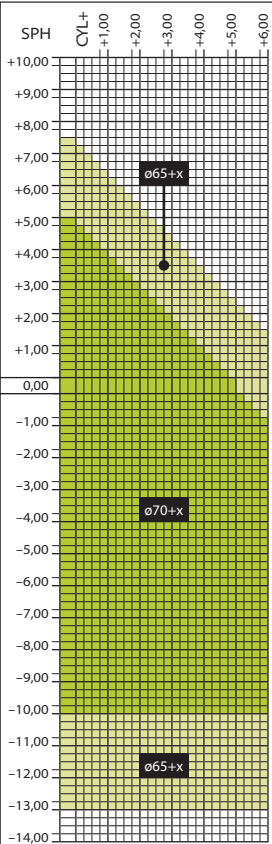


Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00
ø65+x: +7,50 ► -13,00

cyl ≤ 6,00
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при размещении с METS

EYAS 2.0 1.60

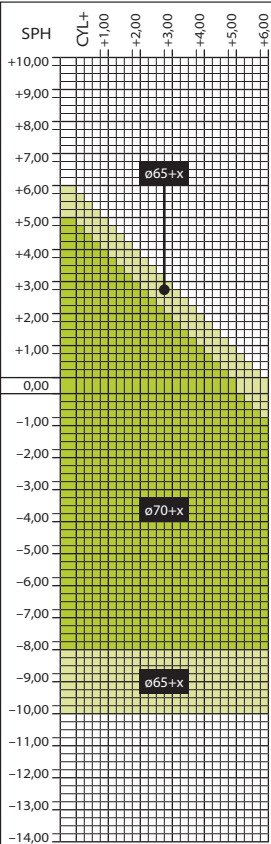


Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -8,00
ø65+x: +6,00 ► -10,00

cyl ≤ 6,00
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при размещении с METS

PNX 1.53, ПОЛИМЕР 1.50

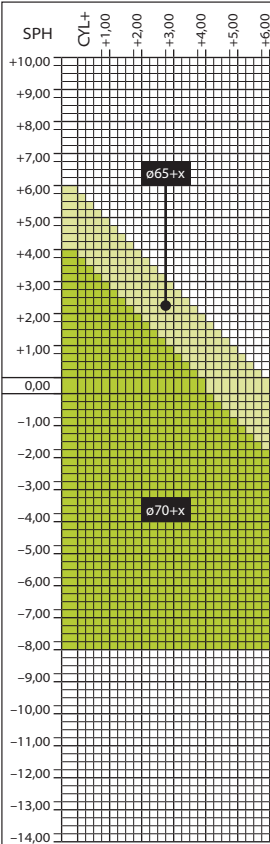

Диапазон производства

ø70+x: +4,00 ► -8,00
ø65+x: +6,00 ► -8,00

cyl ≤ 6,00
Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при размещении с METS

Персонально четкое зрение

**Персонализированные однофокальные линзы,
учитывающие индивидуальные параметры пользователя**

- Четкое и естественно ясное зрение при любом направлении взгляда.
- Эстетичный внешний вид.
- Разработаны для современного динамичного образа жизни.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

Nulux
iDentity V+



- Индивидуальные асферические однофокальные линзы HOYA, учитывающие параметры посадки оправы.
- Четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Эстетичный внешний вид в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-печатью) должна располагаться по центру зрачка.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
		Линзы Nulux iDentity V+ доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.

** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.
- Обязательное заполнение METS.

Материалы и свойства





Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР	
IDENTITY V+		174	167	160	150	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NIDV	NIDY	NID6		NID5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4		G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
	2		+ []	+ []		+ []
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
DARK		+ []	+ []		+ []	
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	SENSITY	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
	SHINE		—	[]		[]
	HI-VISION	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP				
	SUN PRO	[]	[]	[]		[]
	HOYA	Light Mirror	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
silver / blue / violet / copper		—	[]		[]	
MIRROR	Mirror	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
	silver / gold / blue	—	[]		[]	
COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]		**
HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

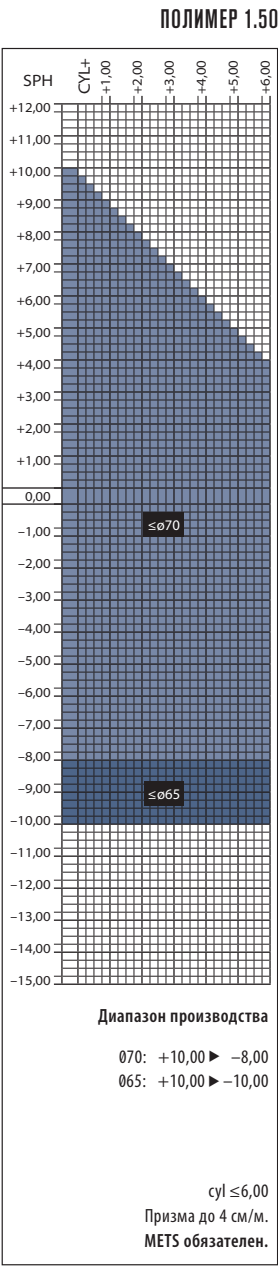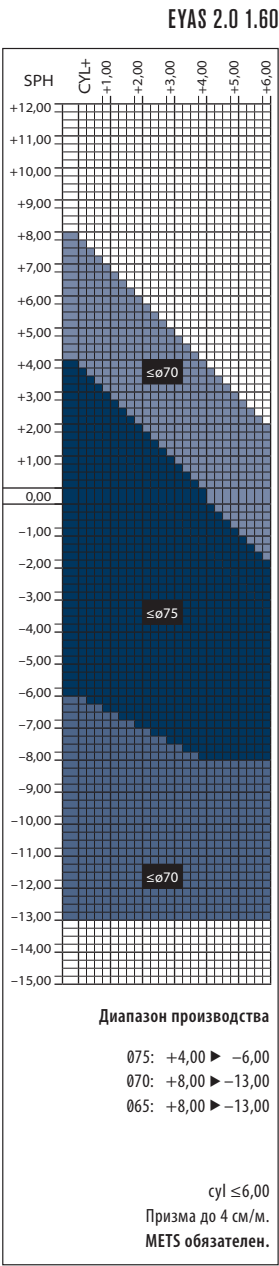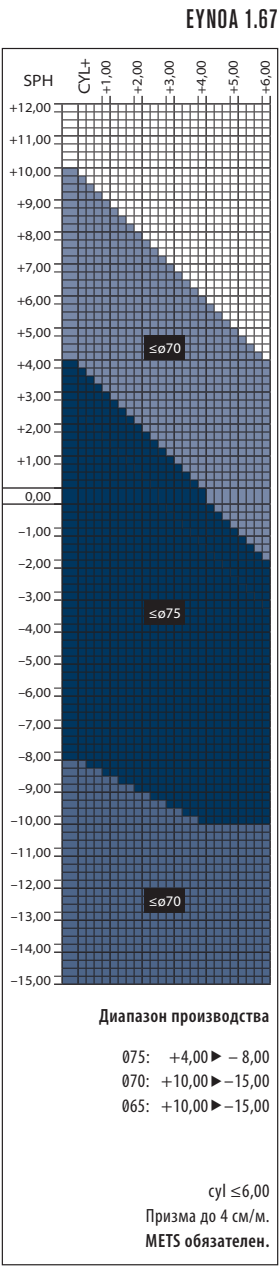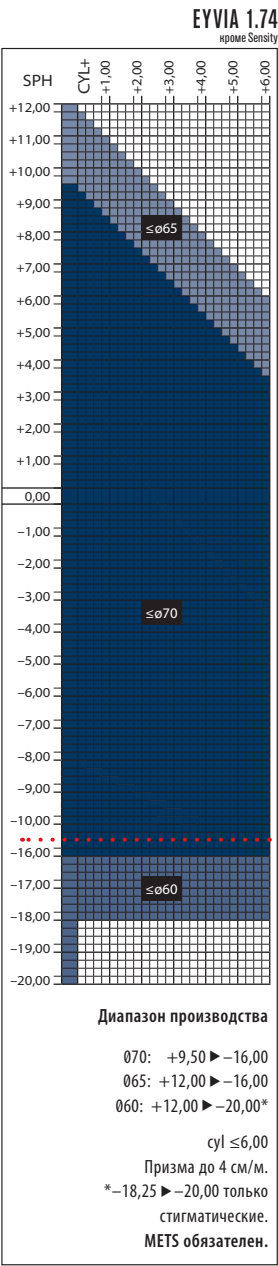



Асферические линзы

- Широкое поле зрения без искажений.
- Визуально практически не меняют размер глаз даже при высоких рефракциях.
- Уплощенная базовая кривизна.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Этот дизайн позволяет сделать линзу тоньше и эстетически более привлекательной даже при высоких рефракциях.
- Более комфортное зрение по периферии, нет необходимости постоянно поворачивать голову, чтобы хорошо видеть что-либо сбоку.



Установка

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Материалы и свойства

Дизайн	Двусторонний асферический				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
TRUEFORM		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NTV	NTY	NT6	NTX	NT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP				
	SUN PRO	[]	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ






UV

UV

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.

** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

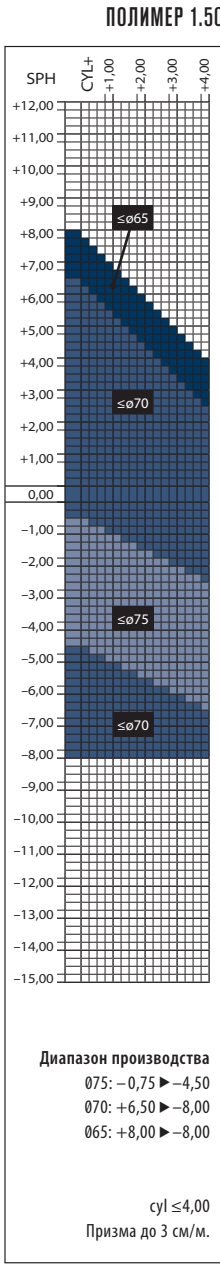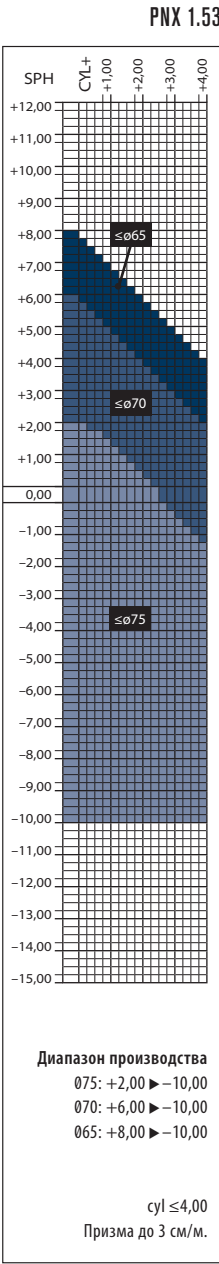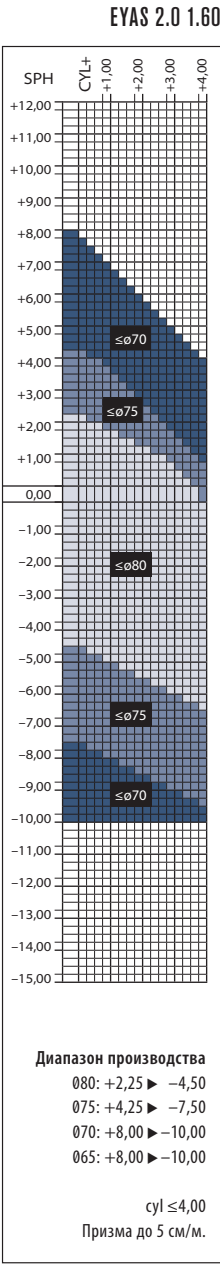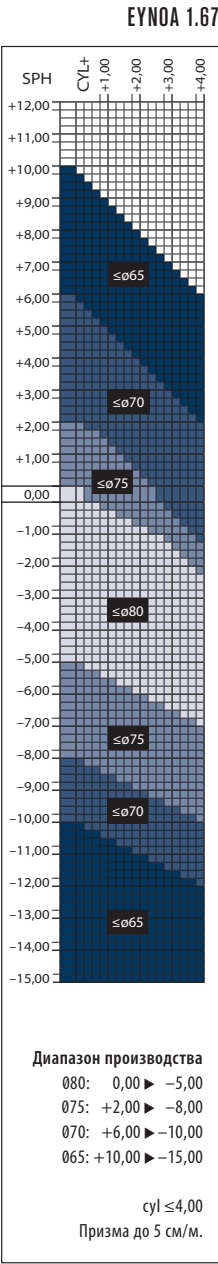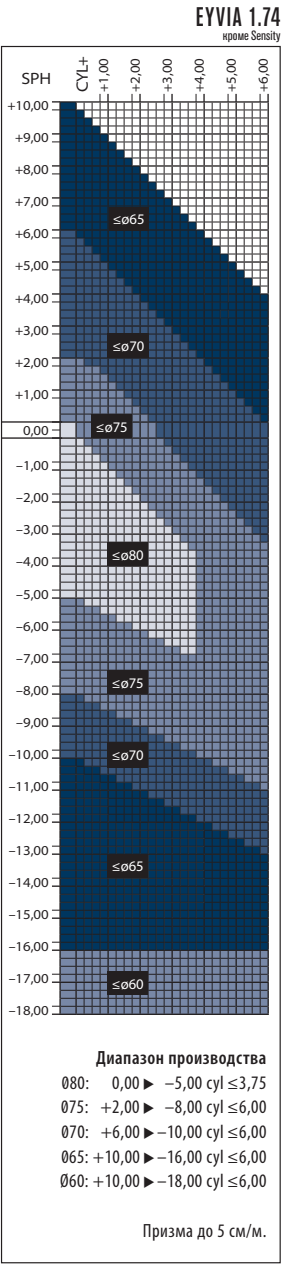

HILUX

TRUEFORM

Hilux TrueForm

Сферические линзы

- Широкий диапазон производства.
- Возможность дополнительных опций.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Рекомендованы для небольших значений рефракции.
- Качество HOYA по доступной цене.



Установка

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.


Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
		Линзы Hilux TF доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

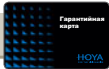

Гарантии на покрытия
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая/аторическая внутренняя поверхность				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM


HILUX		EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
TRUEFORM		1.67	1.60	1.53	1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	НТУ	НТ6	НТХ	НТ5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G1+G3+G4	G1+G3+G4	G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—		
	СРОК ПОСТАВКИ	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG		
			+	+	+
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
			+	—	+
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS		
			—	—	
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP		
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	—	
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—		
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180			**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.


** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

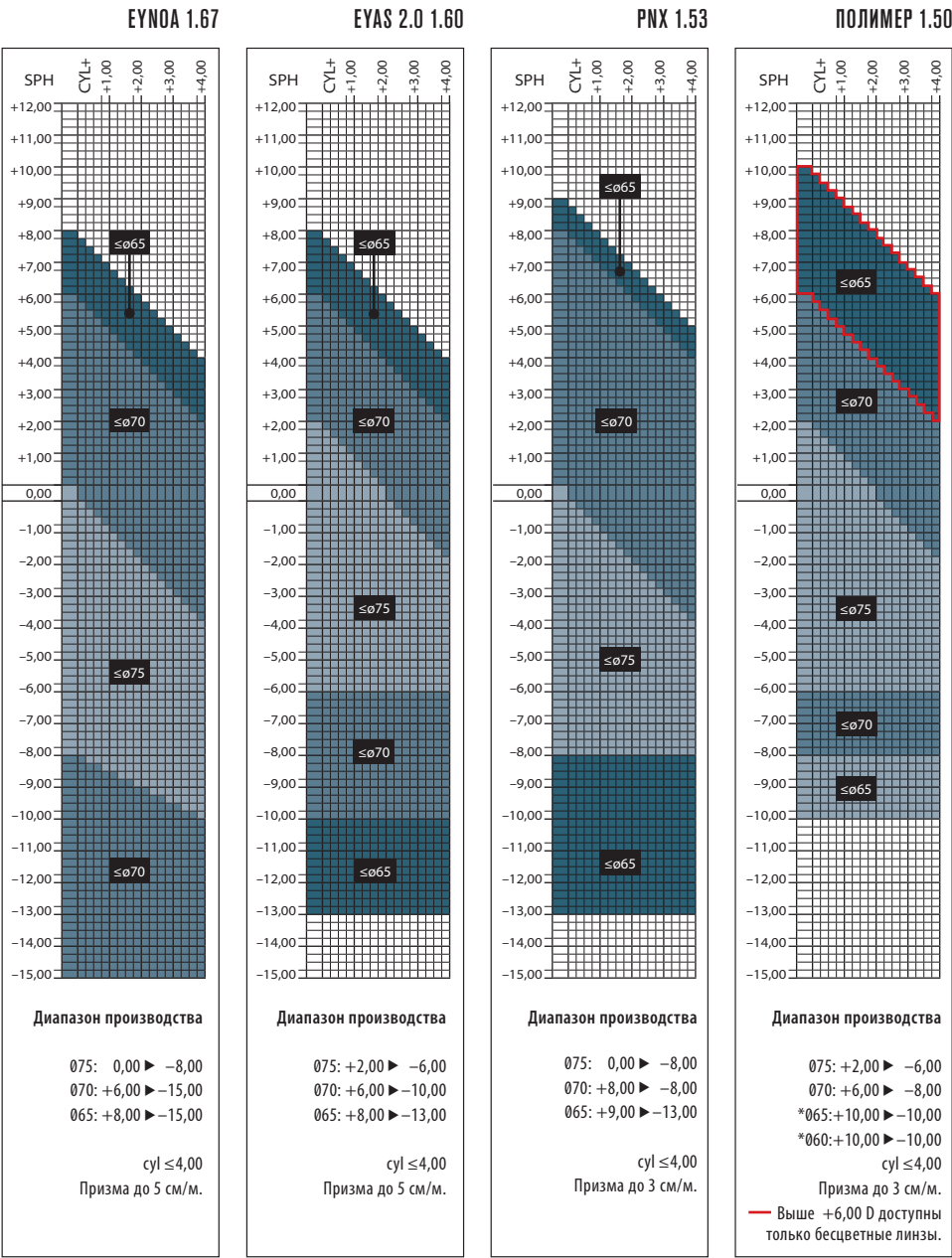

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Hilux Star – линзы для высоких плюсовых рефракций

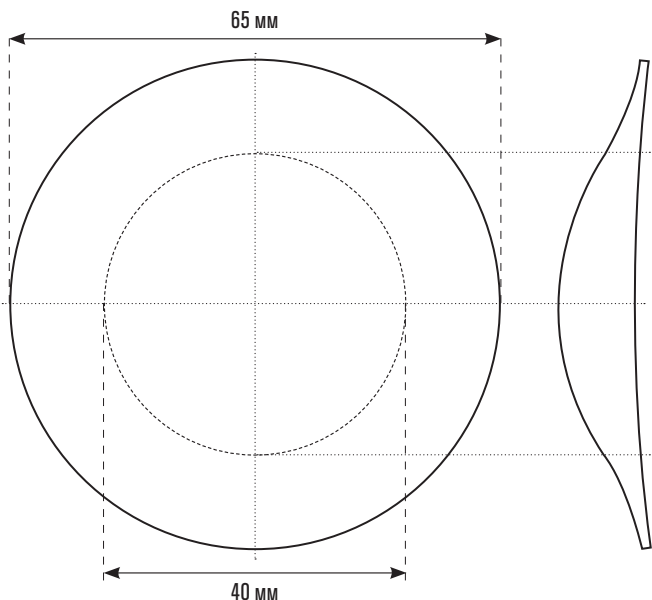

HILUX

Установка


При некорректной центровке линз может возникать призматический эффект, поэтому разметка должна быть выполнена с высоким уровнем точности. При заказе ленткулярных линз Nilux указывайте необходимое положение оси.

Эффективный диаметр

HILUX STAR 1.50	40 мм
HILUX LENTICULAR CX & CC 1.50	
CX	40 мм
CC	
–4,50D ▶ –15,50D	40 мм
–15,75D ▶ –20,50D	35 мм
–20,75D ▶ –30,00D	30 мм

Эффективный диаметр ленткулярных линз должен максимально соответствовать наименьшему диаметру в заказанной паре.

Гарантии

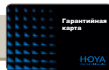

Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife и HVLL BlueControl.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА	HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
Ø65	+8,00 ▶ +18,00*	–4,50 ▶ –30,00	+12,00 ▶ +22,00
CuI	≤ 4,00	≤ 4,00	≤ 4,00
Призма до, см/м	4		4

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферический		
	HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	58	58	58
Удельный вес, г/см³	1,32	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	340	340	340
Прочность на разрыв, кгс	10–20	10–20	10–20
Для полубоковых оправ	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется

Внимание! При заказе линз Lenticular CC 1.50 выше –20,50 не рекомендуется заказывать покрытия (из-за высокой базовой кривизны линзы они могут быть нанесены неравномерно).



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HILUX			HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		HS5	ILC	ILX
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G4	G1+G4	G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	 БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]*	[]*	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * На данных линзах невозможно градиентное окрашивание!
Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50
воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A).



Линзы для высоких рефракций

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HILUX		NULUX		NULUX EVAS 2.0 1.60		HILUX PNX 1.53		HILUX 1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД			NOR6		HORX		HOR5	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G3+G4		G1+G3+G4		G1+G4	
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней		10 рабочих дней		10 рабочих дней	
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]		—		[]	
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]		[]		[]	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]		[]		[]	
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ		[]		[]		[]	
	 COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]		[]		[]*	
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	




* На данных линзах невозможно градиентное окрашивание!
Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A).



ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА


NULUX EYAS 2.0 1.60

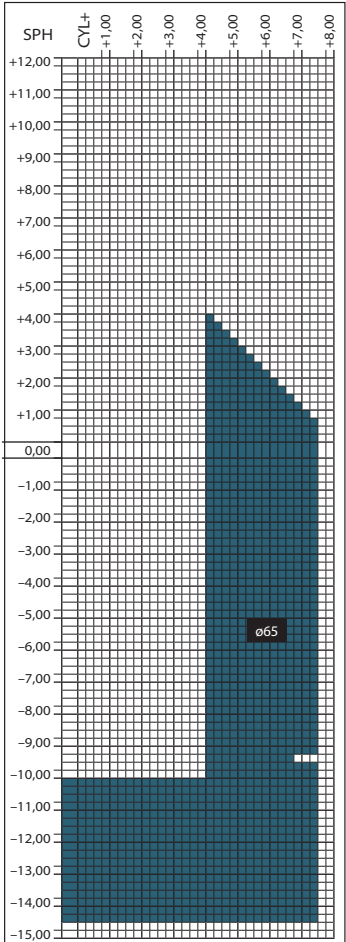

Диапазон производства

ø65: +4,00 ► – 14,50
cyl ≤ +7,50

HILUX PNX 1.53

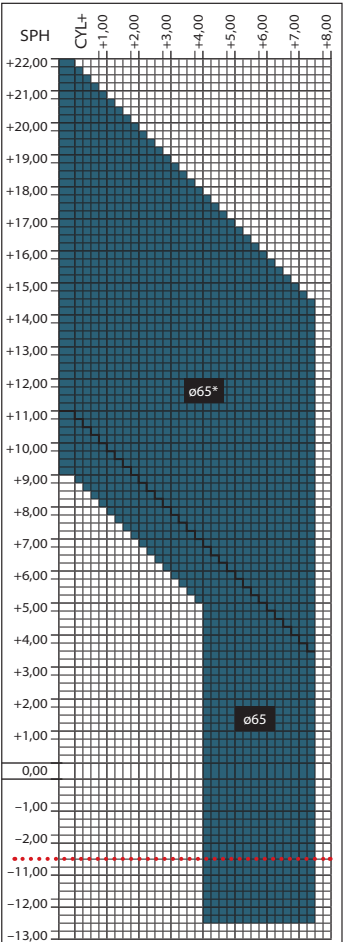


Диапазон производства

ø65: +22,00* ► – 12,50
cyl ≤ +7,50

* Выше +11,00 D линзы имеют
лентикулярную поверхность.

HILUX 1.50

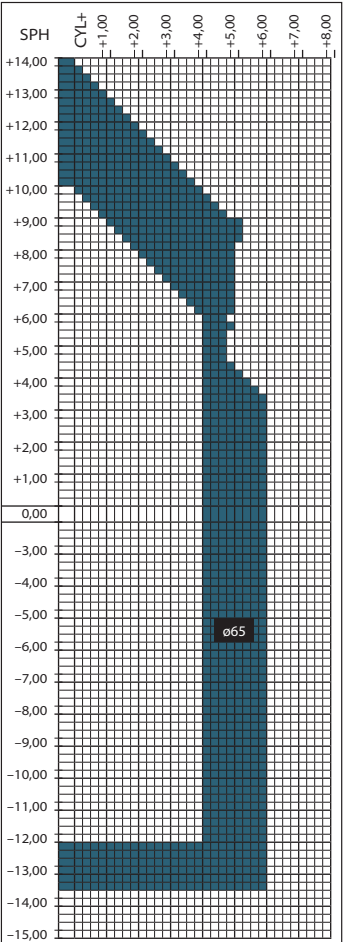


Диапазон производства

ø65: +14,00 ► – 11,50
cyl ≤ +6,00



Внимание! Диапазоны производства указаны справочно. При заказе свяжитесь с представителем компании НОУА и уточните возможности производства.

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

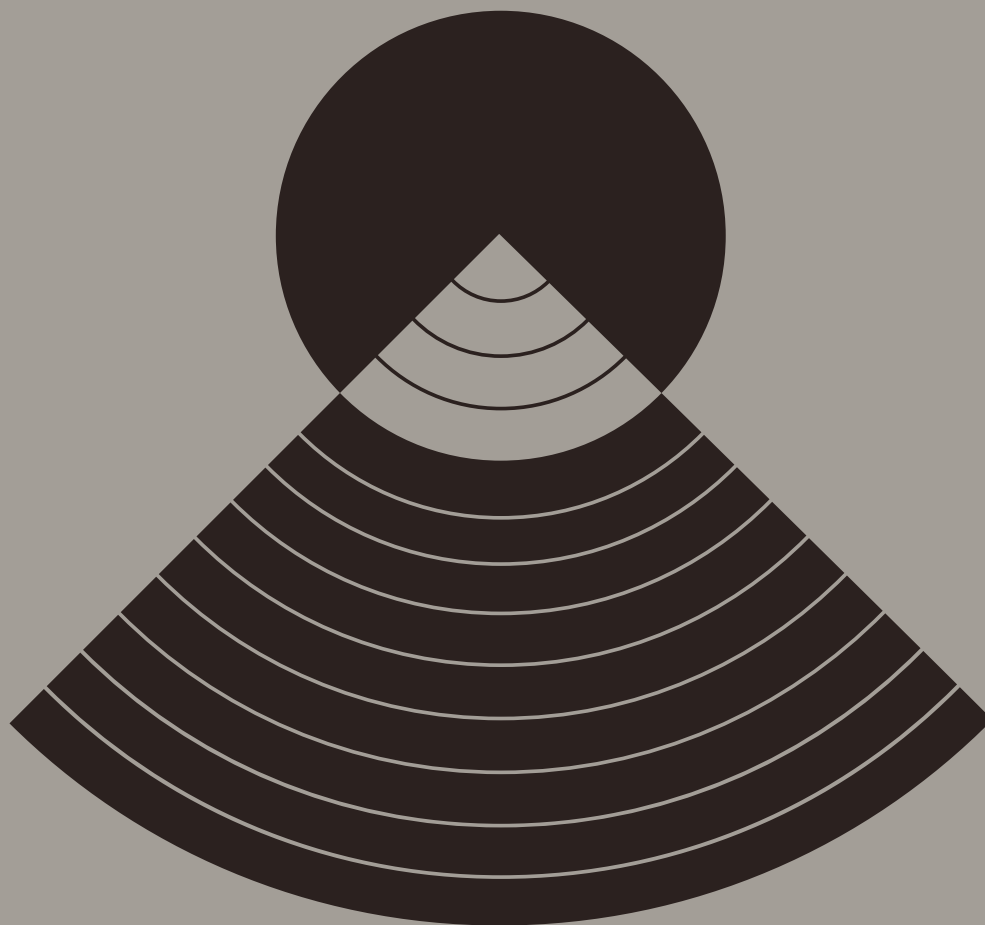


HOYA

Особенности

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Сравнение линз для дома и офиса

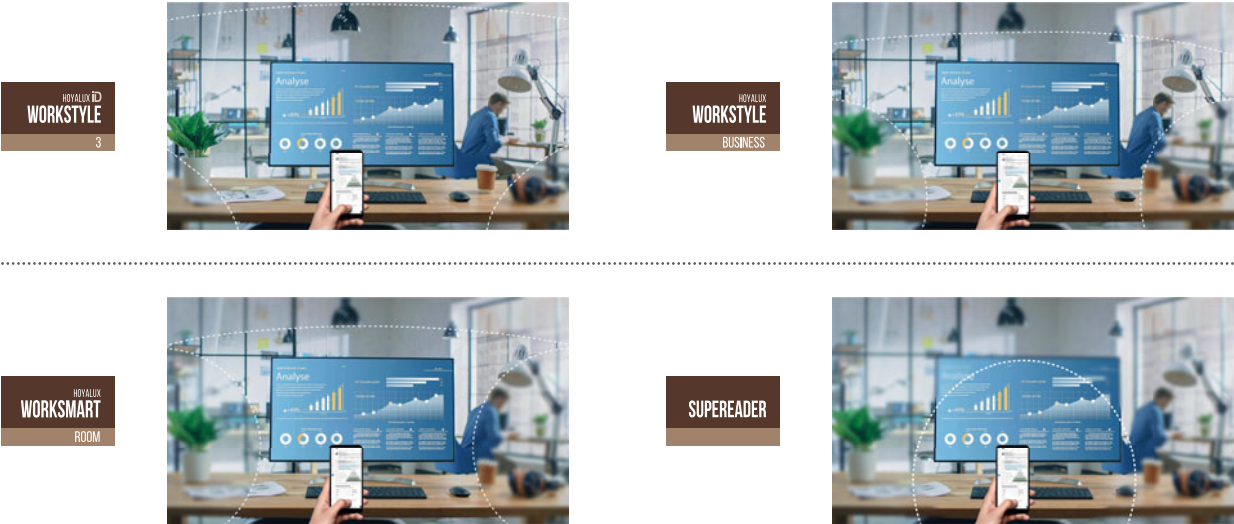

РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ



Hoyalux ID WorkStyle 3	Space	до 6 м
	Screen	до 2 м
	Close	до 1 м
Hoyalux WorkStyle Business	400	до 4 м
	200	до 2 м
Hoyalux WorkSmart Room	400	до 4 м
	200	до 2 м
SUPEREADER	B	до 1,2 м
	A	до 0,6 м

Технология	Преимущества	Hoyalux ID WorkStyle 3	Hoyalux WorkStyle Business	Hoyalux WorkSmart Room	SUPEREADER
Технология легкой адаптации AdaptEase	Широкие поля зрения на любом расстоянии, оптимизированная средняя зона для комфортного использования цифровых устройств, быстрая адаптация	●			
3D Бинокулярное зрение	Уменьшение периферических искажений, улучшенное переключение взгляда во время активной деятельности даже при использовании цифровых устройств	●			
HOYA iDentifier	Инструмент HOYA для консультаций, гарантирующий индивидуализацию линз в соответствии с потребностями каждого пользователя	●			
Технология бинокулярной гармонизации	Улучшает восприятие глубины изображения, повышает качество зрения при различной коррекции для правого и левого глаза	●			
Учет параметров ношения	Повышенный зрительный комфорт и улучшенные поля зрения	●			
Бинокулярная модель зрения	Отличная бинокулярная производительность в динамичном цифровом мире	●	●		
Двойной интегрированный дизайн	Минимизирует зрительные искажения и уменьшает амплитуду движений глаз	●	●		
Технология расширения полей зрения	Широкие и четкие поля зрения на всех расстояниях	●	●		
Технология стабилизации изображения	Повышение ощущения безопасности во время движения	●	●	●	
Быстрая фокусировка	Обеспечивает естественное положение головы и уменьшение амплитуды вращения глаз при работе на близком расстоянии	●	●	●	●


Установка и заказ

линзы для дома и офиса


Установка



- Установочный центр совместить с размеченным центром зрачка**
- Горизонтально – в соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль в естественном положении головы и тела.
 - Вертикально – в соответствии с центром зрачка при взгляде вдаль в естественном положении головы и тела.

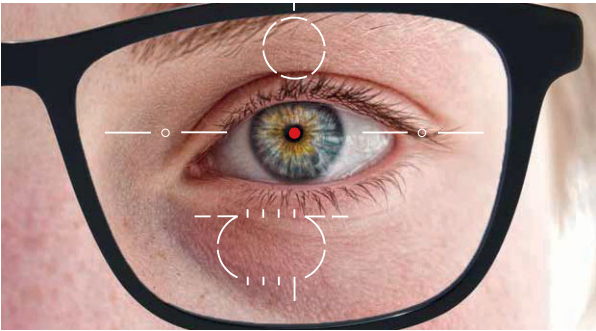

- Установочный центр совместить с контрольной точкой**
- Горизонтально – в соответствии с монокулярным межзрачковым расстоянием для близи.
 - Вертикально – по нижней границе зрачка или нижнего века (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении).

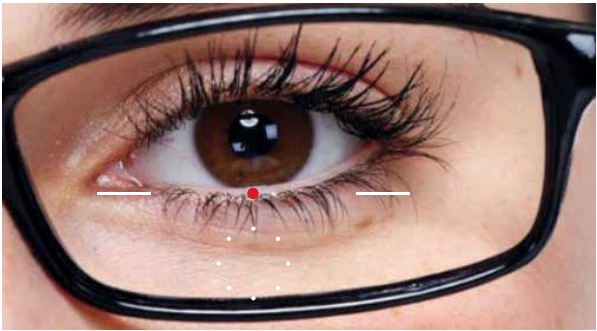

Заказ

Название	Дизайн или тип	Длина коридора прогрессии	Рецепт для дали и аддидация	Значение коррекции для близи	Параметры оправы, METS
Hoyalux iD WorkStyle 3	Space / Screen / Close	Переменная	Необходимо	–	Необходимо
Hoyalux WorkStyle Business	400 / 200	Переменная	Необходимо	–	Необходимо
Hoyalux WorkSmart Room	400 / 200	Финсированная	Необходимо	–	Необходимо
SUPEREADER	A / B	–	–	Необходимо	Рекомендуется

Параметры заказа	Межцентровое расстояние (PD)	Установочная высота (EP)	Вертексное расстояние (FCD)	Пантоскопический угол (WPA)	Угол изгиба оправы (FFFA)	iDentifier
Hoyalux iD WorkStyle 3	Необходимо	Необходимо	Необходимо	Необходимо	Необходимо	Рекомендуется
Hoyalux WorkStyle Business	Необходимо	Необходимо	–	–	–	–
Hoyalux WorkSmart Room	Необходимо	Необходимо	–	–	–	–
SUPEREADER	Рекомендуется (для близи)	Рекомендуется	–	–	–	–



Индивидуальные линзы для дома и офиса

- 3 индивидуальных варианта дизайна, основанных на разных зрительных предпочтениях.
- Расстояние обзора до 6 м.
- Быстрый и плавный переход от зоны для дали к зоне для близи

HOYA

Hoyalux iD WorkStyle 3

ПЕРВЫЙ КЛАСС

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

24 мм | 23 мм | 22 мм | 21 мм



- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.
- Комфорт использования благодаря высокому уровню персонализации.
- Легкая адаптация.



BINOCLULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от Технологии бинокулярной гармонизации (Binocular Harmonization Technology).



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
24 мм	14 мм	18 мм	32 мм
23 мм	14 мм	17 мм	31 мм
22 мм	13 мм	17 мм	30 мм
21 мм	13 мм	16 мм	29 мм
20 мм	12 мм	16 мм	28 мм
19 мм	12 мм	15 мм	27 мм
18 мм	11 мм	15 мм	26 мм

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать дизайн, длину коридора прогрессии, предоставить рецепт для дали, значение аддидации, а также вертексное расстояние (FCD), пантоскопический угол (WPA) и угол изгиба оправы (FFFA).

Характеристики

Эксклюзивные линзы для работы в помещении, учитывающие индивидуальные параметры и обеспечивающие непревзойденную бинокулярную эффективность, доступны в трех дизайнах:

Space (P) Идеально подходит для людей, которые работают в офисе или выступают перед аудиторией, а также для тех, кому необходимо фокусировать зрение дальше экрана компьютера – четкое зрение до 6 м и четкое изображение на экране.

Screen (S) Лучший выбор, когда требуются глубина и широкое поле зрения вблизи и на небольших средних расстояниях с возможностью видеть до 2 м.

Close (C) Максимально широкое поле зрения вблизи при сохранении четкого зрения вблизи на расстоянии до 1 м. Идеально подходит для хобби и профессий, требующих высокого уровня концентрации вблизи и смены фокусировки зрения в небольшом диапазоне рабочих расстояний.

Материалы и свойства

- РЕКОМЕНДАЦИИ**
- Используйте iDentifier для определения оптимального индивидуального дизайна.
 - Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.
 - METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

20 мм19 мм18 мм

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
1.74	1.67	1.60	1.53	1.50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Close Screen Space	W3VC W3VS W3VP	W3YC W3YS W3YP	W36C W36S W36P	W3XC W3XS W3XP	W35C W35S W35P
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + S2B/S2G/S2N				
			+ []	+ []	+ []	+ []	
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO		[]	[]	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]	[]	[]	[]	[]***
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.


** Sensity 2 Blue – скоро в продаже.

*** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



18-24 мм EYVIA 1.74
(только бесцветные)

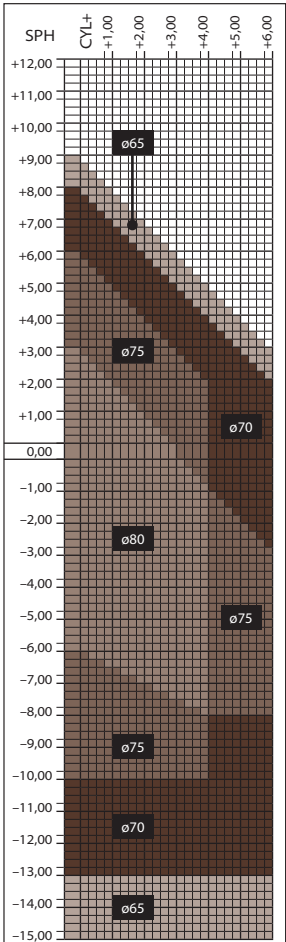


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
- ø65: +9,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм EYNOA 1.67

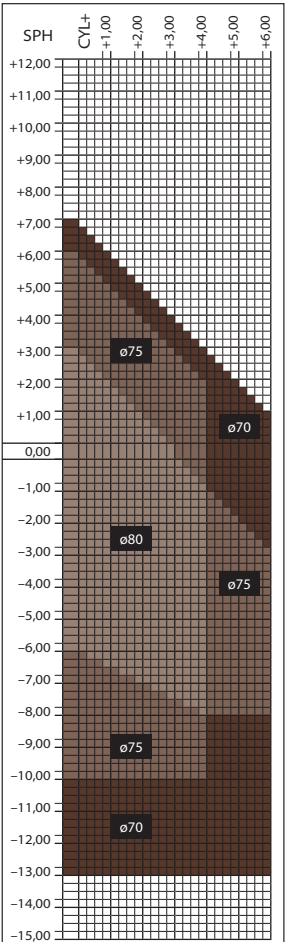


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +7,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм EYAS 2.0 1.60

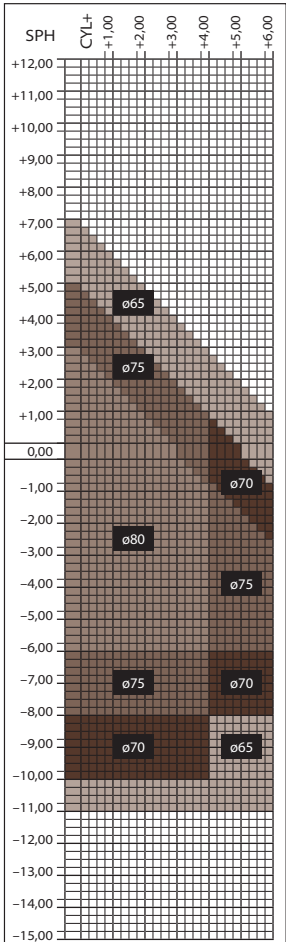


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
- ø65: +7,00 ► -11,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм

PNX 1.53

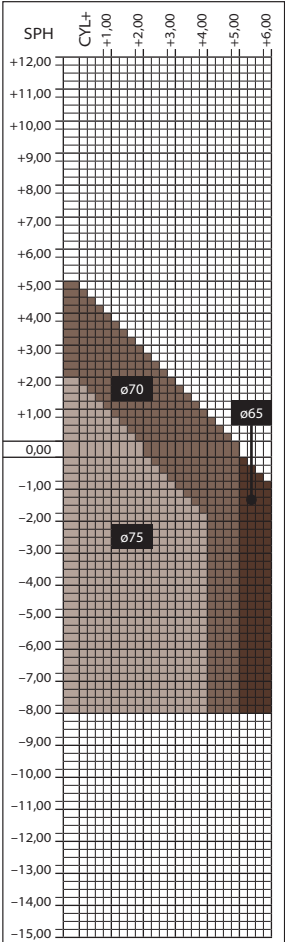


Диапазон производства

- ø75: +2,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 5,00
- ø65: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм

ПОЛИМЕР 1.50

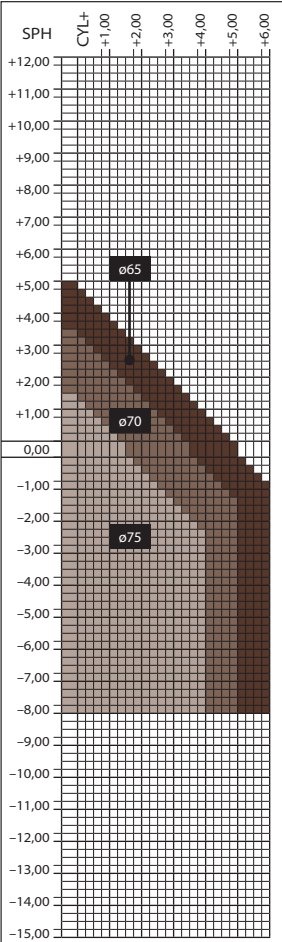

Диапазон производства

- ø75: +1,50 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +3,50 ► -8,00 cyl ≤ 5,00
- ø65: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса бизнес-класса.
- Расстояние обзора – до 4 м.
- Оптимальное решение для ближних и средних расстояний обзора

HOYA


ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

23 мм

20 мм




- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.

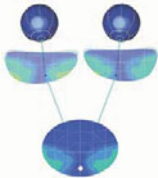

Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от Технологии расширения полей зрения (View Xpansion Technology).

Гарантии

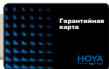

Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
23 мм	14 мм	17 мм	31 мм
20 мм	12 мм	16 мм	28 мм

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать тип линз, длину коридора прогрессии, предоставить рецепт для дали и значение аддидации.

Характеристики

Новые модернизированные офисные линзы с предварительно рассчитанным дизайном доступны в двух вариантах:

400. Оптимальное решение для тех, кому во время работы необходимо часто переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Обеспечивают широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях (до 4 м).

200. Обеспечивают широкое поле зрения вблизи и на среднем расстоянии до 2 м. Идеально подходят для чтения, работы на компьютере или использования нескольких цифровых устройств.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.
- METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса с двусторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Hoyalux WorkStyle Business 400/200

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



 3D Freeform Design Technology		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	400 200	WB4V WB2V	WB4Y WB2Y	WB46 WB26	WB4X WB2X	WB45 WB25
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ (HVSP)					
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180						**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



23/20 мм EYVIA 1.74

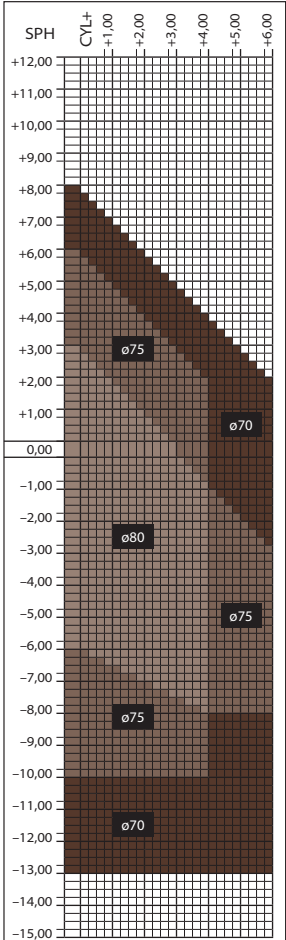


Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм EYNOA 1.67

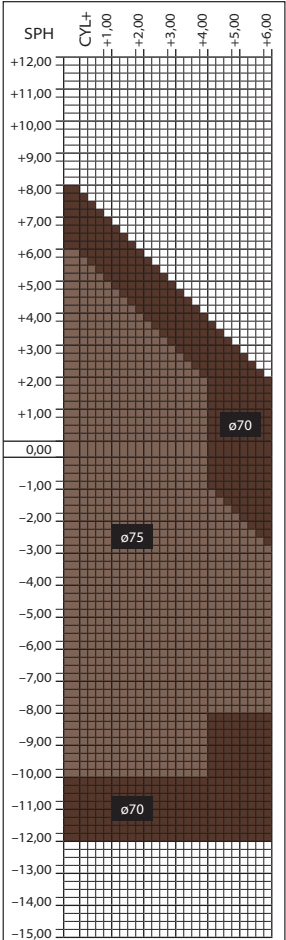


Диапазон производства

ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -12,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм EYAS 2.0 1.60

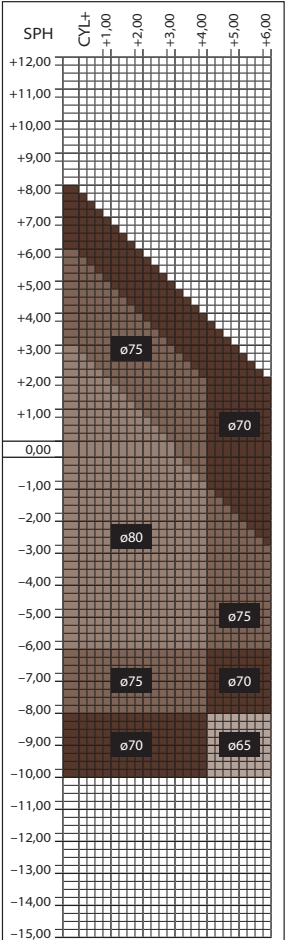


Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
ø65: +8,00 ► -10,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм PNX 1.53

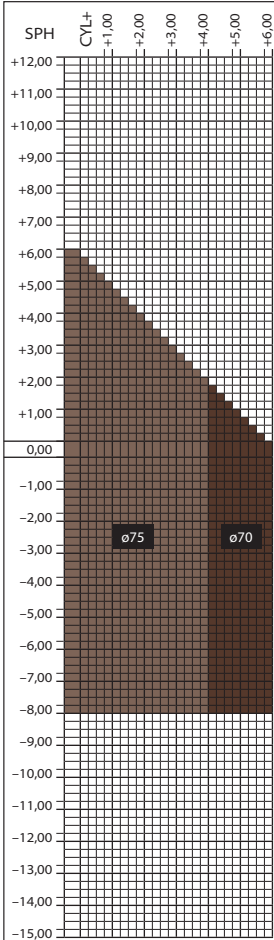


Диапазон производства

075: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация 400: 0,75–3,50.
Аббация 200: 1,25–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм ПОЛИМЕР 1.50

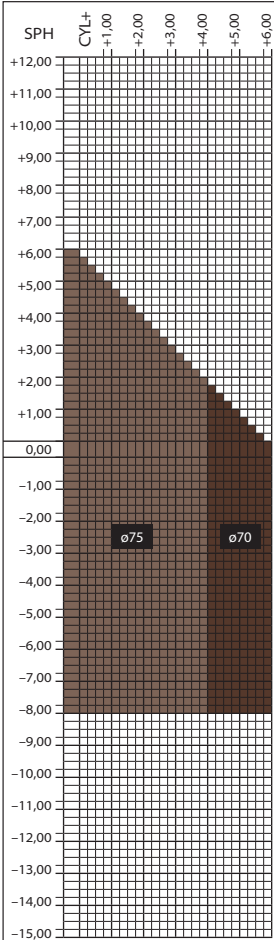

Диапазон производства

075: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация 400: 0,75–3,50.
Аббация 200: 1,25–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

Для заметок

Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса экономкласса.
- Обзор до 4 м.
- Хорошо подходят для работы на ближних и средних расстояниях.

HOYA




- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.

Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от технологии уменьшения искажений и плавающего эффекта при движении.

Гарантии

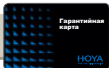

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryō, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
23,5 мм	14 мм	18 мм	32 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.
- METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать тип линз, предоставить рецепт для дали и значение аддидации.

Характеристики

Линзы для работы, дающие ощущение повышенной стабильности, доступны в двух вариантах:

400. Оптимальное решение для тех, кому во время работы необходимо часто переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Обеспечивают широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях (до 4 м).

200. Обеспечивают широкое поле зрения вблизи и на среднем расстоянии до 2 м. Идеально подходят для чтения, работы на компьютере или использования нескольких цифровых устройств в офисе.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число А66е	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Hoyalux WorkSmart Room 400/200

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР	
		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	400 200	WR4V WR2V	WR4Y WR2Y	WR46 WR26	WR4X WR2X	WR45 WR25
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION	КОД ЛИНЗЫ (HVSP)					
	SUN PRO	[]	[]	[]	[]	[]	
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	[]**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	




* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



23,5 mm EYVIA 1.74

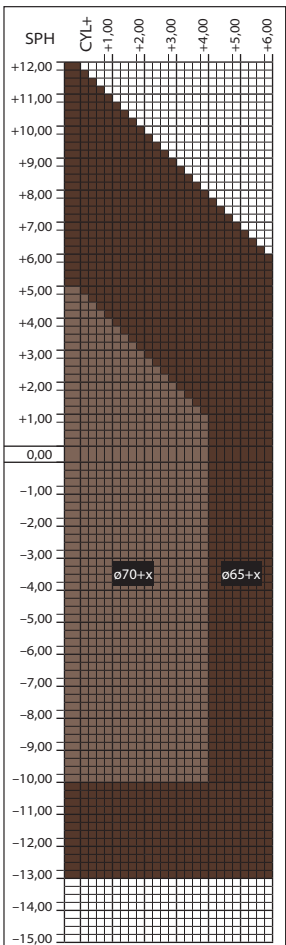


Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +12,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децетрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 mm EYNOA 1.67

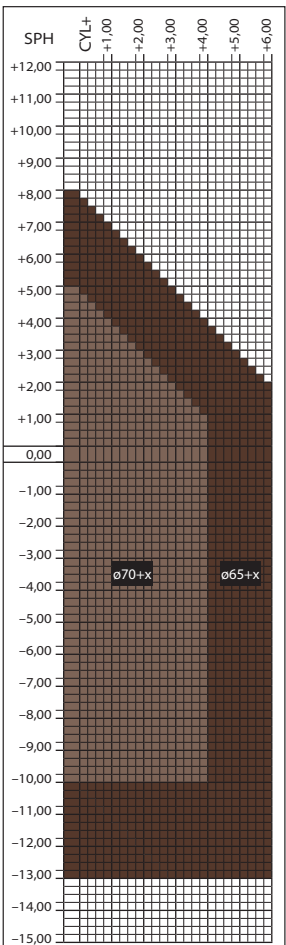


Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децетрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 mm EYAS 2.0 1.60

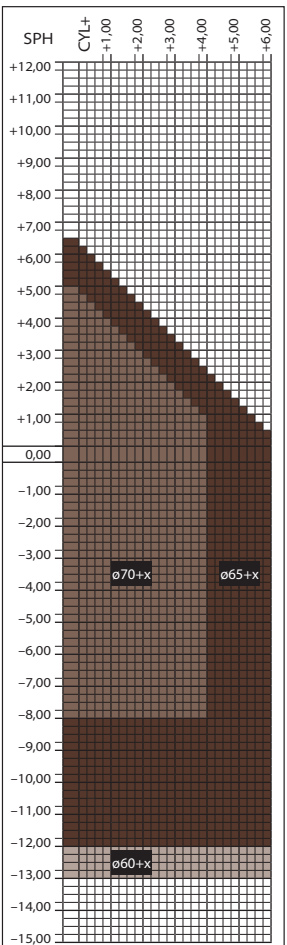

Диапазон производства


ø70+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +6,50 ► -12,00 cyl ≤6,00
ø60+x: +6,50 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децетрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 мм

PNX 1.53

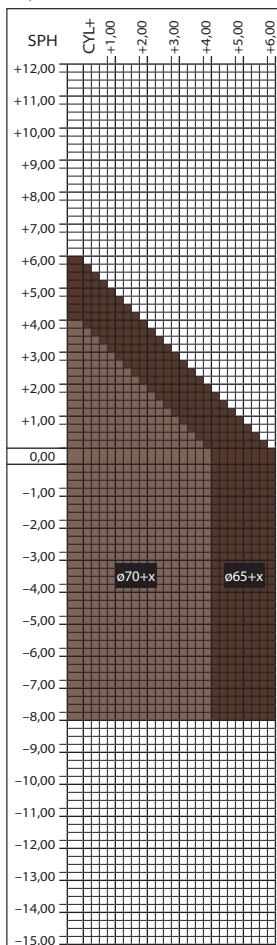**Диапазон производства**

ø70+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00

ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация 400: 0,75–3,50.


Аббация 200: 1,25–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 мм

ПОЛИМЕР 1.50

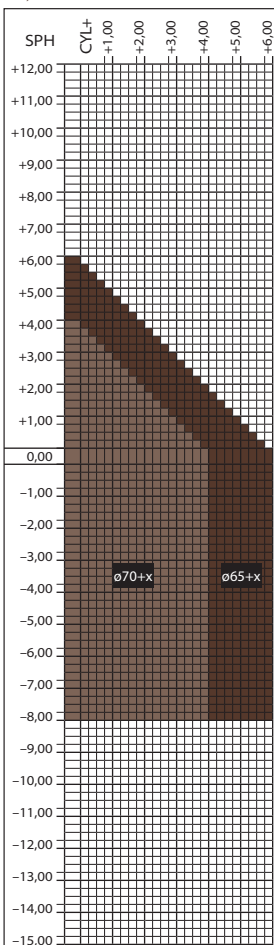**Диапазон производства**

ø70+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00

ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббация 400: 0,75–3,50.

Аббация 200: 1,25–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

Для заметок

Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса с двумя вариантами дегрессии.
- Обзор до 1,2 м.
- Хорошо подходят для работы на ближних расстояниях.

HOYA

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SUPERREADER

- Бóльшая глубина зрения по сравнению с обычными очками для чтения.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Естественное положение головы с меньшим поворотом глаз при работе на близком расстоянии.

Установка

Горизонтально. В соответствии с монокулярным межзрачковым расстоянием для близи.

Вертикально. по нижней границе зрачка или по нижнему веку (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении).

Заказ

Укажите диаметр в соответствии с монокулярным PD для близи и значение коррекции для близи.

Характеристики

ТИП А
Линзы с депрессией ~0,75 дптр.

- Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
- Комфорт при чтении и использовании цифровых устройств.

Тип В
Линзы с депрессией ~1,50 дптр.

- Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
- Естественное положение головы при работе за компьютером.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Показанные установочные параметры являются минимальными, поэтому при определении размера В для заказа добавляйте дополнительно 4 мм вверх и вниз к минимальным параметрам для более удобного ношения очков.


Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с депрессией для дома и офиса		
Технология	FreeForm		
Материал	Еуноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	41	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	340/400
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	не рекомендуется

Гарантии

Гарантии на покрытия
 G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
 G3: 1 год гарантии.

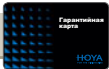

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

		SUPEREADER A/B EYNOA 1.67		SUPEREADER A/B EYAS 2.0 1.60		SUPEREADER A/B 1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	A B		SRAY SRBY	SRA6 SRB6		SRA5 SRB5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G4	G3+G4		G4
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]		[]*
HVLL BlueControl (BLC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]		[]	
HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]		[]	
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ (HVSP)				
			[]	[]		[]	
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]	[]		[]**	
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	




* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



EYNOA 1.67

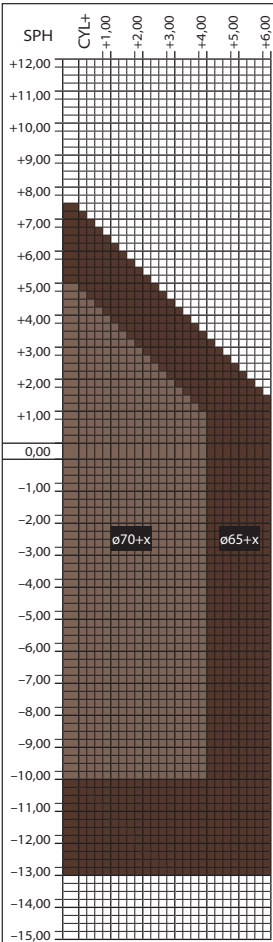


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
065+x: +7,50 ► -13,00 cyl ≤6,00

Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

EYAS 2.0 1.60

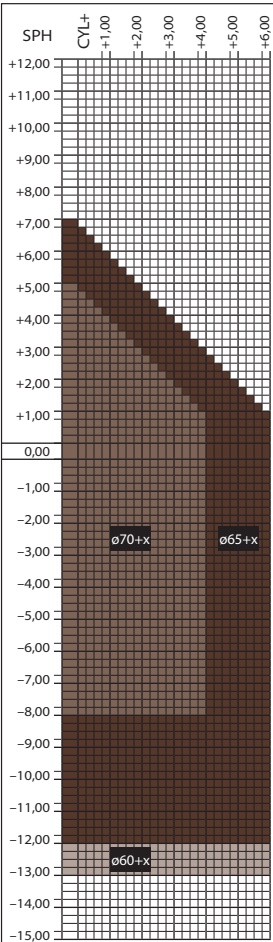


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
065+x: +7,00 ► -12,00 cyl ≤6,00
060+x: +7,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

ПОЛИМЕР 1.50

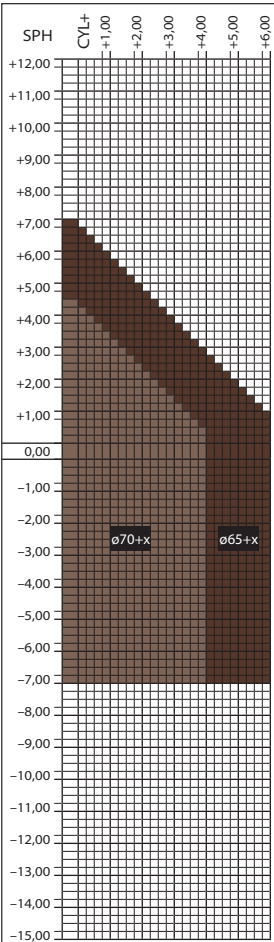

Диапазон производства

070+x: +4,50 ► -7,00 cyl ≤4,00
065+x: +7,00 ► -7,00 cyl ≤6,00

Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Прогрессивные
линзы

HOYA

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Линзы Hoyalux

Линзы Hoyalux iD

Технологии	Особенности	Преимущества	Линзы Hoyalux			Линзы Hoyalux iD		
			AMPLITUDE PLUS	DAYNOMIC	BALANIS	LIFESTYLE 4	MYSELF PROFILE	MYSELF HOTALUX
Двойной интегрированный прогрессивный дизайн	Вертикальный компонент прогрессии располагается на передней поверхности линзы, а горизонтальный – на задней поверхности	Ускоряет переход от дали к зоне для близи, расширяет поля четкого зрения и уменьшает плавающий эффект						
Выбор коридора прогрессии	Позволяет изготовить линзу с разными коридорами прогрессии	Возможность выбрать подходящий коридор прогрессии под оправу, а также учесть физиологические особенности клиента						
Технология расширения полей зрения	Учет закона Листинга при формировании дизайна линзы	Корректировка ошибок рефракции по периферии (астигматические аберрации) для расширения полей зрения						
Стабилизация изображения	Выравнивает направление нежелательного периферического астигматизма	Стабилизирует изображение при движении и уменьшает плавающий эффект						
Автонастройка	Устраняет индуцированный эффект призмы в случае косого астигматизма	Расширяет поля четкого зрения на всех расстояниях в случае астигматизма с косыми осями						
Учет параметров посадки оправы	Учет в дизайне линз параметров ношения оправы (РЦ, уст. высоты, вертексн. расстояния, пантоскоп. угла и угла изгиба оправы)	Повышенный зрительный комфорт и улучшенные поля зрения						
Оптимизация инсета	Формирование инсета с учетом рабочего расстояния для близи или инсет может быть задан в мм вручную	Расширяет поля зрения на средних расстояниях и вблизи						
Индивидуализация с учетом стиля жизни	Учет в дизайне линзы персональной зрительной активности	Создает более широкие поля зрения в областях линзы, важных для клиента						
Бинокулярная модель зрения	Эта программа анализирует, как глаза будут работать вместе при взгляде через линзы в любом направлении взгляда	Позволяет понять, что необходимо модифицировать в дизайне линз для получения максимально возможных полей зрения для двух глаз						
Технология бинокулярной гармонизации	Независимый расчет дизайна между правой и левой линзами, гармонизация аддидации справа и слева при анизометропии	Улучшает зрение вблизи как по четкости, так и по ощущениям плавающего эффекта, при наличии разницы рефракции правого и левого глаза						
HOYA iDentifier	Дизайн формируется на основе предпочтений в образе жизни, параметров посадки оправы, рецепта и истории ношения очков	Создает максимально возможные поля зрения в каждом случае						
3D Бинокулярное зрение	Контроль над нежелательным призматическим эффектом по периферии линзы	Уменьшение искажений в области периферийного зрения и отсутствие плавающего эффекта при движении взгляда в любом направлении						
Технология легкой адаптации	Оптимизация ширины полей зрения вблизи и на среднем расстоянии, не влияющая на качество зрения вдаль	Легкая адаптация к линзам, расширение полей зрения вблизи и на среднем расстоянии для комфортной работы с цифровыми устройствами						



Лучшие прогрессивные линзы в портфолио компании HOYA

- Полностью индивидуальное решение.
- Легкий переход взгляда, а также уменьшение движений головой и глазами.
- Несравненная глубина полей зрения.
- Стабильное зрение с минимальными искажениями для работы на любых расстояниях, включая работу с цифровыми устройствами.

HOYA

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм | 15 мм | 14 мм | 13 мм | 12 мм | 11 мм



Еще больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях.
- Отличное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с анизометропией благодаря применению технологии 3D Бинокулярного зрения и Технологии бинокулярной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль.



Мин. установочная высота

Hoyalux iD MySelf		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Гарантия полного удовлетворения
Гарантия 100 % удовлетворения линзами Hoyalux iD MySelf (iDG).

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM




		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MV	MY	M6	MX	M5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+iDG	G2+G4+iDG	G2+G3+G4+iDG	G2+G3+G4+iDG	G2+G4+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISIONSUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYAMIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
	MIRROR Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]	[]	[]	**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА


16/15/14/13 мм EYVIA 1.74
кроме Sensity

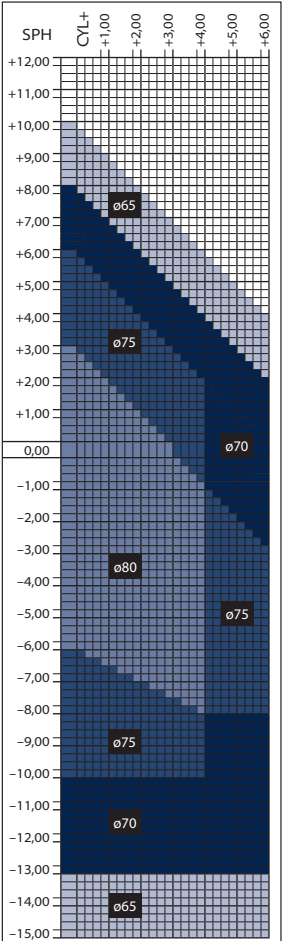

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


12/11 мм EYVIA 1.74
кроме Sensity

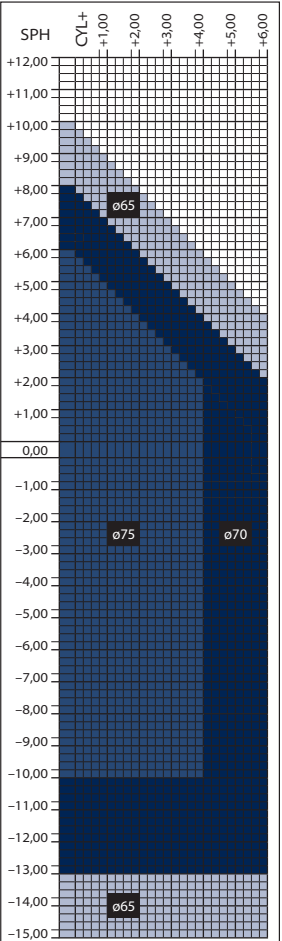

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


16/15/14/13 мм EYNOA 1.67

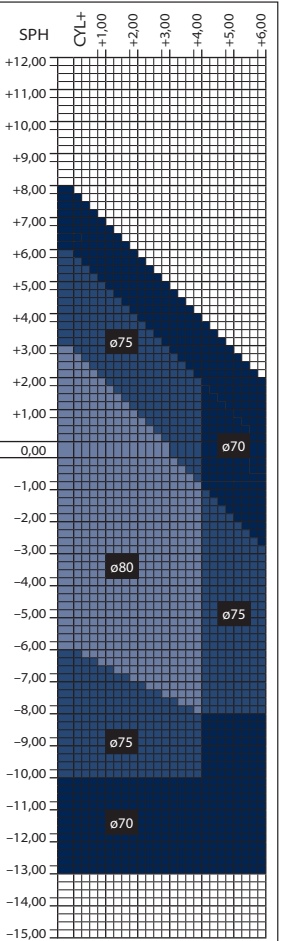

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

12/11 мм EYNOA 1.67

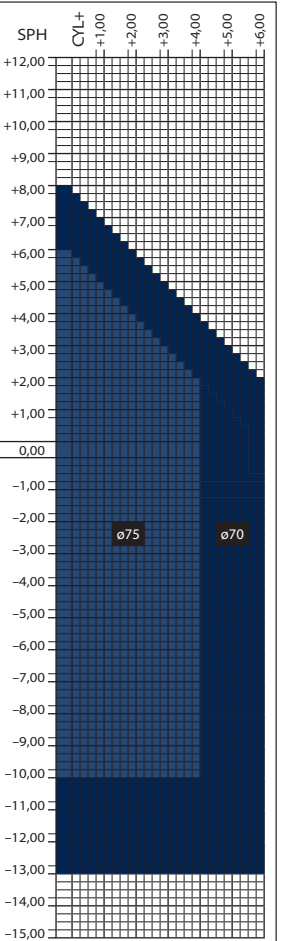


Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60

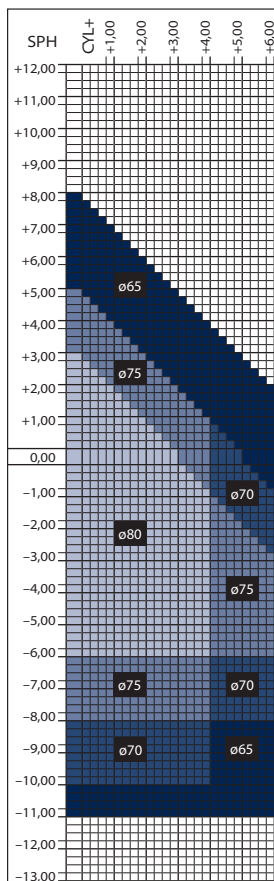


Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60

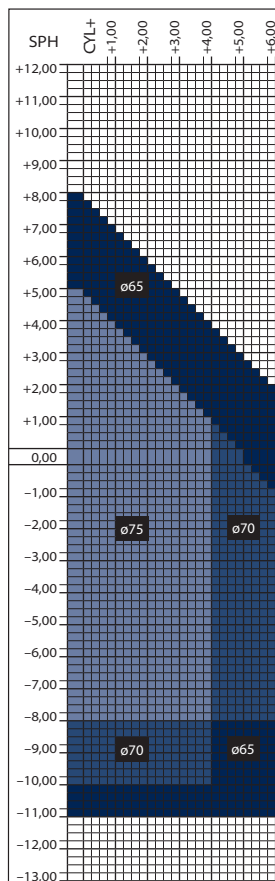


Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53

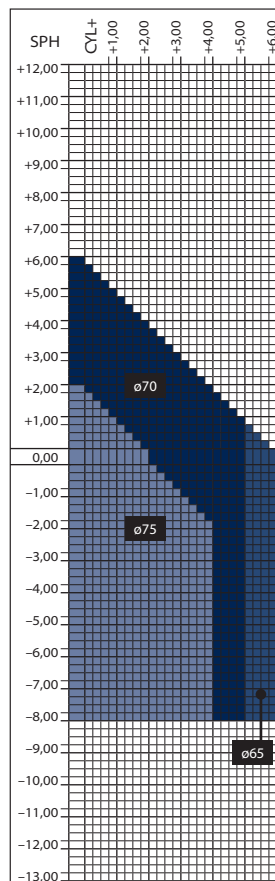


Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм 1.50

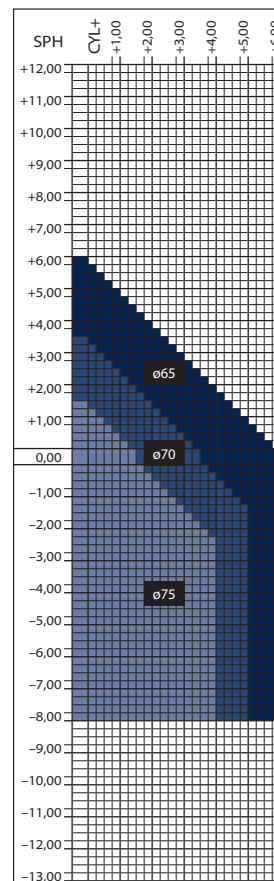

Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

Для заметок

Ваше зрение, ваш мир

- Премиальные персонифицированные линзы первого класса от HOYA.
- Ваш взгляд на мир уникален, как и ваши линзы.

HOYA

Hoyalux iD MySelf Profile

ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм15 мм14 мм13 мм12 мм11 мм



Hoyalux iD MySelf Profile – это персонализированные прогрессивные линзы, доступные в 5 вариантах дизайна, в сочетании с самыми совершенными технологиями HOYA. Пользователи очков смогут получить комфортное зрение при переводе взгляда на различные расстояния как при использовании цифровых устройств, так и в движении.

- Автоматическая децентрация для рецептов с призматической коррекцией для каждого варианта дизайна.



Варианты дизайнов

- Modern**
Плавный переход при переводе взгляда от ближних расстояний к дальним. Рекомендован для первичных пользователей прогрессивных линз для легкой адаптации.
- Adventure**
Оптимизированная зона для дали с широкими полями зрения, рекомендуется для пользователей, проводящих много времени на открытом воздухе.
- Stable**
Сбалансированный дизайн для отличного качества зрения на всех расстояниях.

- Detail**
Дизайн в высшей степени рекомендован для тех видов деятельности, где наиболее востребовано зрение вблизи и на средних расстояниях.
- Expert**
Широкие поля зрения вблизи и вдали для опытных пользователей прогрессивных линз.

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84% Зеленый 7 ► 86% Серый 7 ► 88% Синий* 7 ► 85% ^{**}
		Абсолютно прозрачные в помещении. Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.

* Скоро в продаже.
^{**} При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

- Гарантии на покрытия**
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.
- Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eуas 2.0 1.60**
G3: 1 год гарантии.
- Гарантия адаптации**
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.
- Гарантия полного удовлетворения**
Гарантия 100% удовлетворения линзами Hoyalux iD MySelf Profile (iDG).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Мин. установочная высота

Hoyalux iD MySelf Profile		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eуnoa 1.67	Eуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	реком.	идеально	идеально	реком.	не подходит
Для полубоковых оправ	реком.	идеально	идеально	реком.	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM




БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MPV +S/D/A/E/M	MPY +S/D/A/E/M	MP6 +S/D/A/E/M	MPX +S/D/A/E/M	MP5 +S/D/A/E/M
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+iDG	G2+G4+iDG	G2+G3+G4+iDG	G2+G3+G4+iDG	G2+G4+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]*
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	SENSITY DARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
	SENSITY SHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
	HOYA MIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
	MIRROR Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	[]**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
 ** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА


16/15/14/13 мм EYVIA 1.74
кроме Sensity

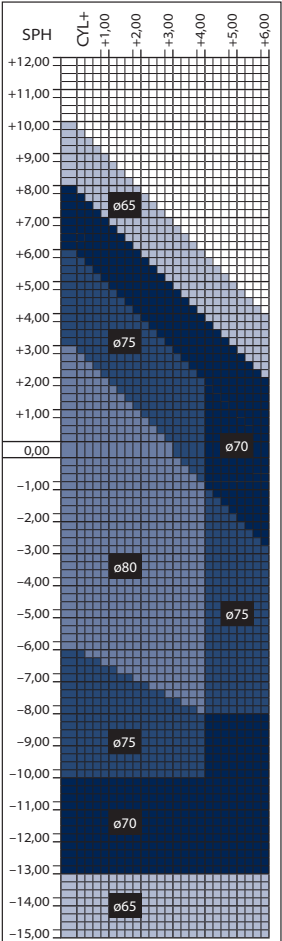

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


12/11 мм EYVIA 1.74
кроме Sensity

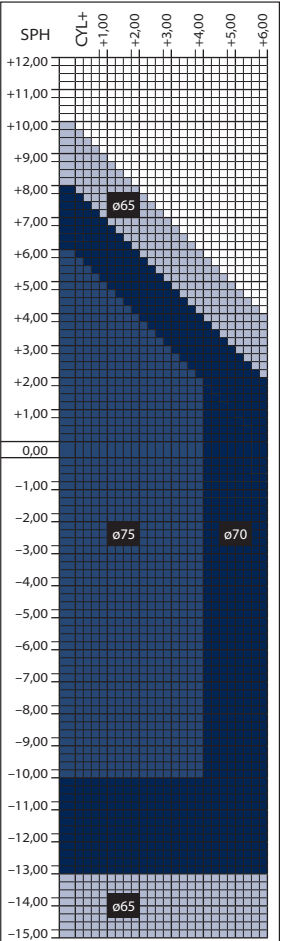

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


16/15/14/13 мм EYNOA 1.67

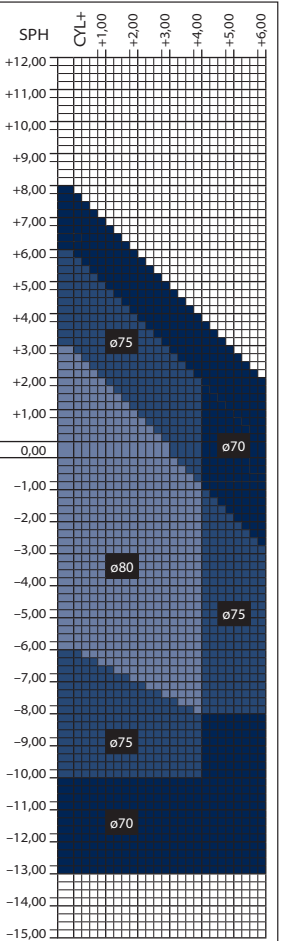

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

12/11 мм EYNOA 1.67

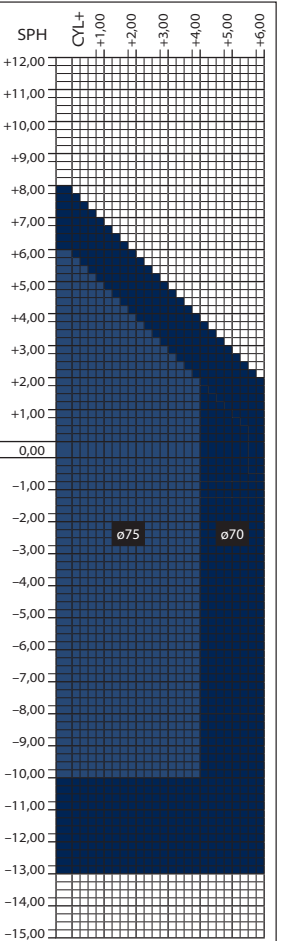


Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
Аббация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60

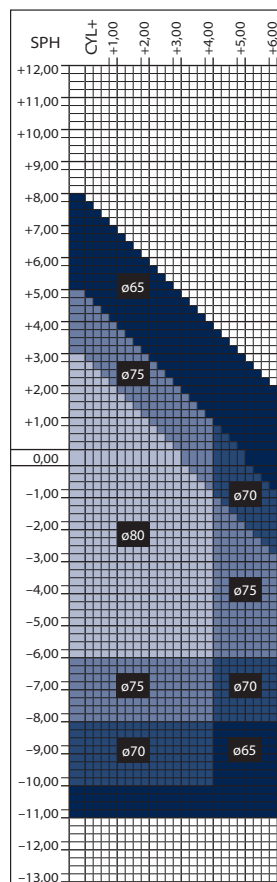


Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

12/11 мм

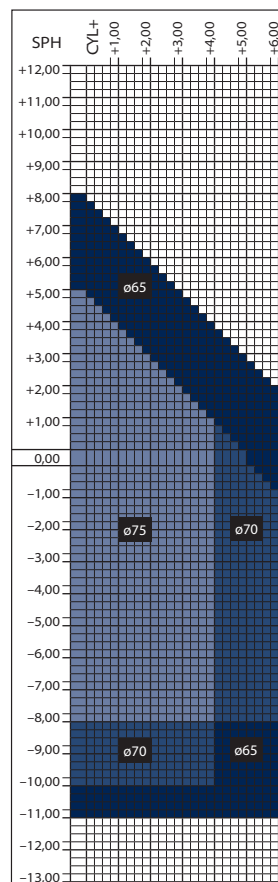


Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

EYAS 2.0 1.60

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53

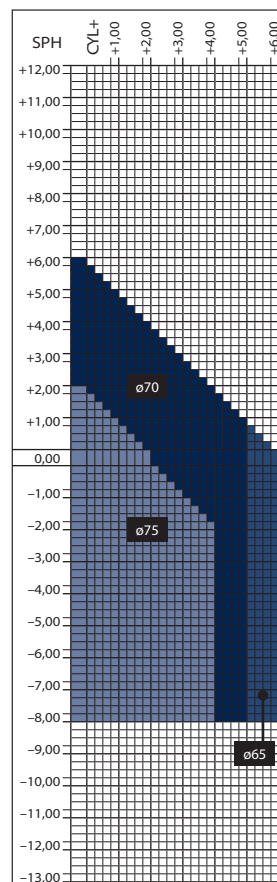


Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм 1.50

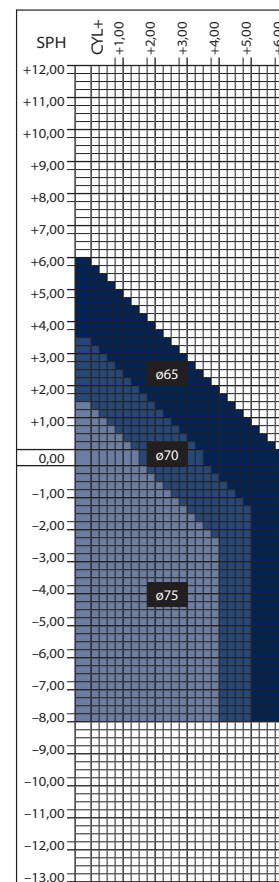

Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

Для заметок



Легко назначать, легко носить

- Прогрессивные линзы первого класса.
- 3 варианта дизайна для соответствия стилю жизни пользователя.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.

HOYA

Hoyalux iD LifeStyle 4i

ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм

15 мм

14 мм

13 мм

12 мм

11 мм

iD
LIFESTYLE


4i

- Премиальные прогрессивные линзы, учитывающие индивидуальные параметры посадки оправы. Созданы с использованием технологии 3D Биноклярное зрение для улучшенного зрительного комфорта благодаря более стабильному зрению в ближней и средней зонах, Технологии биноклярной гармонизации для точной и легкой фокусировки и Биноклярной модели зрения для контроля согласованности работы глаз.
- 3 варианта дизайна (Indoor, Urban, Outdoor) для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.


Мин. установочная высота

Hoyalux iD LifeStyle 4i		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

iD LifeStyle 4i 16 мм LSI67/LSI65/LSI63/LSI6X/LSI6I
iD LifeStyle 4i 15 мм LSI57/LSI55/LSI53/LSI5X/LSI5I
iD LifeStyle 4i 14 мм LSI47/LSI45/LSI43/LSI4X/LSI4I
iD LifeStyle 4i 13 мм LSI37/LSI35/LSI33/LSI3X/LSI3I

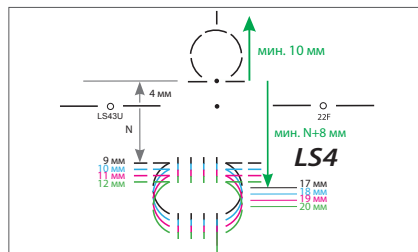

iD LifeStyle 4i 12 мм LSI27/LSI25/LSI23/LSI2X/LSI2I
iD LifeStyle 4i 11 мм LSI17/LSI15/LSI13/LSI1X/LSI1I

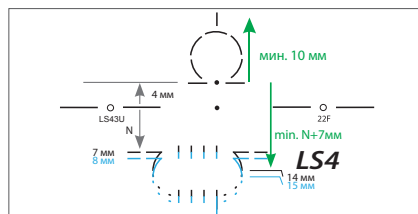

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SILVER		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR	Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.	
POLARIZED	Линзы Hoyalux iD LifeStyle 4i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».	

* Скоро в продаже.

** При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	подходит	подходит	реком.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	подходит	подходит	реком.	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		Outdoor Urban Indoor	4XOV 4XUV 4XIV	4XOY 4XUY 4XIY	4XOE 4XUE 4XIE	4XOX 4XUX 4XIX	4XOB 4XUB 4XIB
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]*
	HVLL BlueControl (BLC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ				12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2		ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
					+[]		+[]	
	SENSITY DARK		ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ					+[]		+[]	
	SENSITY SHINE		ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
					+[]		[]	
	HI-VISION SUN PRO				КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]		[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR		Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
					[]		[]	
			Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
					[]		[]	
	COLOURS		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]	[]	[]	[]**
HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	




* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
 ** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16-11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

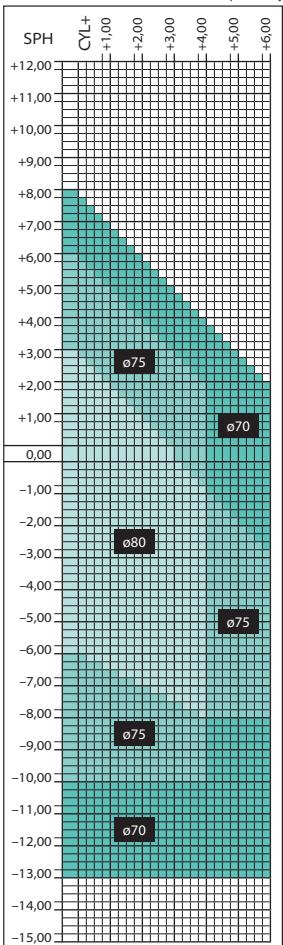


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: -1,25 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аббация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16-11 мм

EYNOA 1.67

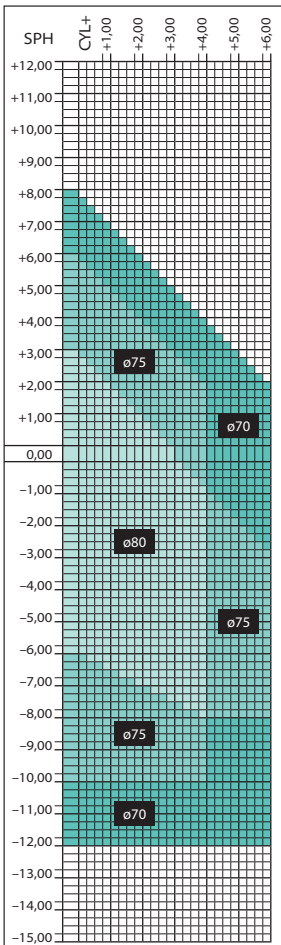


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: -1,25 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► -12,00 cyl ≤ 6,00

Аббация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16-11 мм

EYAS 2.0 1.60

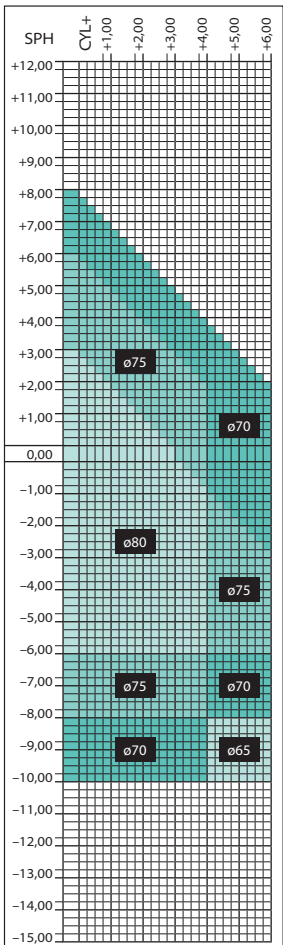

Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: -1,25 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø65: +8,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00

Аббация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


АДДИДАЦИЯ											
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

16-11 мм

PNX 1.53

16-11 мм


ПОЛИМЕР 1.50

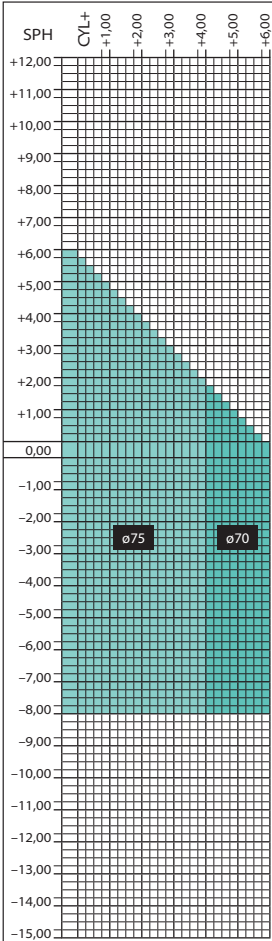

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤4,00
ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

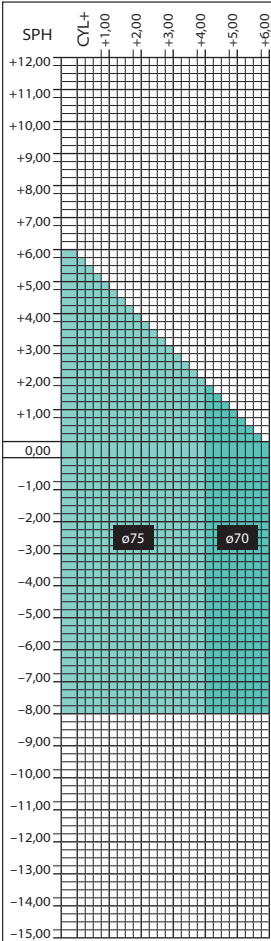

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤4,00
ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм15 мм14 мм13 мм12 мм11 мм




- Премиальные прогрессивные линзы, оптимизированные с использованием технологии 3D Бинокулярное зрение для улучшенного зрительного комфорта благодаря более стабильному зрению в ближней и средней зонах, Технологии бинокулярной гармонизации для точной и легкой фокусировки и Бинокулярной модели зрения для контроля согласованности работы глаз.
- 3 варианта дизайна (Indoor, Urban, Outdoor) для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.


Мин. установочная высота

Hoyalux iD LifeStyle 4		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

- iD LifeStyle 4 16 ммLS67/LS65/LS63/LS6X/LS61
- iD LifeStyle 4 15 ммLS57/LS55/LS53/LS5X/LS51
- iD LifeStyle 4 14 ммLS47/LS45/LS43/LS4X/LS41
- iD LifeStyle 4 13 ммLS37/LS35/LS33/LS3X/LS31

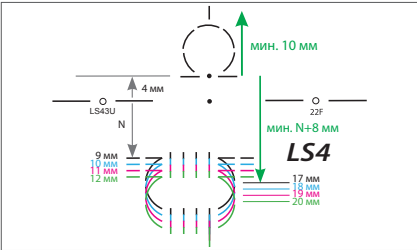

- iD LifeStyle 4 12 ммLS27/LS25/LS23/LS2X/LS21
- iD LifeStyle 4 11 ммLS17/LS15/LS13/LS1X/LS11

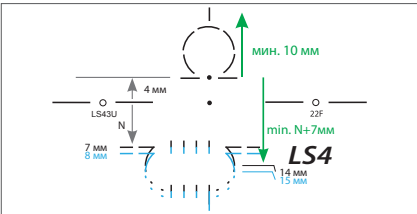


Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ▶ 84%** Зеленый 7 ▶ 86%** Серый 7 ▶ 88%** Синий* 7 ▶ 85%**
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
POLARIZED		Линзы Hoyalux iD LifeStyle 4 доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

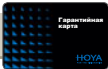

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	подходит	подходит	реком.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	подходит	подходит	реком.	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		Outdoor Urban Indoor	40V 4UV 4IV	40Y 4UY 4IY	406 4U6 4I6	40X 4UX 4IX	405 4U5 4I5		
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4		
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]	[]*	
	HVLL BlueControl (BLC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]	[]	
	HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]	[]	
	СРОК ПОСТАВКИ				12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней		
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	SENSITY 2		ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG					
					+ [] + [] + [] + []					
	SENSITY DARK		ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG					
					+ [] + [] + [] + []					
	SENSITY SHINE		ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS					
					+ [] [] + [] []					
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP							
			[] [] [] [] []							
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV							
			[] [] [] []							
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB							
			[] [] [] []							
	COLOURS		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[] [] [] [] []**					
HOYA iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.

** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.


Hoyalux iD LifeStyle 4

(бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16–11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

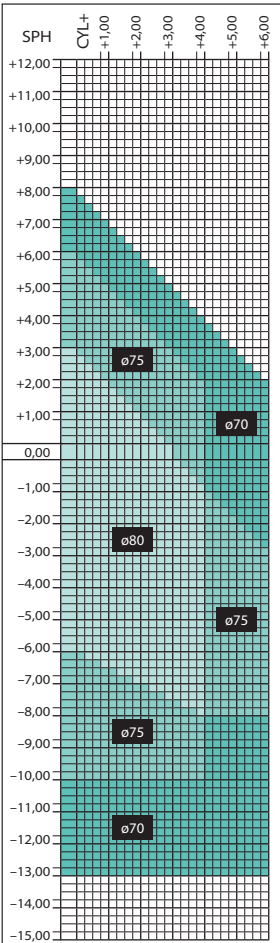


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤4,00
- ø75: –1,25 ► – 8,00 cyl ≤6,00
- ø75: +6,00 ► –10,00 cyl ≤4,00
- ø70: +8,00 ► –13,00 cyl ≤6,00

Аббидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16–11 мм

EYNOA 1.67

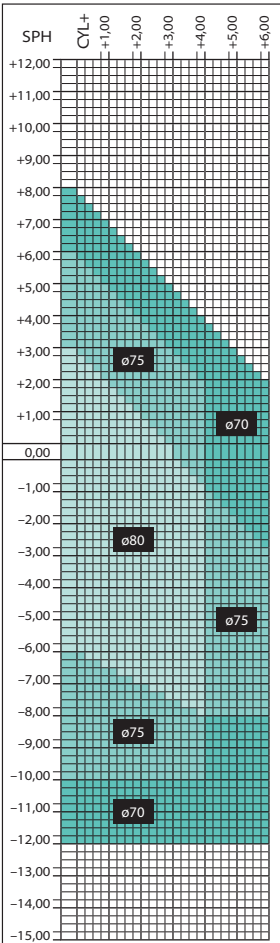


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤4,00
- ø75: –1,25 ► – 8,00 cyl ≤6,00
- ø75: +6,00 ► –10,00 cyl ≤4,00
- ø70: +8,00 ► –12,00 cyl ≤6,00

Аббидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16–11 мм

EYAS 2.0 1.60

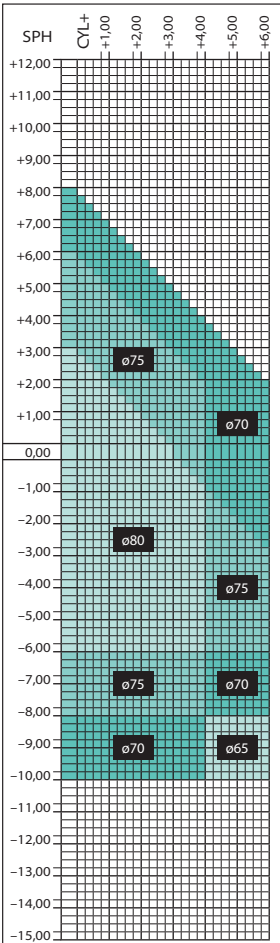

Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤4,00
- ø75: –1,25 ► – 8,00 cyl ≤6,00
- ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤4,00
- ø70: +8,00 ► –10,00 cyl ≤4,00
- ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤6,00
- ø65: +8,00 ► –10,00 cyl ≤6,00

Аббидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


АДДИДАЦИЯ											
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

16-11 мм

PNX 1.53

16-11 мм


ПОЛИМЕР 1.50

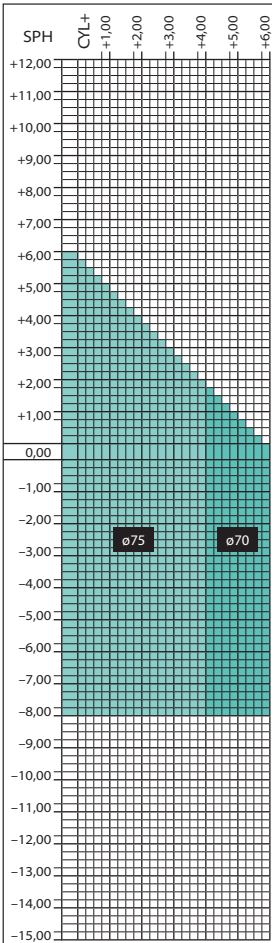

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

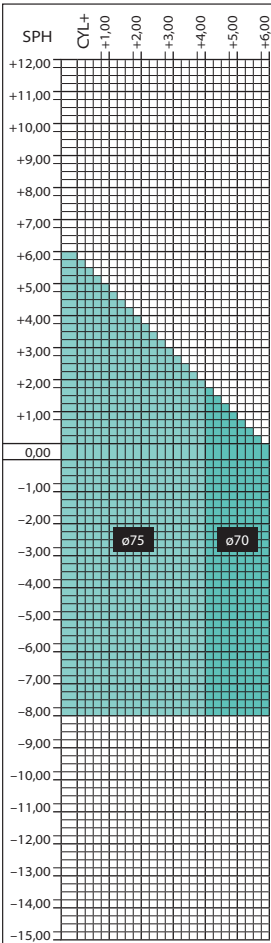

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

Для заметок

Совершенное зрение заслуживает каждый

- Высокое качество зрения.
- Комфорт и устойчивость при движении.
- Четкое зрение при любых направлениях взгляда.

HOYA


BALANSIS

- Свободное и сфокусированное зрение по всей поверхности линзы.
- Легкая фокусировка на цифровых устройствах и печатных материалах вблизи.
- Уверенность при движении благодаря отсутствию плавающего эффекта.


Мин. установочная высота

Hoyalux Balansis		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Balansis 14 мм B47/B45/B43/B4X/B41

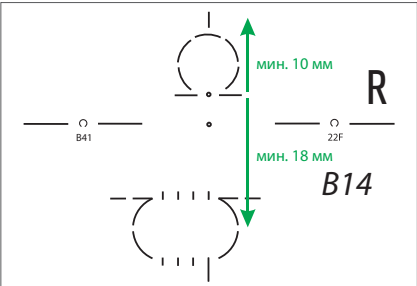

Hoyalux Balansis 11 мм B17/B15/B13/B1X/B11

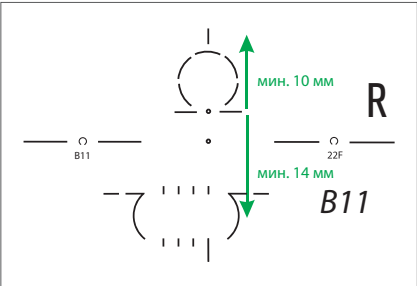

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ► 84% Зеленый 7 ► 86% Серый 7 ► 88% Синий* 7 ► 85% *
SENSITY DARK		Абсолютно прозрачные в помещении. Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Balansis доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.
- Для оптимизации по монокулярному CD и получения эстетичного вида рекомендуется заказ с METS

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	реком.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	реком.	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	BV	BY	B6	BX	B5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
		[]	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	[]	—	[]
		Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

14,11 mm

EYVIA 1.74
кроме Sensity

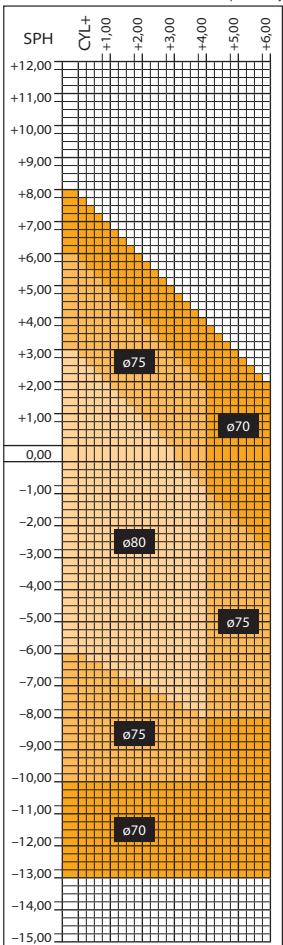


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► – 13,00 cyl ≤ 4,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.

14,11 mm

EYNOA 1.67

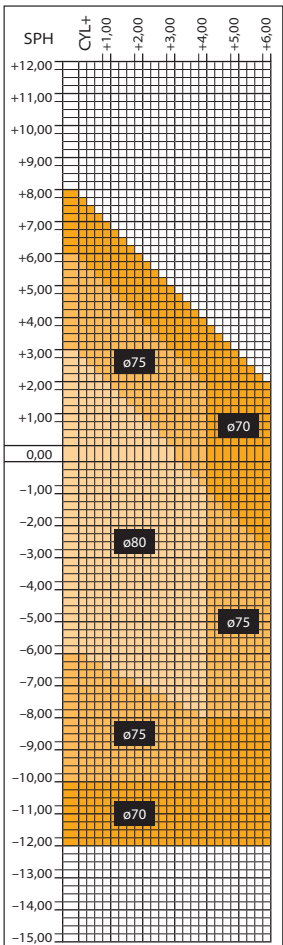


Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► – 12,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.

14,11 mm

EYAS 2.0 1.60

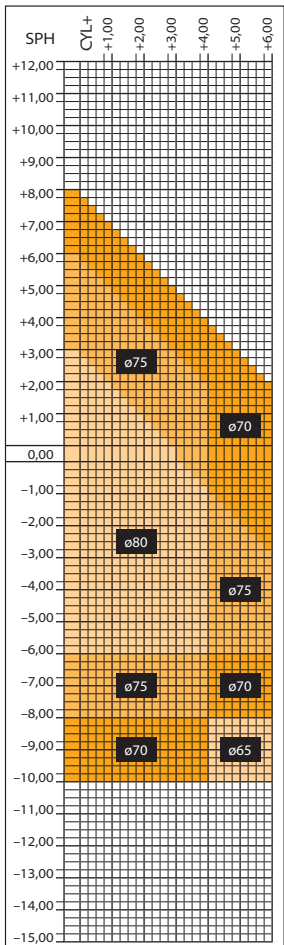

Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
- ø70: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
- ø65: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.


АДДИДАЦИЯ										
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50

14,11 мм

PNX 1.53

14,11 мм


ПОЛИМЕР 1.50

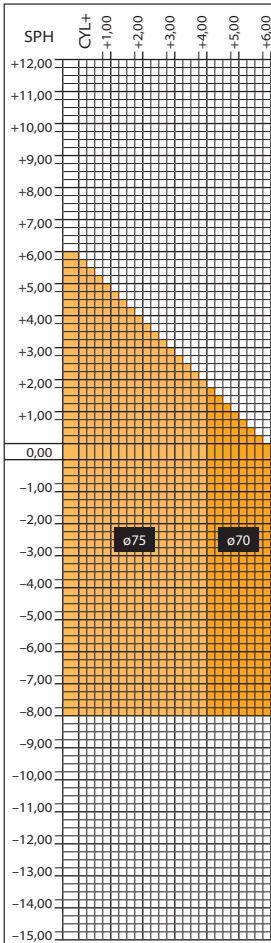

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.

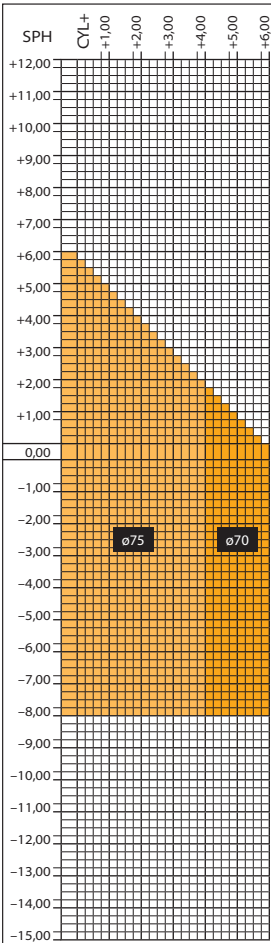

Диапазон производства

ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.

Для заметок

Хороший обзор для широкого круга пользователей

- Широкие поля зрения.
- Комфортное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда.
- Легкость рекомендации и подбора.

HOYA


DAYNATIC

- Более широкие поля зрения благодаря распределению прогрессии по задней поверхности.
- Беспрепятственное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда благодаря технологии расширения полей зрения.
- Легко рекомендовать и подбирать, а для заказа требуется минимум измерений.


Мин. установочная высота

Hoyalux Daynamic		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Daynamic 14 мм DP45/DP43/DP4X/DP41

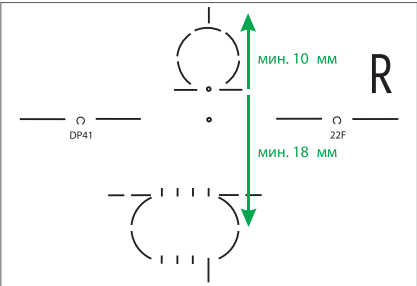

Hoyalux Daynamic 11 мм DP15/DP13/DP1X/DP11

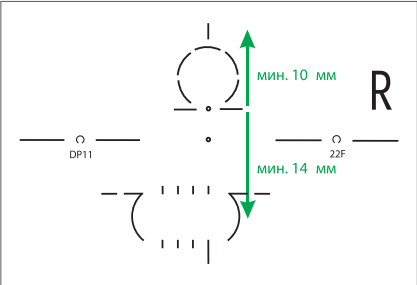

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ► 84%** Зеленый 7 ► 86%** Серый 7 ► 88%** Синий* 7 ► 85%**
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SILVER		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Daynamic доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности			
Технология	FreeForm по внутренней поверхности линзы			
Материал	Еуноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	реком.	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	реком.	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

		EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР	
		1.67	1.60	1.53	1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	14/11 MM	D4Y/D1Y	D46/D16	D4X/D1X	D45/D15
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G1+G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—	—	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ			—	[]	—	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]**	
HOYA iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.



14/11 mm

EYNOA 1.67

14/11 mm


EYAS 2.0 1.60

14/11 mm

PNX 1.53

14/11 mm

ПОЛИМЕР 1.50

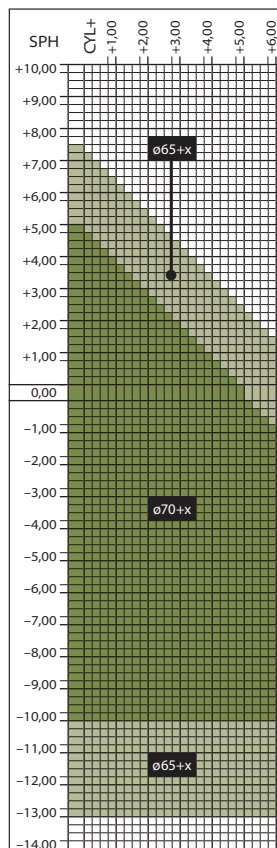


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +7,50 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

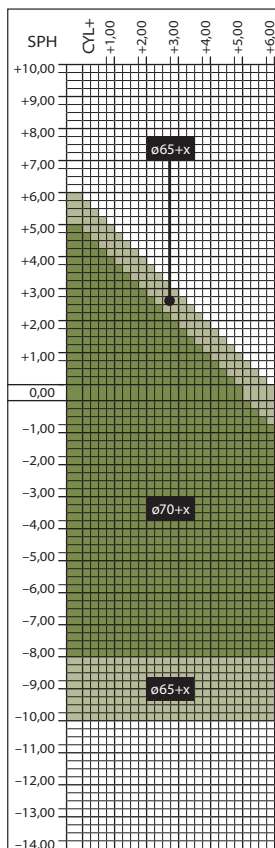


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

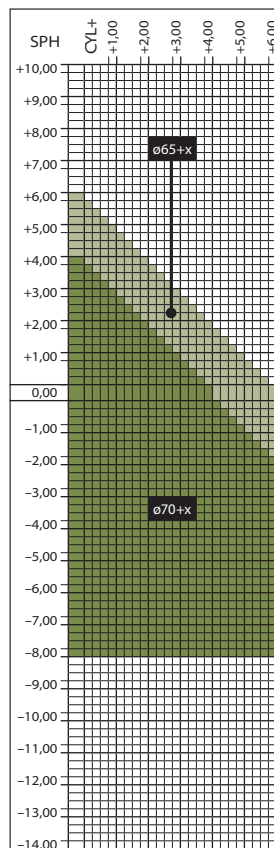


Диапазон производства

070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

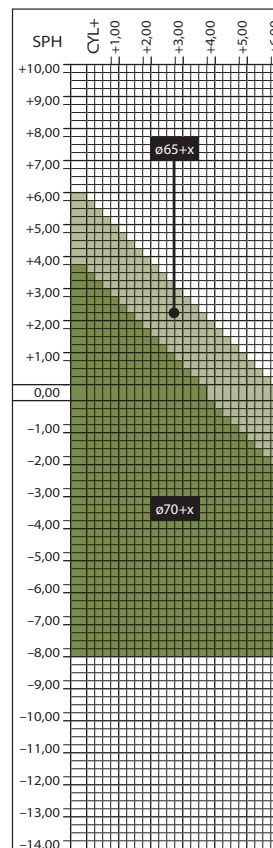

Диапазон производства

070+x: +3,75 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS



Четкое зрение на любых расстояниях

- Разумный выбор линз в первые прогрессивные очки для пользователей без специальных зрительных требований.
- Совместимость с оправами различных форм и размеров.
- Четкое и комфортное зрение.
- Качество по доступной цене.

AMPLITUDE
PLUS

- Широкие поля зрения благодаря распределению прогрессии по задней поверхности.
- Точная коррекция даже на периферии линзы благодаря технологии обработки задней поверхности.
- Позволяет пользователям плавно переключаться между ближним, средним и дальним зрением.

Мин. установочная высота


Hoyalux Amplitude Plus		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм
11 мм		14 мм

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
 SENSITY 2	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
 SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
 SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
 MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.
 POLARIZED		Линзы Amplitude Plus доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

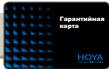

Гарантии на покрытия
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности				
Технология	FreeForm-обработка внутренней поверхности				
Материал		Eyunoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе		31	41	43	58
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм		390	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс		70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ		идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ		идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

AMPLITUDE		EYNOA		EYAS 2.0		PNX		ПОЛИМЕР	
PLUS		1.67		1.60		1.53		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	15/11 MM		AP5Y/AP1Y	AP56/AP16	AP5X/AP1X	AP55/AP15		
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G2+G4	G1+G2+G3+G4	G1+G2+G3+G4	G1+G2+G4		
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]*		
	HVLL BlueControl (BLC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]		
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]		
	Hi-Vision Aqua (HVA)		2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]	[]	[]		
	СРОК ПОСТАВКИ			12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней		
	SENSITY 2		ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG					
				+ []	+ []	+ []	+ []		
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	SENSITY DARK		ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG					
				+ []	+ []	—	+ []		
	SENSITY SHINE		ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS					
				—	[]	—	[]		
	HI-VISION SUN PRO			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP					
			[]	[]	[]	[]			
HOYA MIRROR		Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV						
			[]	[]	[]	[]			
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB						
			[]	[]	[]	[]			
COLOURS		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]	[]	[]**		
HOYA iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		

 * Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.



ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

15/11 мм

EYNOA 1.67

15/11 мм


EYAS 2.0 1.60

15/11 мм

PNX 1.53

15/11 мм

ПОЛИМЕР 1.50

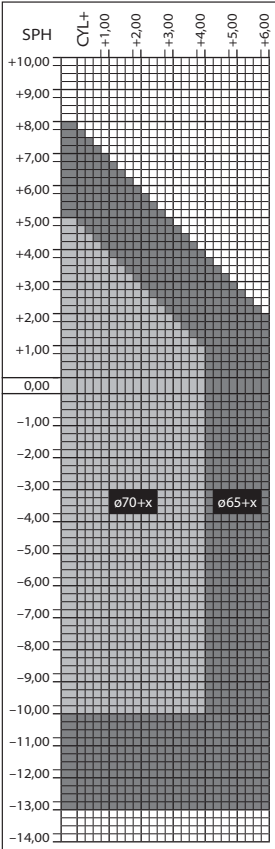


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

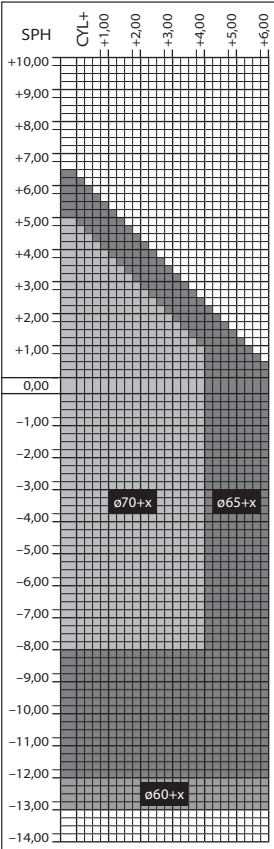


Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,50 ► -12,00 cyl ≤ 6,00
060+x: -12,25 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

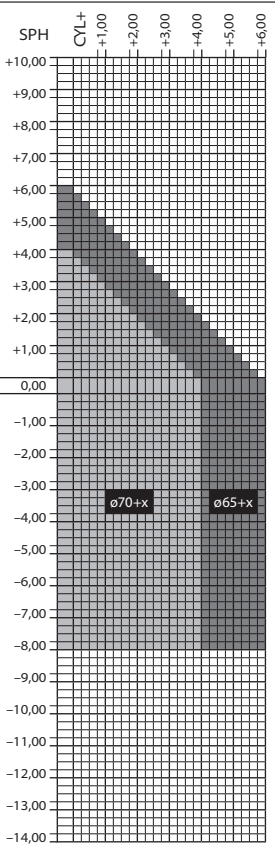


Диапазон производства

070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

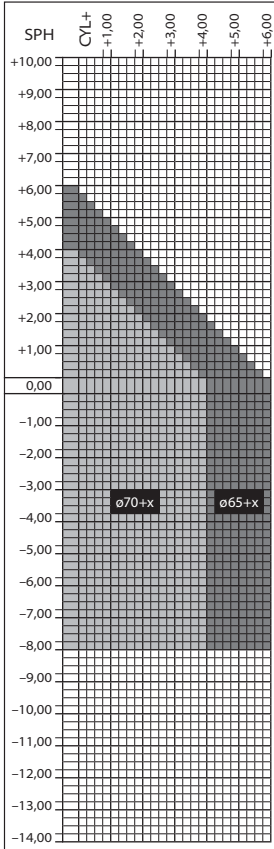

Диапазон производства


070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

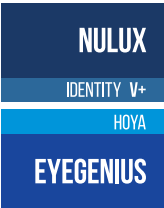

- Индивидуальные асферические однофокальные линзы от HOYA, учитывающие параметры посадки оправы.
- Четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Эстетичный внешний вид в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Дизайн линзы рассчитывается на основе выписанной призматической коррекции.
- Легкая адаптация к призматической коррекции.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-попечатью) должна располагаться по центру зрачка.

Горизонтальная и вертикальная децетрации в соответствии с призматическими диоптриями не нужны – они автоматически рассчитываются при дизайне. Сумма призм должна быть разделена на левую и правую стороны одинаково, исключая призмы 0,50–1,00, размещаемые слева.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%** Серый 7 ▶ 88%** Синий* 7 ▶ 85%**
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Gray + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)

* Скоро в продаже.
** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.
Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
• Для точной разметки линз используйте измерительную систему HOYA Digital Fitting.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется

Только для призматических рецептов ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР	
IDENTITY V+		1.74	1.67	1.60	1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	ENIDV	ENIDY	ENID6		ENID5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4		G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			3 ГОДА ГАРАНТИИ	*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			3 ГОДА ГАРАНТИИ	
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []		+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ			+ []	+ []		+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]		[]
	HI-VISION SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + HVSP				
		[]	[]	[]		[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]**	[]**	[]**		[]**
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV * Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно. Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control. Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints, Sport.





** Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints. Окрашивание Sport доступно для материала Eyas 2.0 1.60.

Nulux iDentity V+ EyeGenius

(бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

Только для призматических рецептов

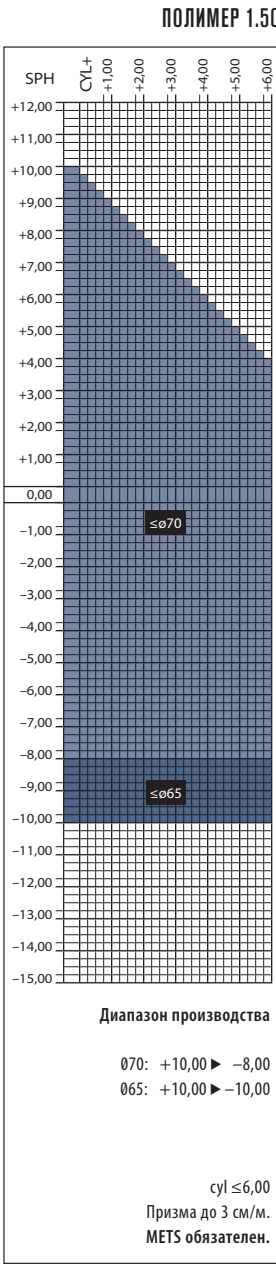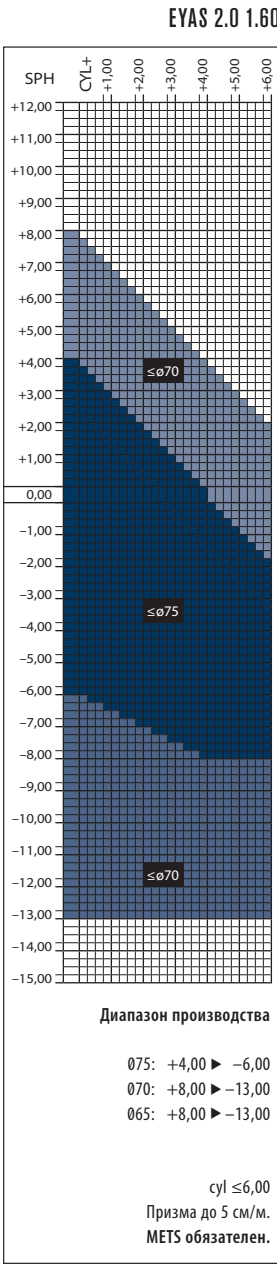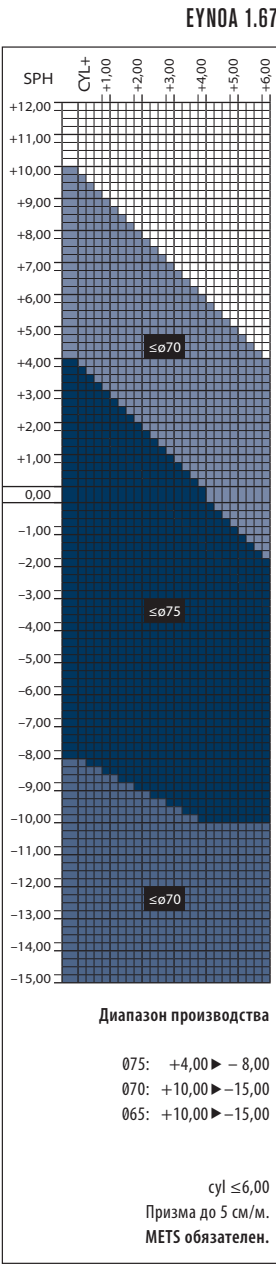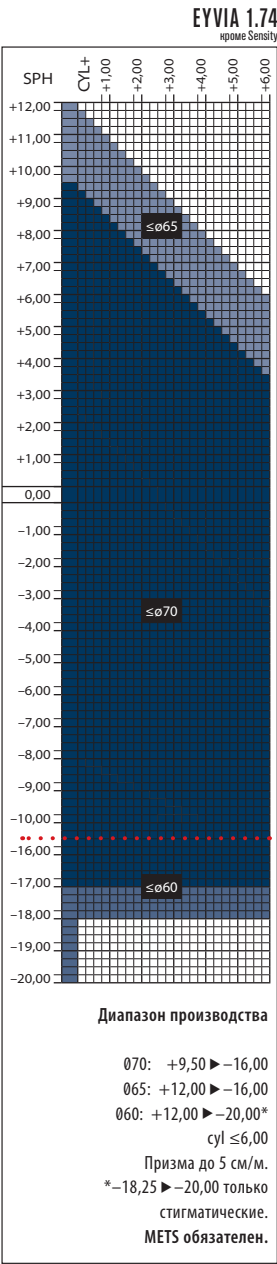

Специальные линзы для вождения

- Улучшенный комфорт восприятия без бликов и ослепления светом.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины.
- Легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью

Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ENROUTE

- Значительное уменьшение бликов и ослепления светом фар от встречных машин.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью.


Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асфер. линз).

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.

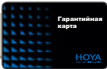

Сравнение линз EnRoute

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Четкое зрение вдаль, при взгляде в зеркала и легкая фокусировка на приборной панели	✓	✓
Повышающий контрастность фильтр для лучшей четкости, отсекающий блики и снижения ослепления		✓

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая/аторическая внутренняя поверхность				
Технология	FreeForm				
Материал		1.67	1.60		
Число Аббе		31	40		
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30		
Макс. УФ-защита, нм		410	410		
Прочность на разрыв, кгс		50–60	50–60		
Для безободковых оправ		идеально	идеально		
Для полуободковых оправ		идеально	идеально		


Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	RSP7	RS7	RSP6	RS6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	Drive Coat (DVC)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]
	COLOURS	—	—	—	—
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает яркость цвета, отсекая ненужные блики и снижая ослепление светом фар от встречных машин

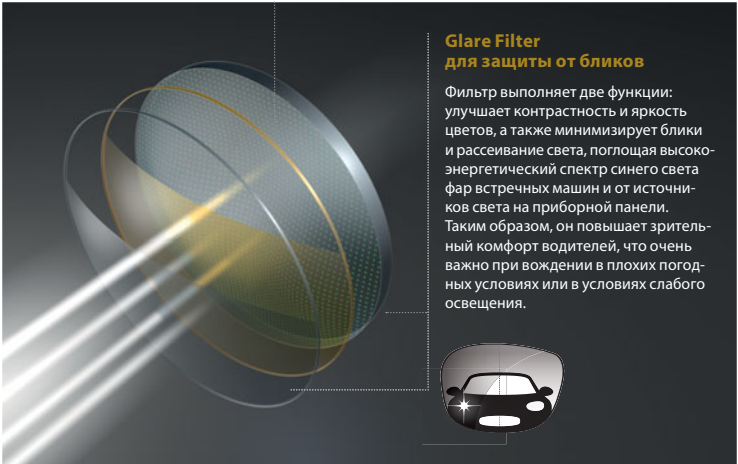

Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высокоэнергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.

* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



Все изображения показаны исключительно для иллюстрации (прогрессивные линзы).

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ



- Значительное уменьшение бликов и ослепления от встречного потока машин.
- Улучшенное восприятие контраста и яркости в условиях слабого освещения, тумана и дождя.
- Четкое естественное зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Плавная и быстрая смена фокусировки на различных расстояниях.

Мин. установочная высота


EnRoute & EnRoute Pro		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм

EnRoute 15 мм

EnRoute Pro 15 мм

R55V/R53V

RP55V/RP53V

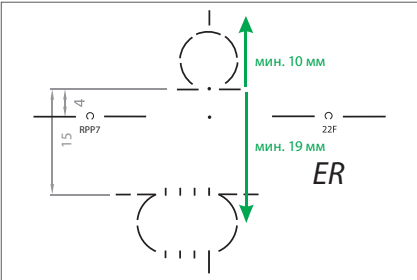

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	1.67	1.60			
Число Аббе	31	40			
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30			
Макс. УФ-защита, нм	410	410			
Прочность на разрыв, кгс	50–60	50–60			
Для безободковых оправ	идеально	идеально			
Для полуободковых оправ	идеально	идеально			


Рекомендация

Для получения оптимального результата учитывайте расстояние до приборной панели (обычно 60 см) при определении аддидации EnRoute Pro. Указание расстояния до приборной панели автомобиля позволяет обеспечить идеальное зрение с линзами, оптимизированными для вождения.

Сравнение линз EnRoute

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Отличное зрение вдаль, на приборную панель и в зеркала	✓	✓
Integrated Double Surface Design – широкие поля четкого зрения и легкий переход из одной зоны зрения в другую	✓	✓
Balanced View Control – стабильное зрение при движении	✓	✓
Дополнительный фильтр – усиление контрастности, улучшение яркости цвета и высокий уровень уменьшения бликов		✓
Учет индивидуальных требований к условиям использования очков во время вождения		✓

Гарантии

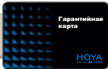

Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro


ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ



		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	RPP7	RP7	RPP6	RP6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
СОПЛЕЧАЩИЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	Drive Coat (DVC)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]
	COLOURS	—	—	—	—
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает яркость цвета, отсекая ненужные блики и уменьшая ослепление светом фар от встречных машин

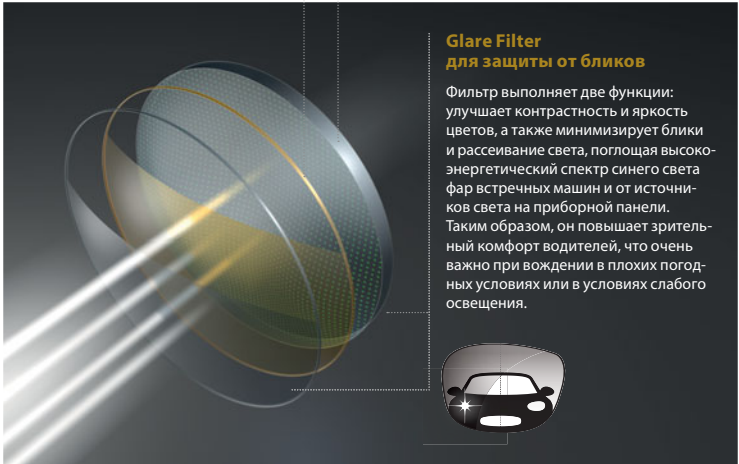

Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высокоэнергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.

Прогрессивные линзы EnRoute

Технологии Integrated Double Surface и Balanced View Control обеспечивают стабильное зрение при движении, четкое восприятие изображений на дальних расстояниях, на приборной панели и в зеркалах автомобиля, а также легкое переключение между ними

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro






Все изображения показаны исключительно для иллюстрации.

* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

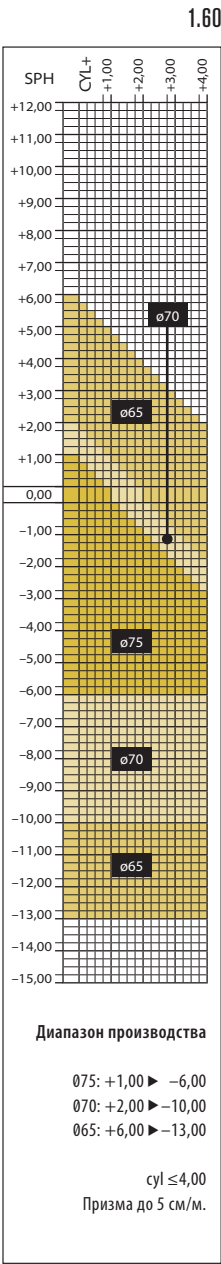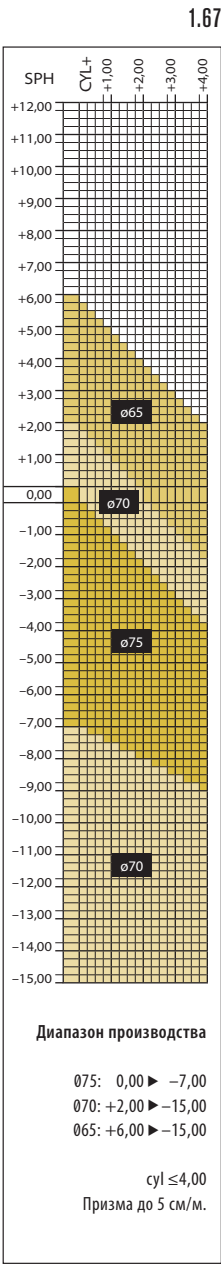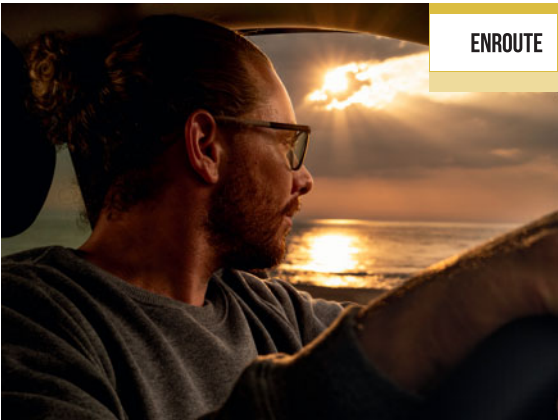


15 мм

1.67

15 мм


1.60

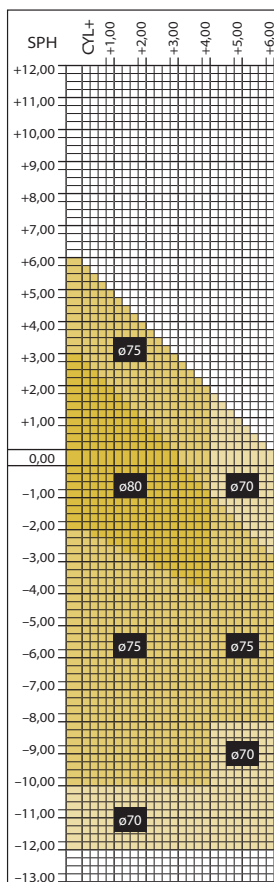

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -2,00 cyl ≤4,00
 ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
 ø75: +3,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
 ø70: +6,00 ► -12,00 cyl ≤6,00

Аддиция 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

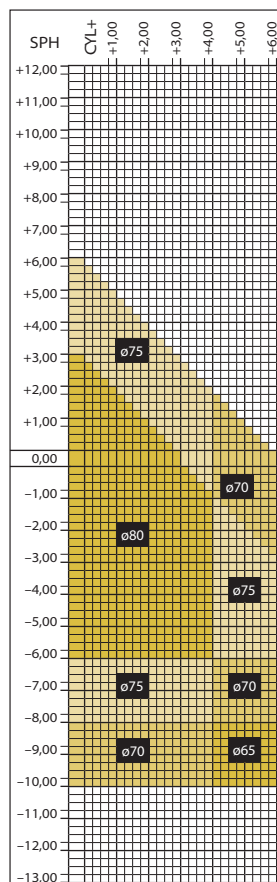

Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
 ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
 ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
 ø70: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
 ø70: +6,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
 ø65: +6,00 ► -10,00 cyl ≤6,00

Аддиция 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Для заказа линз Nulux Sportive TrueForm опция METS обязательна.



Установка

Установка производится по центру зрачка.




Толщина в центре и по краям линзы с высоким значением базовой кривизны может значительно отличаться от толщины линз со стандартной базовой кривизной!

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%* Синий* 7 ▶ 85%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.

* Скоро в продаже.
** При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

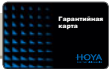

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

ВНИМАНИЕ!
Для заказа однофокальных линз Sportive необходимо указать ось цилиндра. Необходимая оптическая сила линз достигается за счет призматической компенсации. Рассчитанные значения оптической силы указываются на упаковке линз.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферич. внешн. поверхность, асферическая/аторическая внутр. поверхн.		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аbbe	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется



SPORTIVE			EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
			1.60	1.53	1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		SNT6	SNTX	SNT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryō (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]*
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG		
			+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
			+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS		
		[]	—	[]	
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + HVSP		
			[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	—	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]**
HOYA iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV

UV

* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryō доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryō недоступно.

** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM

14 мм

SPORTIVE

- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Для заказа линз Sportive TrueForm опция METS обязательна.




Мин. установочная высота

Sportive TrueForm		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм

Sportive TrueForm

FA43/FA4X/FA41

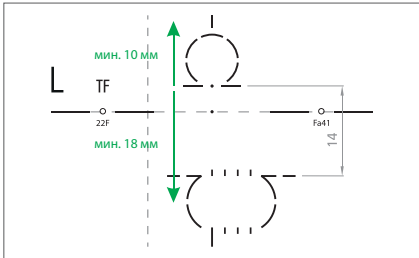


Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100 %	Коричневый 5 ► 84 %** Зеленый 7 ► 86 %** Серый 7 ► 88 %** Синий* 7 ► 85 %**
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SILVER		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 178. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 184–186.

* Скоро в продаже.

** При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

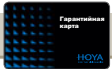

Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 2 мес.

ВНИМАНИЕ!

Для прогрессивных линз Sportive необходимо определить аддидацию установкой впереди коррекции для дали. Необходимая оптическая сила линз достигается за счет призматической компенсации. Рассчитанные значения оптической силы указываются на упаковке линз.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50/1.50 UV400
Число Аббе	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340/400
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

SPORTIVE			EYAS 2.0 1.60	PNX 1.53	ПОЛИМЕР 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		SPT6	SPTX	SPT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]*
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	 ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG		
			+ []	+ []	+ []
	 ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
			+ []	—	+ []
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	 ПОЛНАЯ ЦЕНА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS		
			[]	—	[]
			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + HVSP		
			[]	—	[]
	 Light Mirror silver / blue / violet / copper 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	—	[]
	 Mirror silver / gold / blue 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
	 БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180		[]	[]	[]**
HOYA iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.
** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)


ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА ОДНОФОКАЛЬНЫХ ЛИНЗ



Опция **METS** обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.

х: линза может быть децентрирована. Величина децентрации зависит от величины и формы светового проема оправы, междиеврового расстояния и параметров посадки оправы.

EYAS 2.0 1.60

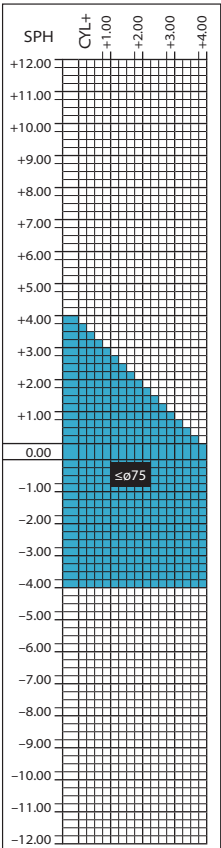


Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

сyl ≤4,00
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

PNX 1.53

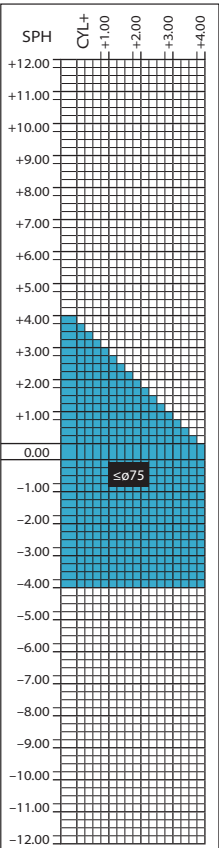


Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

сyl ≤4,00
Призма до 3 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

ПОЛИМЕР 1.50

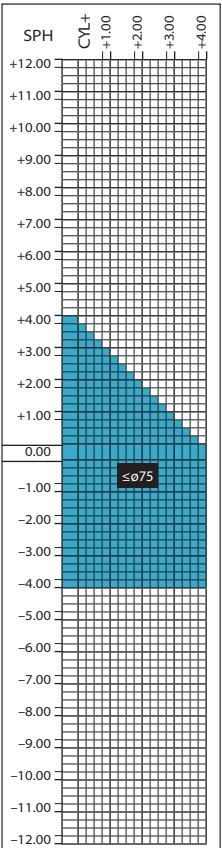

Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

сyl 9≤4,00
Призма до 3 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРЕССИВНЫХ ЛИНЗ


SPORTIVE



EYAS 2.0 1.60

PNX 1.53

ПОЛИМЕР 1.50

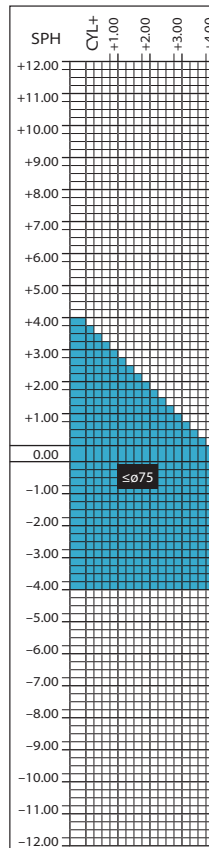


Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

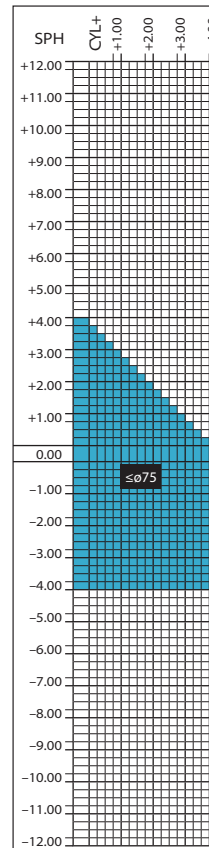


Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 3 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

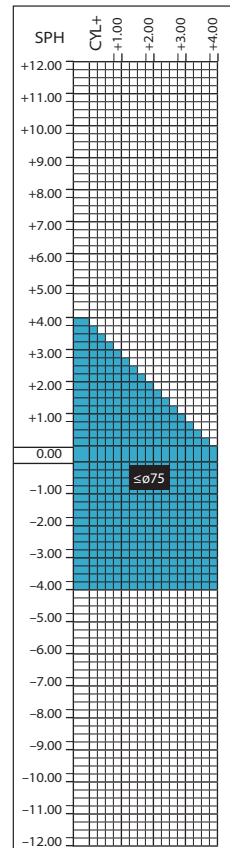

Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 3 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.


Опция METS обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.

х: линза может быть децентрирована. Величина децентрации зависит от величины и формы светового проема оправы, междиевого расстояния и параметров посадки оправы.


Nulux Sportive TrueForm и Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ИЗГИБА ОПРАВЫ


SPORTIVE

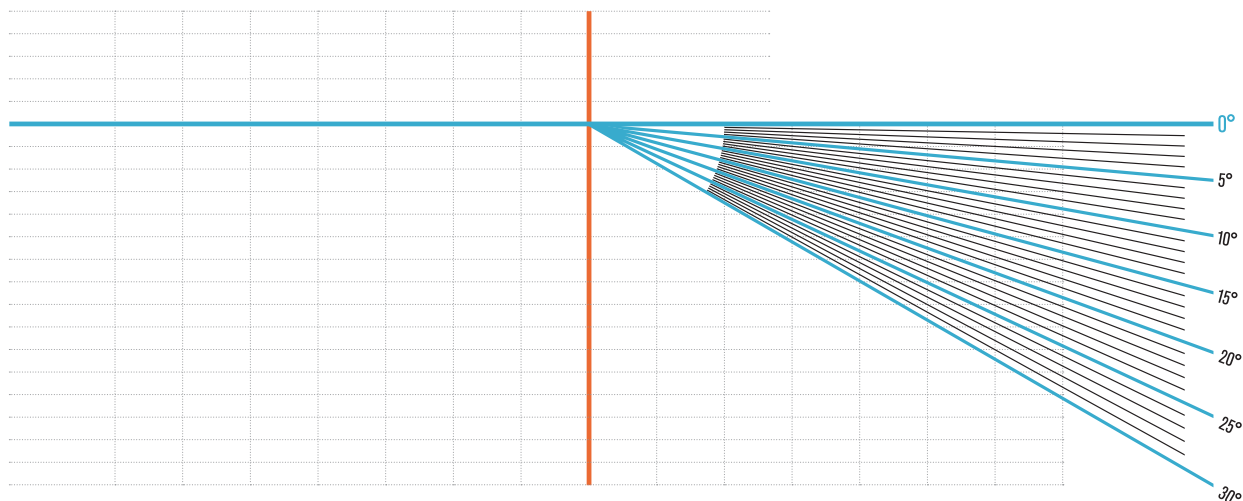

1. Расположите оправу лицевой стороной вертикально на схеме, как показано на рис. 1.
2. Оправа должна располагаться параллельно голубой линии (рис. 2).
3. Расположите на вертикальной оранжевой линии крайнюю точку правой линзы в носовой части оправы (не центр переносья!), как показано на рис. 2.
4. Измерьте угол изгиба оправы (FFFA).

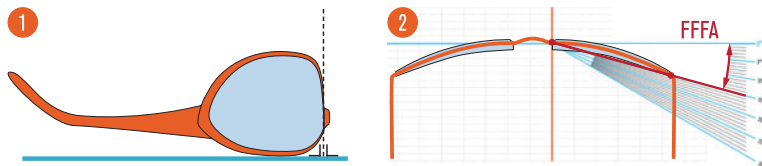

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

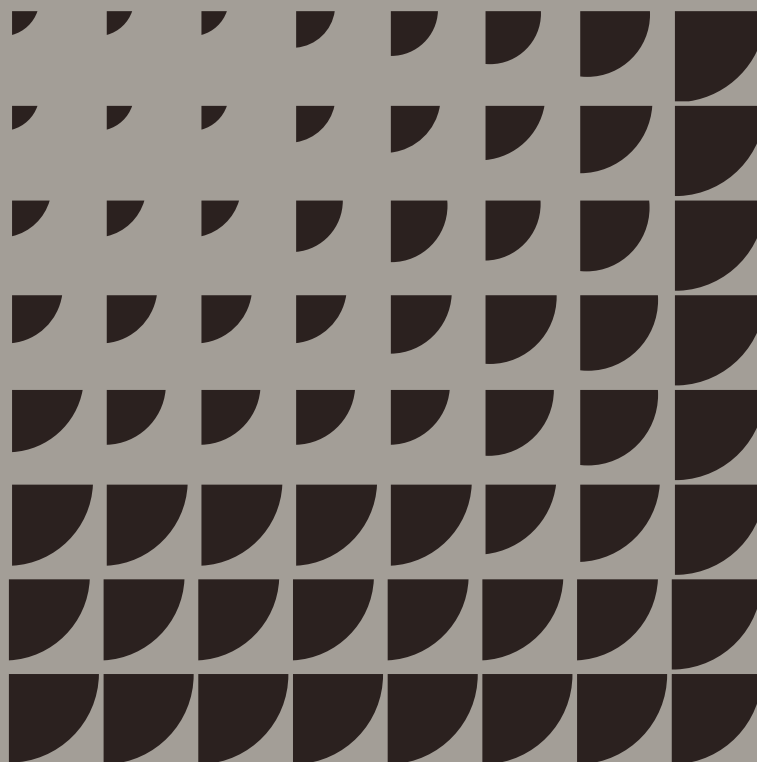


HOYA

Бифокальные линзы TrueForm

Материалы и свойства

Дизайн	TrueForm		
Тип	C28		S28
Материал	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	41	58	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	340	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	10–20	10–20
Для безободковых оправ	идеально	не подходит	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	не рекомендуется	не рекомендуется

Гарантии

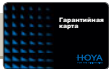

Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo,
HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Установка

Верхняя линия сегмента по границе нижнего века.

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		ТС6	ТС8	ТС8К
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G3+G4	G1+G4	G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]*
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	КОД			ТС8 +SNB/SNG	ТС8К +SNB/SNG
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА		+ []	+ []**
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 180	[]	[]	[]***
	NOVA iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Линзы с покрытием Hi-Vision Meiryo доступны в материале Полимер 1.50 UV400. Окрашивание в материале Полимер 1.50 UV400 с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступно.

** Опция Sensity с покрытием Hi-Vision Meiryo недоступна.


*** Для обеспечения УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием HVLL UV Control.

АДДИЦИЯ



(бесцветные, окрашенные и Sensity)

C28 EYAS 2.0 1.60 TRUEFORM

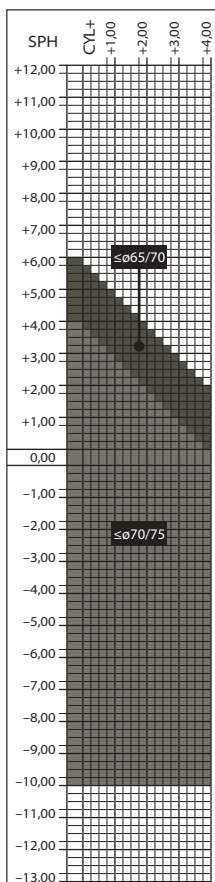


Диапазон производства

ø65/70: +6,00 ► -10,00
ø70/75: +4,00 ► -10,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM

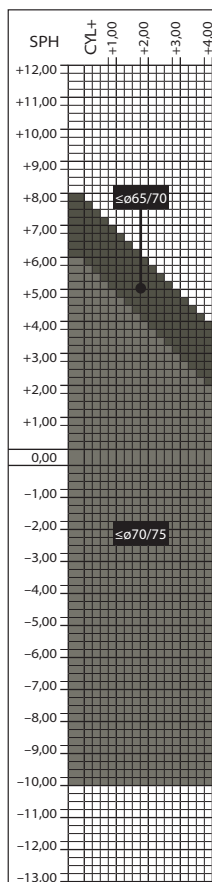


Диапазон производства

ø65/70: +8,00 ► -10,00
ø70/75: +6,00 ► -10,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM SENSITY

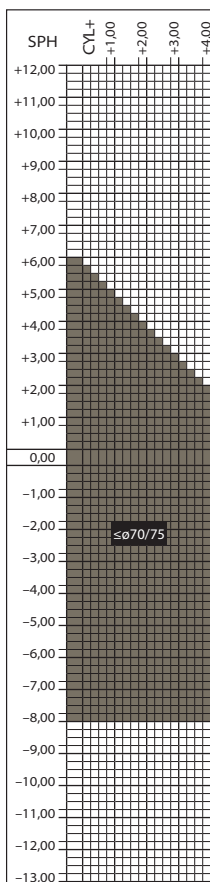


Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

S28 1.50 TRUEFORM

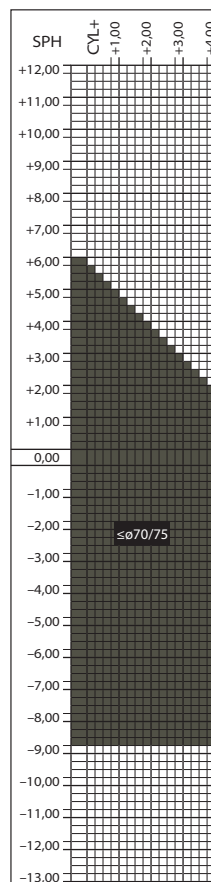


Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,75

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

S28 1.50 TRUEFORM SENSITY

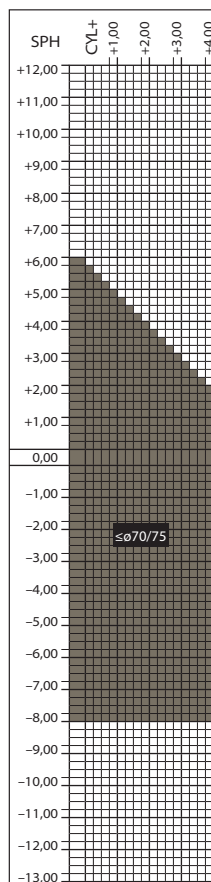


Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

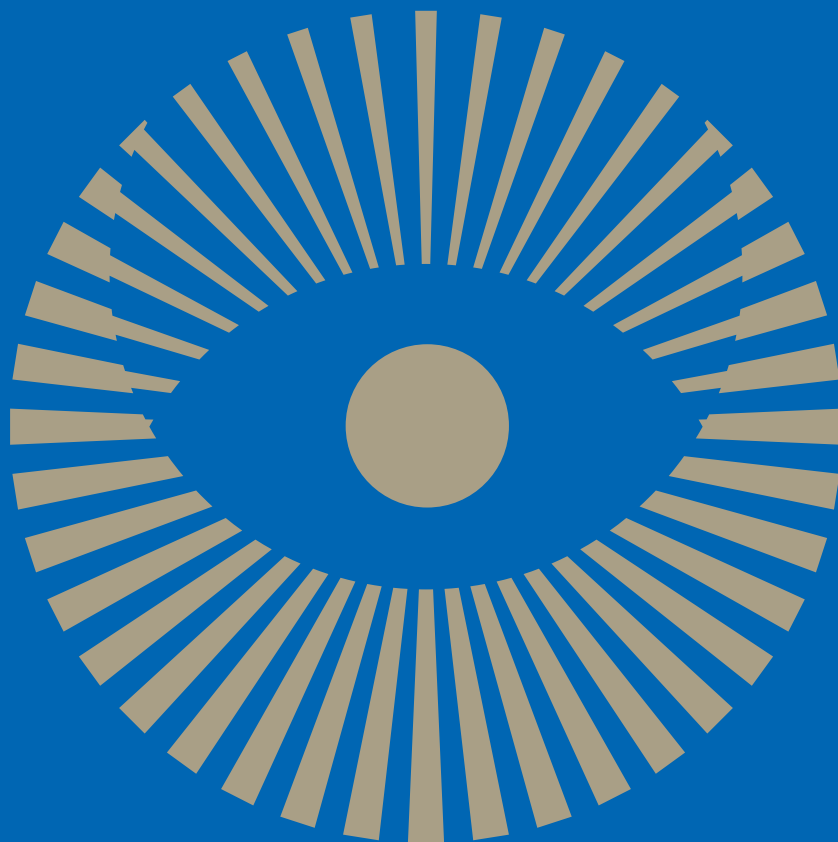


HOYA


Что мы должны знать об УФ-лучах?

Свет разделяется на видимый и невидимый диапазоны. Длина волны видимого света составляет от 380 до 780 нм. Ультрафиолетовые лучи являются естественной составляющей дневного света и невидимы для человеческого глаза.

Ультрафиолетовое излучение (сокращенно УФ) – это электромагнитное излучение с длиной волны короче, чем у видимого света.

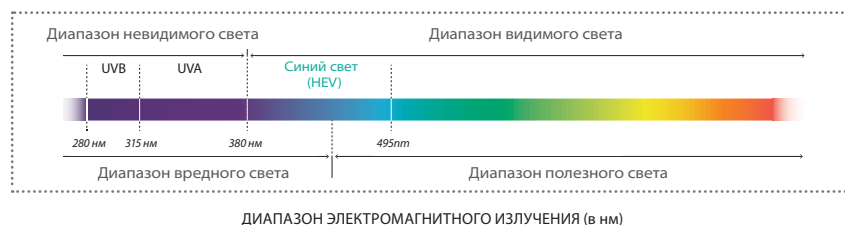

УФ-лучи могут быть разделены на 3 группы в соответствии с их длинами волн:

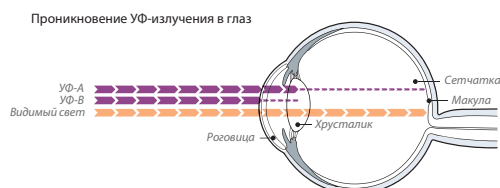


Лучи **УФ-С** (280–200 нм) и УФ-лучи безвоздушного пространства (< 200 нм) практически полностью блокируются озоновым слоем, поэтому не достигают поверхности Земли.

Лучи **УФ-В** (280–315 нм) и лучи **UV-A** (315–380 нм), отвечающие за загар нашей кожи, достигают поверхности Земли. Большая часть этих лучей проникает в роговицу, а остальные лучи поглощаются хрусталиком.

Лучи **УФ-А** могут повредить слизистую оболочку глаза, а их постоянное проникновение в хрусталик может привести к катаракте. Лучи **УФ-В** могут быстро повредить хрусталик, а также вызвать кератит или конъюнктивит.

Последствия интенсивного УФ-излучения развиваются медленно и незаметно. Дети и молодые люди особенно подвержены риску, и мы должны следить за тем, чтобы они всегда надевали солнцезащитные очки с УФ-фильтром в зонах воздействия высоких доз УФ-излучения (например, на пляже или в горах).

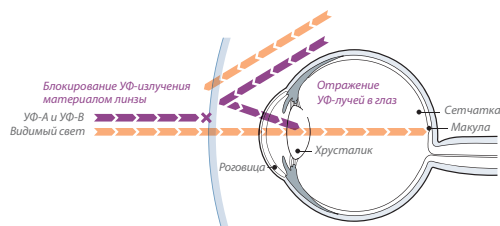

Пользователи очков частично защищены от вредного воздействия УФ-излучения. Материалы линз с УФ-фильтром* блокируют ультрафиолетовые лучи, поступающие спереди, но не защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, отраженных от внутренней поверхности линзы. Поэтому у пользователей нет всесторонней защиты от УФ-излучения.

* Все материалы, выпускаемые HOYA, имеют УФ-фильтр. Хорошо известный и широко применяемый традиционный Полимер 1.50 изначально не имеет такого фильтра.


Hi-Vision Meiryo и Hi-Vision LongLife UV Control

Защищают глаза от вредного УФ-излучения


Hi-Vision Meiryo и Hi-Vision LongLife UV Control (HVLL UV Control) – покрытия, защищающие глаза от отраженного УФ-излучения, вместе с материалами HOYA, стойкими к ультрафиолету, обеспечивают эффективную защиту от вредных УФ-лучей и связанных с ними опасностей.

Наши глаза подвергаются воздействию опасного УФ-излучения весь день в течение всего года. Нам необходим ультрафиолет для синтеза витамина D, но чрезмерное воздействие УФ-лучей может нанести вред глазам (это самая главная причина возникновения катаракты) и вызвать другие нарушения и заболевания.

Всесторонняя защита от УФ-излучения при использовании покрытий
Hi-Vision Meiryo и HVLL UV Control и стойких к УФ-излучению материалов

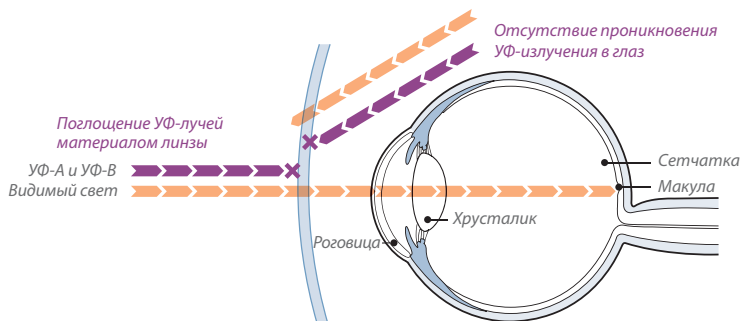

Все линзы с покрытиями
Hi-Vision Meiryo и Hi-Vision
LongLife UV Control (HVLL
UV Control) обеспечивают
всестороннюю защиту
от УФ-излучения, в том числе
и для материала Полимер 1.50.

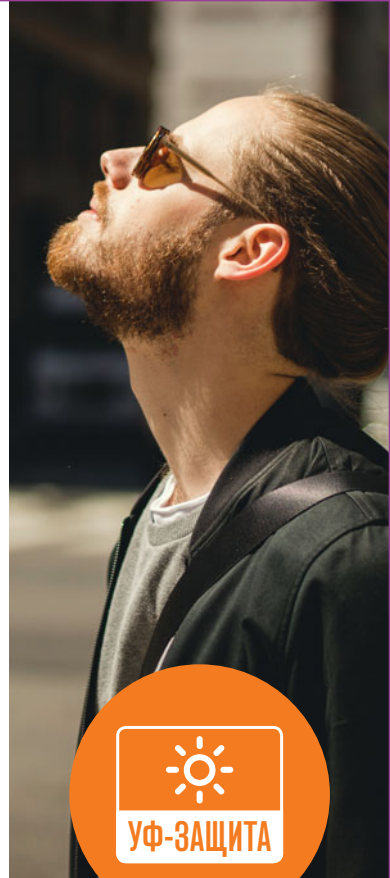

HI-VISION

MEIRYO

HI-VISION

LOGLIFE
UV CONTROL

Для заметок




Поляризационные линзы

Меньше яркости. Больше контраста. Больше комфорта

Поляризационные линзы HOYA, доступные в широком диапазоне продуктов для любого рецепта, – солнцезащитное решение №1 для всех любителей активного отдыха.

Преимущества поляризационных линз HOYA Polarized

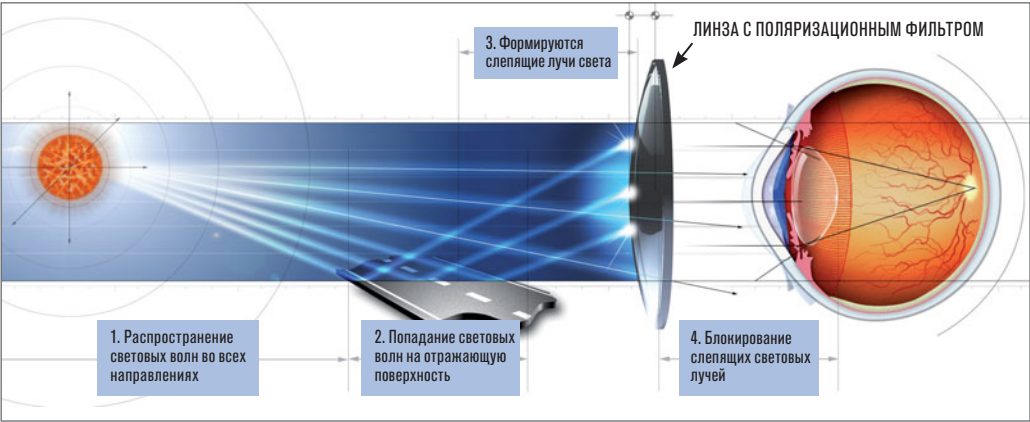

С поляризационным фильтром

Без поляризационного фильтра

Поляризационные линзы уменьшают раздражающие блики от отражающих поверхностей, но изображение не искажается. Кроме того, обеспечиваются более четкое зрение и защита глаз от вредного воздействия. Как и обычные солнцезащитные линзы, поляризационные линзы уменьшают количество света, достигающего глаз, но они также уменьшают ослепление. Поляризационные линзы идеально подходят для занятий спортом, рыбалки, парусного или лыжного спорта, любого вида активного отдыха на солнце, а также для вождения.



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ



УФ ЗАЩИТА



Polarized Brown (83 %)



Polarized American Gray (85 %)



Polarized Gray (86 %)

В зависимости от выбранного материала линзы и покрытия интенсивность затемнения может незначительно меняться.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ



Поляризационные линзы

Поляризационные линзы могут поставляться с более высокой базовой кривизной, чтобы лучше соответствовать требованиям пользователей к оправам.

Не рекомендуется очистка в ультразвуковых установках.

Обратите внимание, что при взгляде через поляризационные линзы можно наблюдать поверхностное натяжение витрин, ЖК-экранов, ветровых стекол автомобилей и других специфических поверхностей.

Заказ

При заказе астигматических фотохромных поляризационных линз Drivewear всегда указывайте необходимое значение оси направления цилиндра для правильного направления поляризационного фильтра.



Фотохромные поляризационные линзы DRIVEWEAR

При заказе астигматических фотохромных поляризационных линз Drivewear всегда указывайте необходимое значение оси направления цилиндра для правильного направления поляризационного фильтра.

Линзы DriveWear производятся с высокой базовой кривизной. Для заказа меньшей базовой кривизны свяжитесь с представителем HOYA.

Характеристики

- Гарантируют идеальное зрение при любых погодных условиях.
- Поляризационный фильтр блокирует яркие блики, повышает контрастность и улучшает восприятие глубины изображения.
- Затемняются не только под воздействием УФ-лучей, но и от света в видимом диапазоне (даже за ветровым стеклом).

Уровень затемнения

УФ-защита до, нм	400
УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ	
На улице	68-88 % / 23 °C
В автомобиле за ветровым стеклом	68-78 % / 23 °C

Гарантийные программы

Гарантии на покрытия

- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision Meiryo, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.





HILUX 1.50
DRIVEWEAR

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД					DWR
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ					G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ					10 рабочих дней
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
	Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции					ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




HILUX 1.50 DRIVEWEAR

DRIVEWEAR® Transitions **SOLFX™**

УФ
ЗАЩИТА


Облачно
68 %
(желто-зеленый)

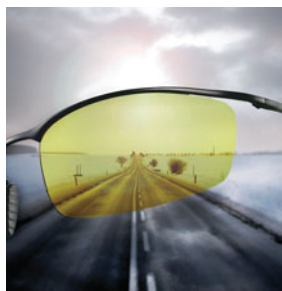

Дневной свет
за ветровым стеклом
78 %
(медный)



Яркий солнечный свет
вне автомобиля
88 %
(темный красновато-коричневый)

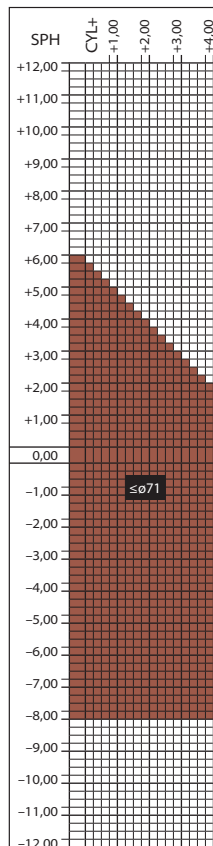

Диапазон производства


ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР

071: +6,00 ► -8,00

суп ≤4,00
Призма до 3 см/м.

Nulux iDentity V+ Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

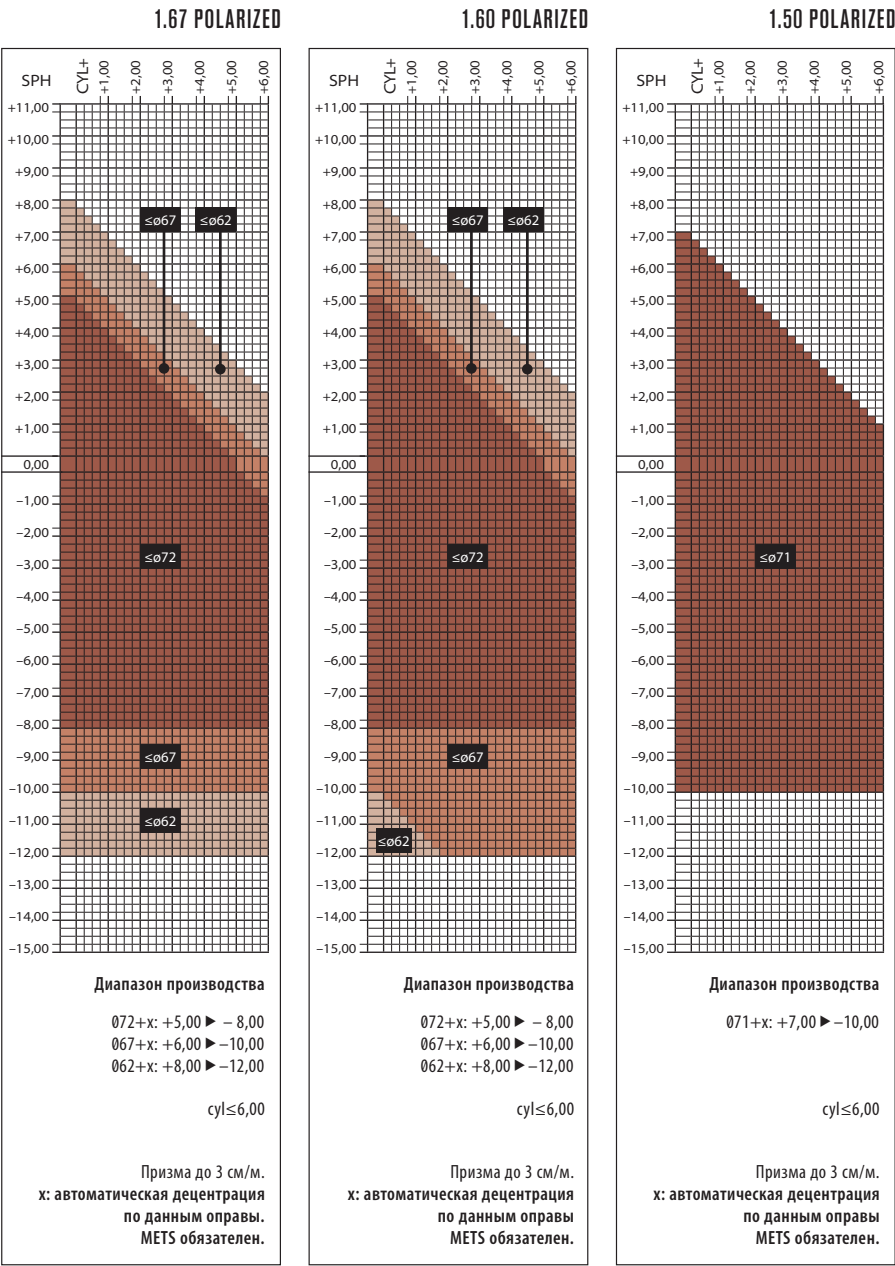


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED NULUX IDENTITY V+		NULUX IDENTITY V+ 1.67 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.60 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Brown Grey American Grey	NIDYPB NIDYPG NIDYPA	NID6PB NID6PG NID6PA	NID5PB NID5PG NID5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G3+G4	G4	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV	
[]			[]	[]	
Mirror silver / gold / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
		[]	[]	[]	
HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	

Sync III i Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 POLARIZED

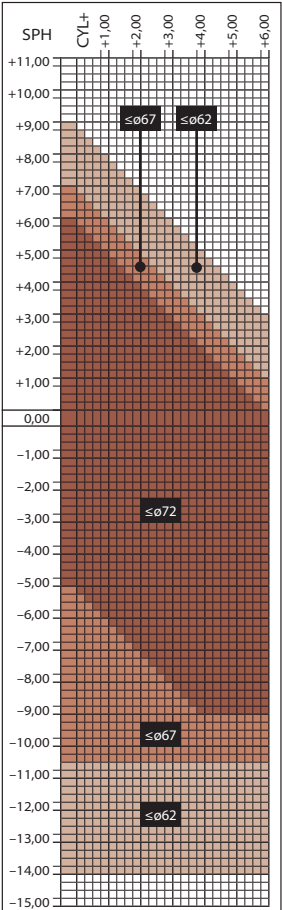


Диапазон производства

072+x: +6,00 ► - 5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.
x: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.60 POLARIZED

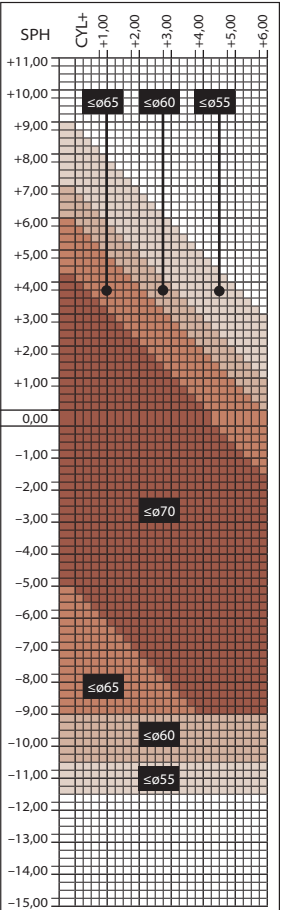


Диапазон производства

070+x: +4,25 ► - 5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.
x: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.53 POLARIZED

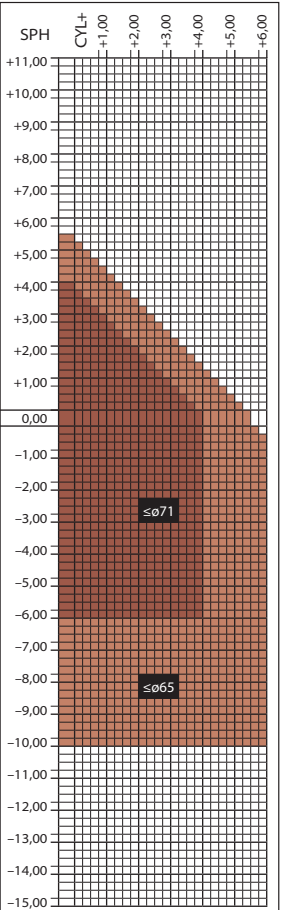


Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl≤4,00

065+x: +5,50 ► -10,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
x: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.50 POLARIZED

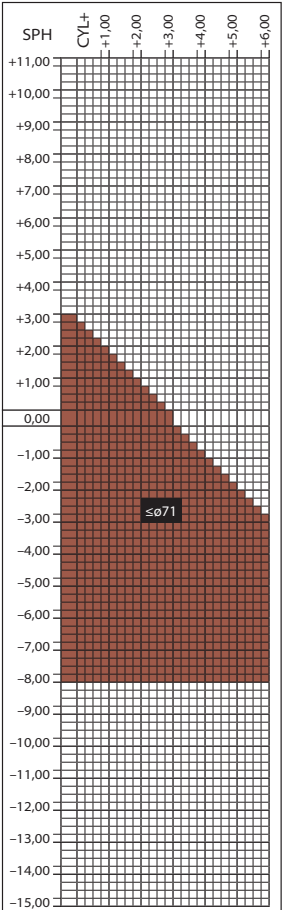

Диапазон производства

071+x: +3,00 ► -8,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
x: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		SYNC III	SYNC III i 1.67 POLARIZED	SYNC III i 1.60 POLARIZED	SYNC III i 1.53 POLARIZED	SYNC III i 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	SY5YPB SY5YPG SY5YPA	SY56PB SY56PG SY56PA	SY5XPB SY5XPG —	SY55PB SY55PG SY55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	SY9YPB SY9YPG SY9YPA	SY96PB SY96PG SY96PA	SY9XPB SY9XPG —	SY95PB SY95PG SY95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	SY13YPB SY13YPG SY13YPA	SY136PB SY136PG SY136PA	SY13XPB SY13XPG —	SY135PB SY135PG SY135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Sync III Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 POLARIZED

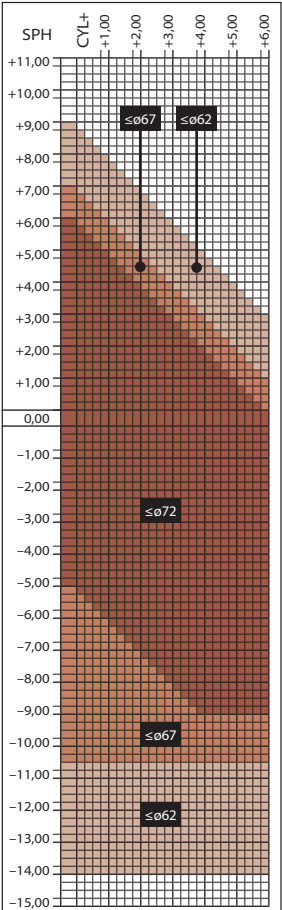


Диапазон производства

072+х: +6,00 ► – 5,00
067+х: +7,00 ► –10,50
062+х: +9,00 ► –14,00

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.60 POLARIZED

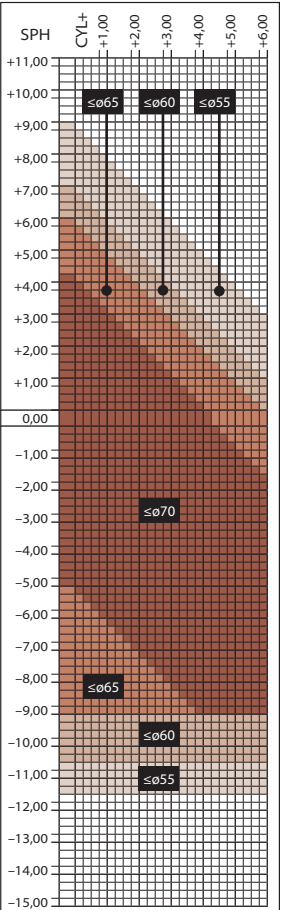


Диапазон производства

070+х: +4,25 ► – 5,00
065+х: +6,00 ► –9,00
060+х: +7,00 ► –10,50
055+х: +9,00 ► –11,50

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.53 POLARIZED

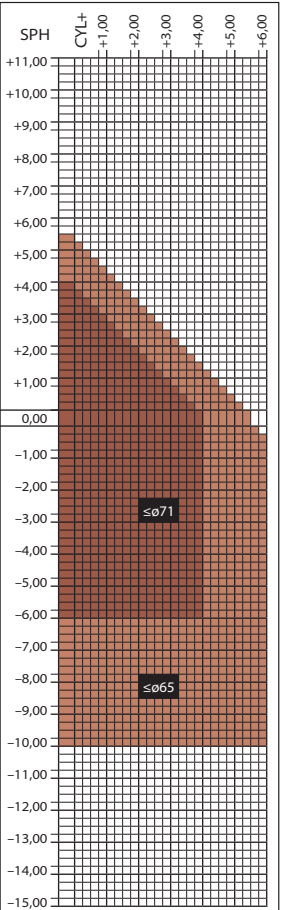


Диапазон производства

071+х: +4,00 ► –6,00
cyl≤4,00
065+х: +5,50 ► –10,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.50 POLARIZED

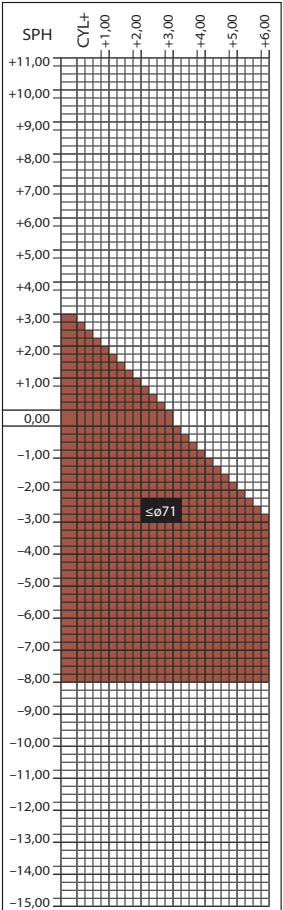

Диапазон производства

071+х: +3,00 ► –8,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		SYNC III	SYNC III 1.67 POLARIZED	SYNC III 1.60 POLARIZED	SYNC III 1.53 POLARIZED	SYNC III 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	S5YPB S5YPG S5YPA	S56PB S56PG S56PA	S5XPB S5XPG —	S55PB S55PG S55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	S9YPB S9YPG S9YPA	S96PB S96PG S96PA	S9XPB S9XPG —	S95PB S95PG S95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	S13YPB S13YPG S13YPA	S136PB S136PG S136PA	S13XPB S13XPG —	S135PB S135PG S135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Hilux TrueForm Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 TF POLARIZED

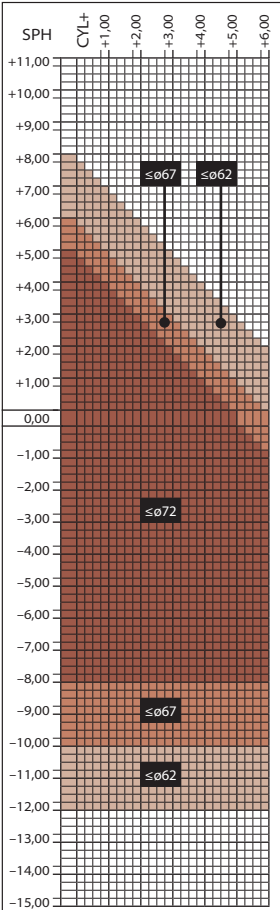


Диапазон производства

ø72+х: +5,00 ► - 8,00
ø67+х: +6,00 ► -10,00
ø62+х: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.

1.60 TF POLARIZED

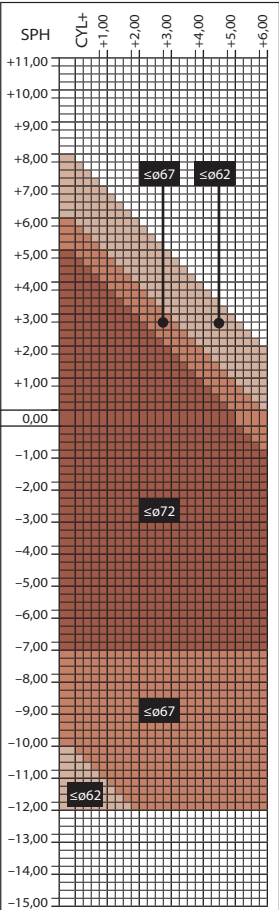


Диапазон производства

ø72+х: +5,00 ► - 7,00
ø67+х: +6,00 ► -10,00
ø62+х: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 5 см/м.

1.53 TF POLARIZED

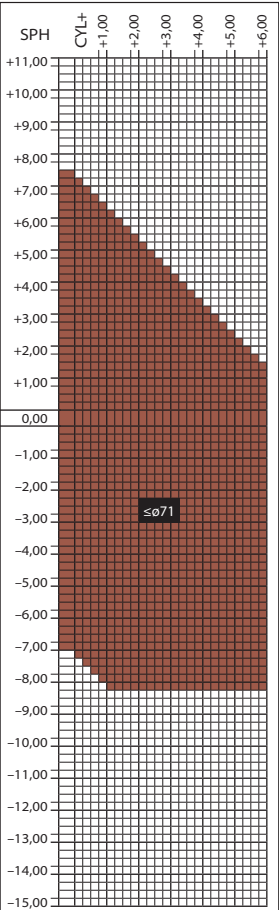


Диапазон производства

ø71+х: +7,50 ► -7,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.50 TF POLARIZED

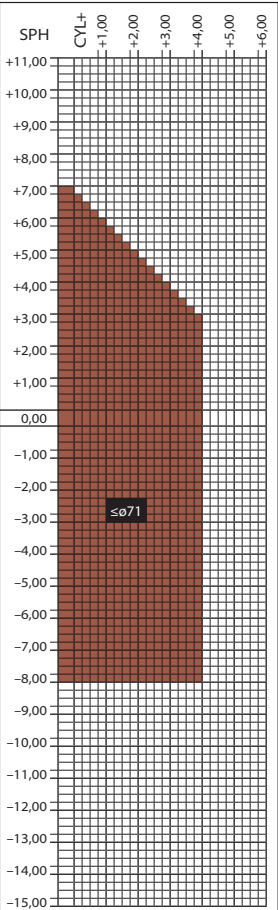

Диапазон производства

ø71+х: +7,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM

HOYA

POLARIZED

HILUX

TRUEFORM

HILUX TF 1.67
POLARIZED

HILUX TF 1.60
POLARIZED

HILUX TF 1.53
POLARIZED

HILUX TF 1.50
POLARIZED

КОД	Brown Grey American Grey	HTYPB HTYPG HTYPA	HT6PB HT6PG HT6PA	HTXPB HTXPG —	HT5PB HT5PG HT5PA
ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G3+G4	G3+G4	G4	
СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
HOYA MIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
	[]	[]	[]	[]	[]
	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
	[]	[]	[]	[]	[]
HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ
ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ

Hoyalux iD LifeStyle 4i Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16 мм

15 мм


14 мм

13 мм


12 мм

11 мм

АДДИЦИЯ

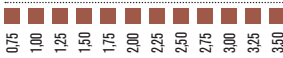

1.67 POLARIZED

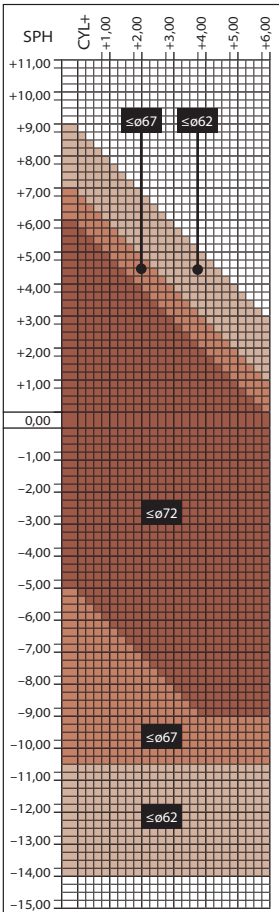

Диапазон производства

072+х: +6,00 ► - 5,00

067+х: +7,00 ► -10,50

062+х: +9,00 ► -14,00

cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.60 POLARIZED

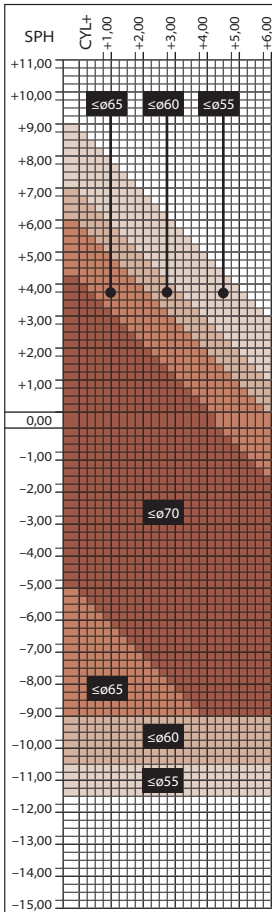

Диапазон производства

070+х: +4,25 ► - 5,00

065+х: +6,00 ► -9,00

060+х: +7,00 ► -10,50

055+х: +9,00 ► -11,50

cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.53 POLARIZED

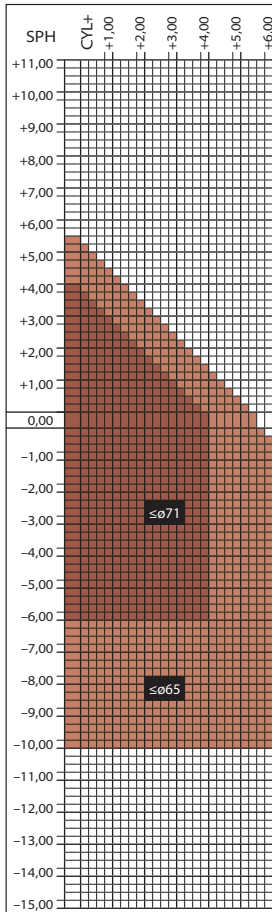

Диапазон производства

071+х: +4,00 ► -6,00

cyl ≤ 4,00

065+х: +5,50 ► -10,00

cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.50 POLARIZED

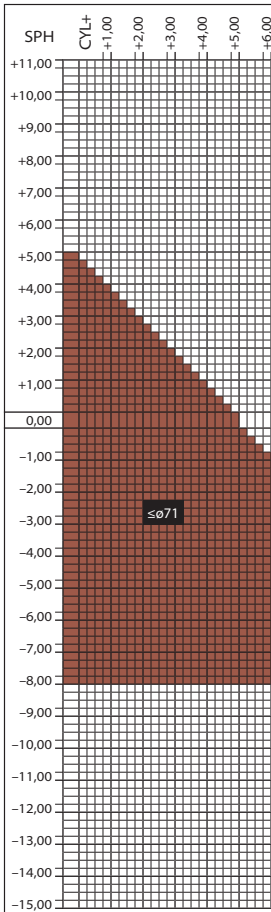

Диапазон производства

071+х: +5,00 ► -8,00

cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

Hoyalux iD LifeStyle 4i Polarized

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

			HOYALUX iD LIFESTYLE 4i 1.67 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4i 1.60 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4i 1.53 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4i 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД OUTDOOR	Brown Grey American Grey	4XOYPB 4XOYPG 4XOYPA	4XO6PB 4XO6PG 4XO6PA	4XOXPB 4XOXPB —	4XO5PB 4XO5PG 4XO5PA
	КОД URBAN	Brown Grey American Grey	4XUYPB 4XUYPG 4XUYPA	4XU6PB 4XU6PG 4XU6PA	4XUXPB 4XUXPG —	4XU5PB 4XU5PG 4XU5PA
	КОД INDOOR	Brown Grey American Grey	4XIYPB 4XIYPG 4XIYPA	4XI6PB 4XI6PG 4XI6PA	4XIXPB 4XIXPG —	4XI5PB 4XI5PG 4XI5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ					
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)		[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)		[]	[]	[]	[]
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ		Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Hoyalux iD LifeStyle 4 Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16 мм

15 мм


14 мм

13 мм

12 мм

11 мм

АДДИЦИЯ

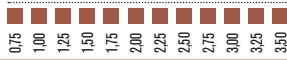


1.67 POLARIZED

1.60 POLARIZED

1.53 POLARIZED

1.50 POLARIZED

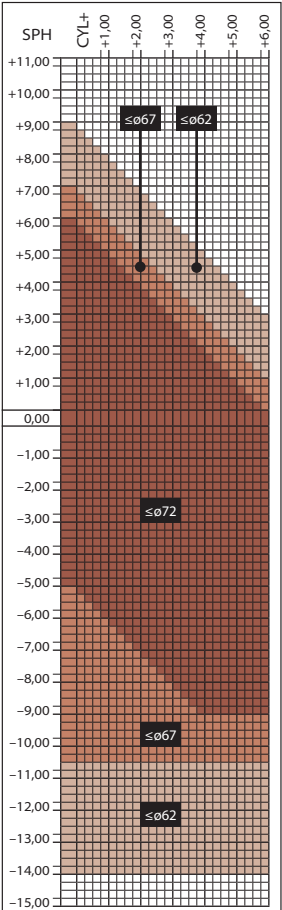

Диапазон производства

072+х: +6,00 ► - 5,00

067+х: +7,00 ► -10,50

062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

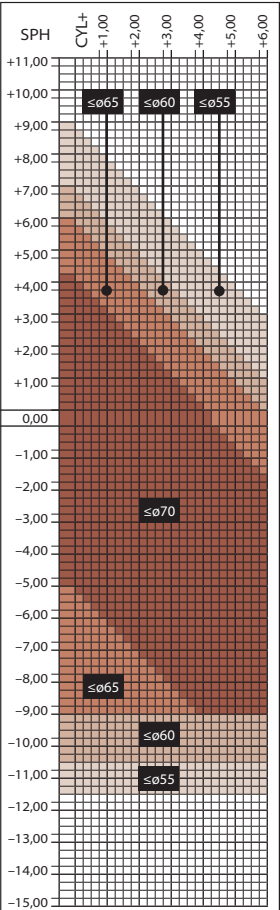

Диапазон производства

070+х: +4,25 ► - 5,00

065+х: +6,00 ► -9,00

060+х: +7,00 ► -10,50

055+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

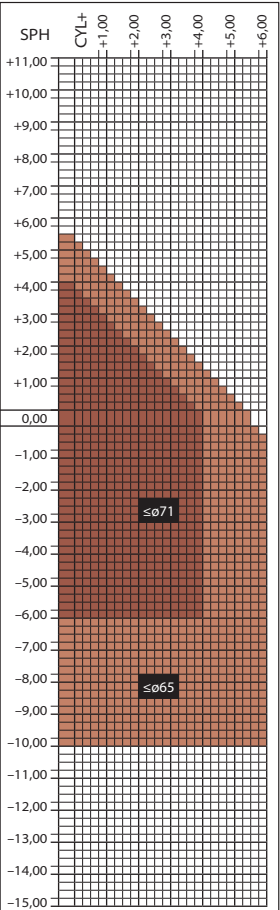

Диапазон производства

071+х: +4,00 ► -6,00

cyl≤4,00

065+х: +5,50 ► -10,00

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

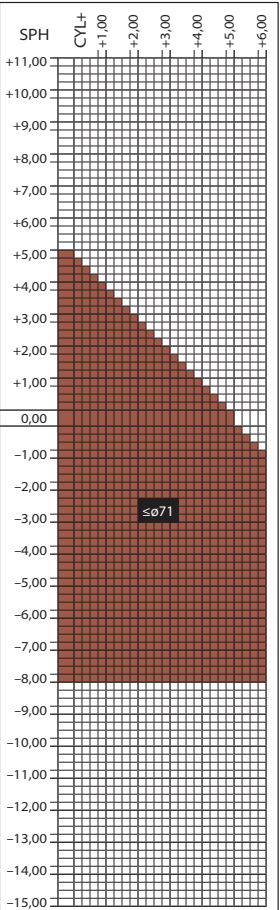

Диапазон производства

071+х: +5,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.


Hoyalux iD LifeStyle 4 Polarized

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED iD LIFESTYLE 4		HOYALUX iD LIFESTYLE 4 1.67 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4 1.60 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4 1.53 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 4 1.50 POLARIZED		
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД OUTDOOR	Brown Grey American Grey	4OYPB 4OYPG 4OYPA	4O6PB 4O6PG 4O6PA	4OXPB 4OXPG —	4O5PB 4O5PG 4O5PA	
	КОД URBAN	Brown Grey American Grey	4UYPB 4UYPG 4UYPA	4U6PB 4U6PG 4U6PA	4UXPB 4UXPG —	4U5PB 4U5PG 4U5PA	
	КОД INDOOR	Brown Grey American Grey	4IYPB 4IYPG 4IYPA	4I6PB 4I6PG 4I6PA	4IXPB 4IXPG —	4I5PB 4I5PG 4I5PA	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4	
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	Hi-Vision Meiryo (HVM)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
			[]	[]	[]	[]	
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
			[]	[]	[]	[]	
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	



1.67 POLARIZED

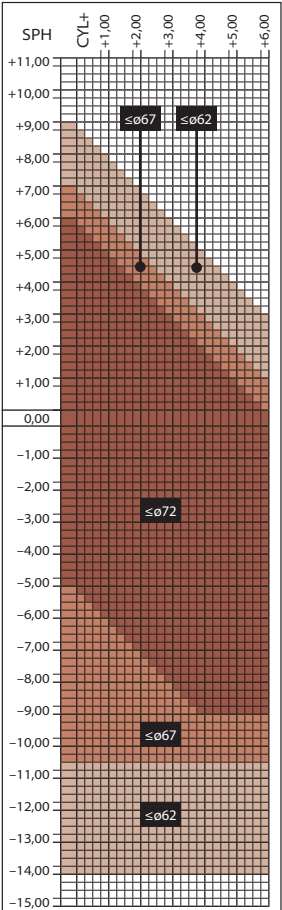

Диапазон производства


072+х: +6,00 ► - 5,00
067+х: +7,00 ► -10,50
062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED

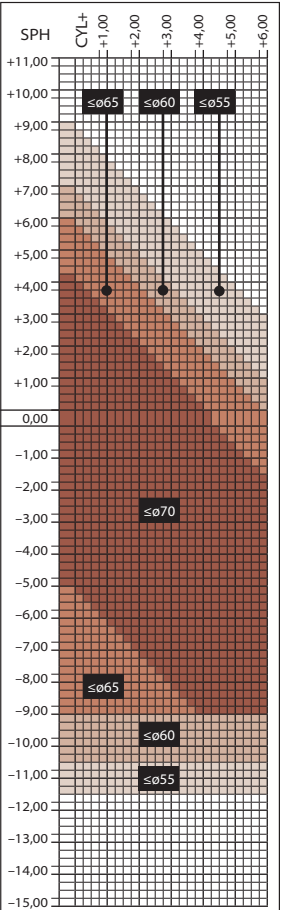

Диапазон производства


070+х: +4,25 ► - 5,00
065+х: +6,00 ► - 9,00
060+х: +7,00 ► -10,50
055+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED

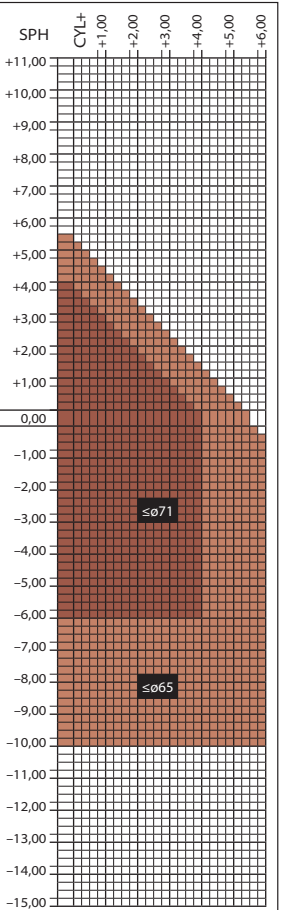

Диапазон производства


071+х: +4,00 ► - 6,00
cyl≤4,00

065+х: +5,50 ► -10,00
cyl≤6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED

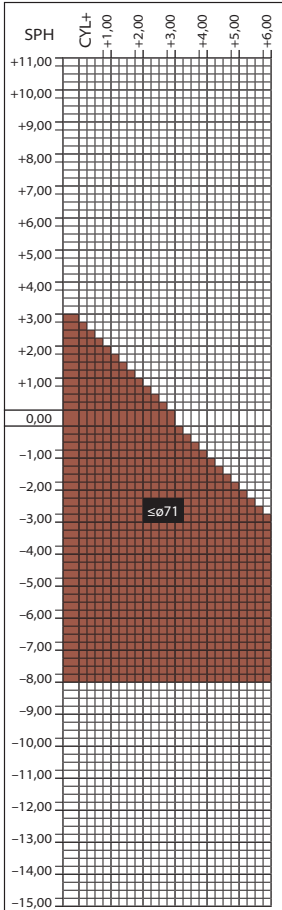

Диапазон производства

071+х: +3,00 ► - 8,00
cyl≤6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux Balansis Polarized

14 мм11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		BALANSIS	HOYALUX BALANSIS 1.67 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.60 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.53 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 ММ	Brown Grey American Grey	B4YPB B4YPG B4YPA	B46PB B46PG B46PA	B4XPB B4XPG —	B45PB B45PG B45PA
	КОД 11 ММ	Brown Grey American Grey	B1YPB B1YPG B1YPA	B16PB B16PG B16PA	B1XPB B1XPG —	B15PB B15PG B15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Daynamic Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED

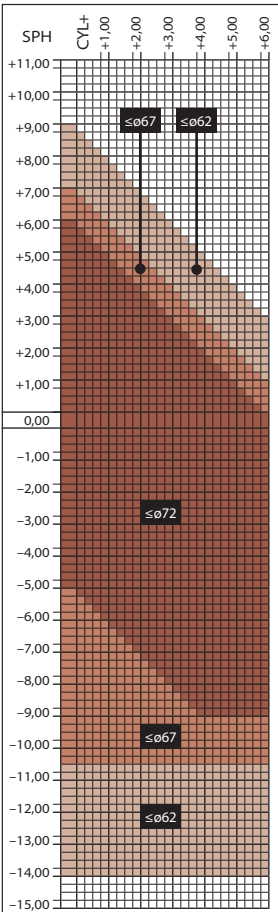

Диапазон производства


$\phi 72+x: +6,00 \rightarrow -5,00$
 $\phi 67+x: +7,00 \rightarrow -10,50$
 $\phi 62+x: +9,00 \rightarrow -14,00$

$cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED

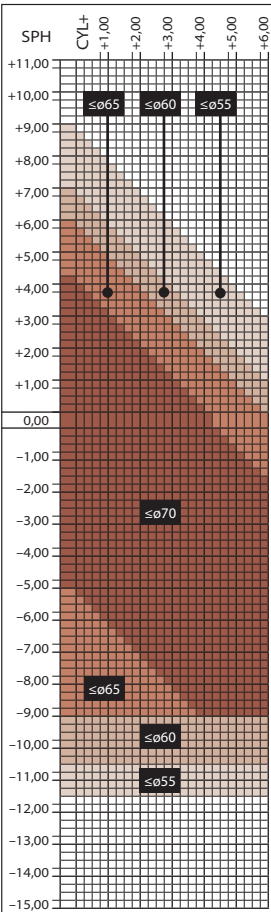

Диапазон производства


$\phi 70+x: +4,25 \rightarrow -5,00$
 $\phi 65+x: +6,00 \rightarrow -9,00$
 $\phi 60+x: +7,00 \rightarrow -10,50$
 $\phi 55+x: +9,00 \rightarrow -11,50$

$cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED

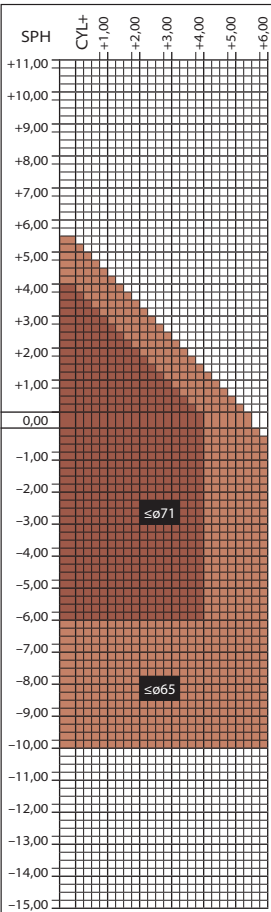

Диапазон производства


$\phi 71+x: +4,00 \rightarrow -6,00$
 $cyl \leq 4,00$

$\phi 65+x: +5,50 \rightarrow -10,00$
 $cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED

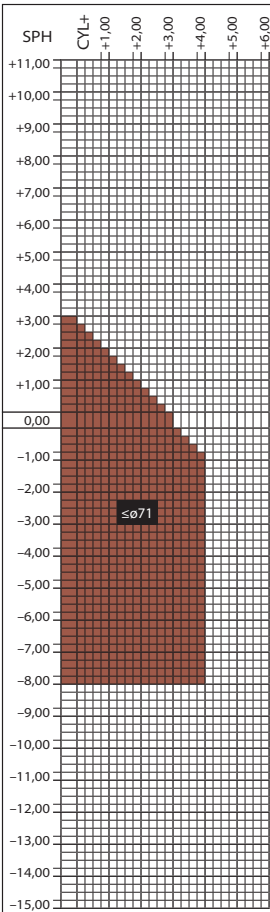

Диапазон производства

$\phi 71+x: +3,00 \rightarrow -8,00$
 $cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

14 мм11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED DAYNATIC		HOYALUX DAYNATIC 1.67 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.60 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.53 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 ММ	Brown Grey American Grey	D4YPB D4YPG D4YPA	D46PB D46PG D46PA	D4XPB D4XPG —	D45PB D45PG D45PA
	КОД 11 ММ	Brown Grey American Grey	D1YPB D1YPG D1YPA	D16PB D16PG D16PA	D1XPB D1XPG —	D15PB D15PG D15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR Light Mirror silver / blue / violet / copper Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
[]		[]	[]	[]		
КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB						
HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	


Hoyalux Amplitude Plus Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED

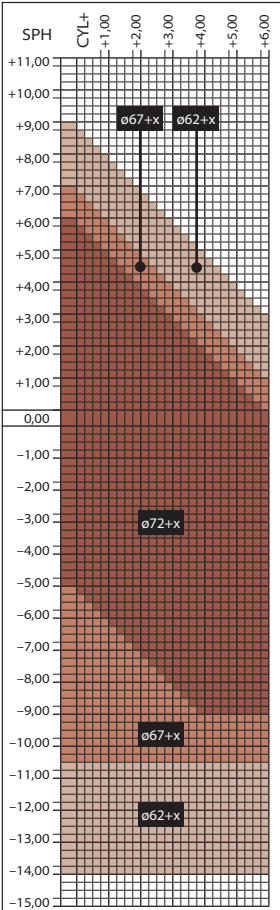

Диапазон производства

072+x: +6,00 ► - 5,00

067+x: +7,00 ► -10,50

062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED

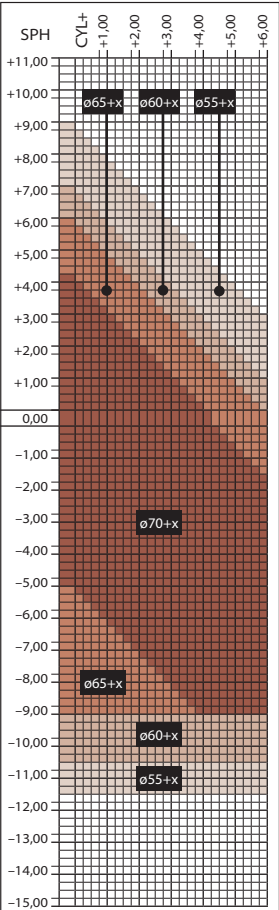

Диапазон производства

070+x: +4,25 ► - 5,00

065+x: +6,00 ► - 9,00

060+x: +7,00 ► -10,50

055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED

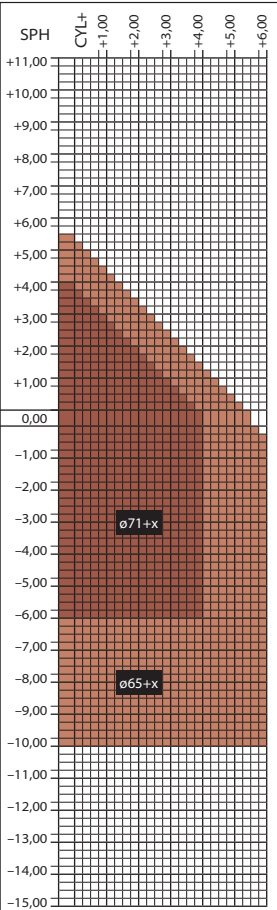

Диапазон производства

071+x: +4,00 ► - 6,00

cyl ≤ 4,00

065+x: +5,50 ► -10,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED

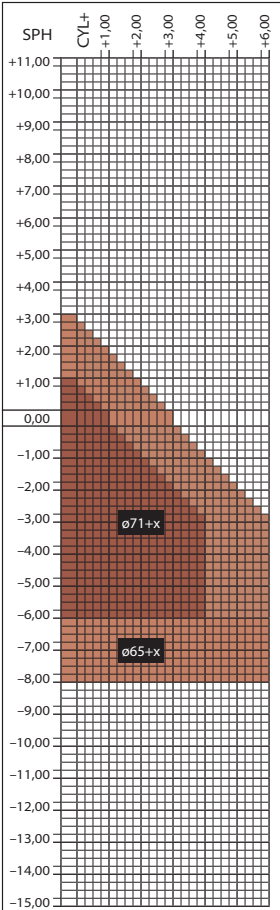

Диапазон производства

071+x: +1,00 ► - 6,00

cyl ≤ 4,00

065+x: +3,00 ► - 8,00

cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux Amplitude Plus Polarized

15 мм 11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		AMPLITUDE PLUS	HOYALUX AMPLITUDE PLUS 1.67 POLARIZED	HOYALUX AMPLITUDE PLUS 1.60 POLARIZED	HOYALUX AMPLITUDE PLUS 1.53 POLARIZED	HOYALUX AMPLITUDE PLUS 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 15 мм	Brown Grey American Grey	AP5YPB AP5YPG AP5YPA	AP56PB AP56PG AP56PA	AP5XPB AP5XPG —	AP55PB AP55PG AP55PA
	КОД 11 мм	Brown Grey American Grey	AP1YPG AP1YPG AP1YPA	AP16PB AP16PG AP16PA	AP1XPB AP1XPB —	AP15PB AP15PG AP15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G2+G4	G1+G2+G4	G1+G2+G4	G1+G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision Meiryo (HVM)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ	HOYA MIRROR	Light Mirror silver / blue / violet / copper	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror silver / gold / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Для заметок



Отражение вашего стиля

Зеркальные покрытия HOYA Mirror помогают создать сияющий запоминающийся образ, который обязательно понравится вашим клиентам, неравнодушным к моде!

Зеркальное покрытие HOYA Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ MIRROR

Зеркальное покрытие HOYA Mirror может быть заказано в сочетании:

– с окрашиванием в цвета Spectrum Tints:

- **Maroon B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Granite B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Green B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **American Gray C** (75 %) и D (85 %);

– с поляризационными линзами.



Blue Mirror



Silver Mirror



Gold Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ LIGHT MIRROR

Зеркальное покрытие HOYA Light Mirror может быть заказано в сочетании:

– с Sensity Dark (такая комбинация называется Sensity Shine):

- **Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver;**
- **Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper;**
- **Sensity Dark Green + Mirror Light Blue;**

– с поляризационными линзами (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий);

– с градиентным окрашиванием из палитры Spectrum Tints (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий) на цвета:

- **Maroon C/A** (75/15%) и D/A (85/15%);
- **Granite C/A** (75/15%), C (75/0%) и D/A (85/15%);
- **Green C** (75/0%).



Blue
Light Mirror



Silver
Light Mirror




Copper
Light Mirror



Violet
Light Mirror

ВНИМАНИЕ! Все линзы с зеркальными покрытиями Mirror и Light Mirror всегда поставляются с просветляющим покрытием по задней поверхности (SHNB).

ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

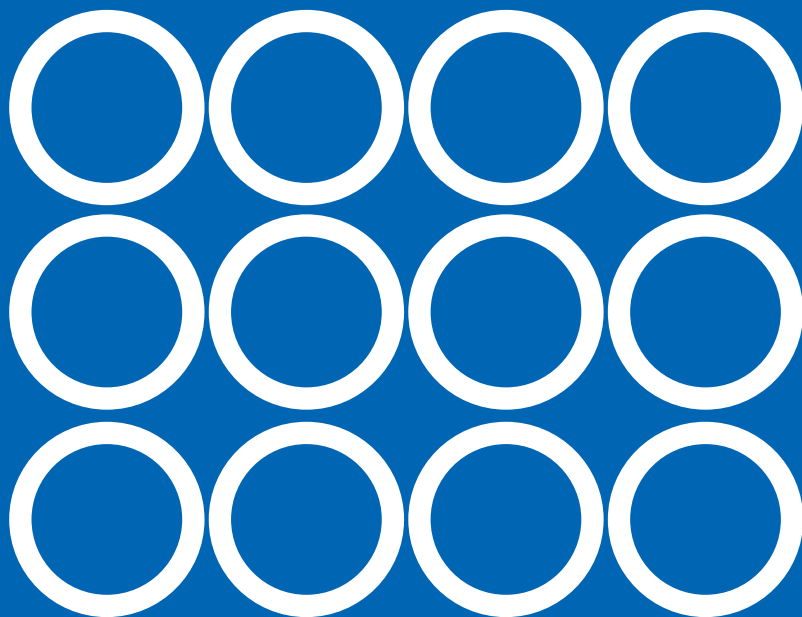


HOYA

Окрашивание


SPECTRUM TINTS



СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

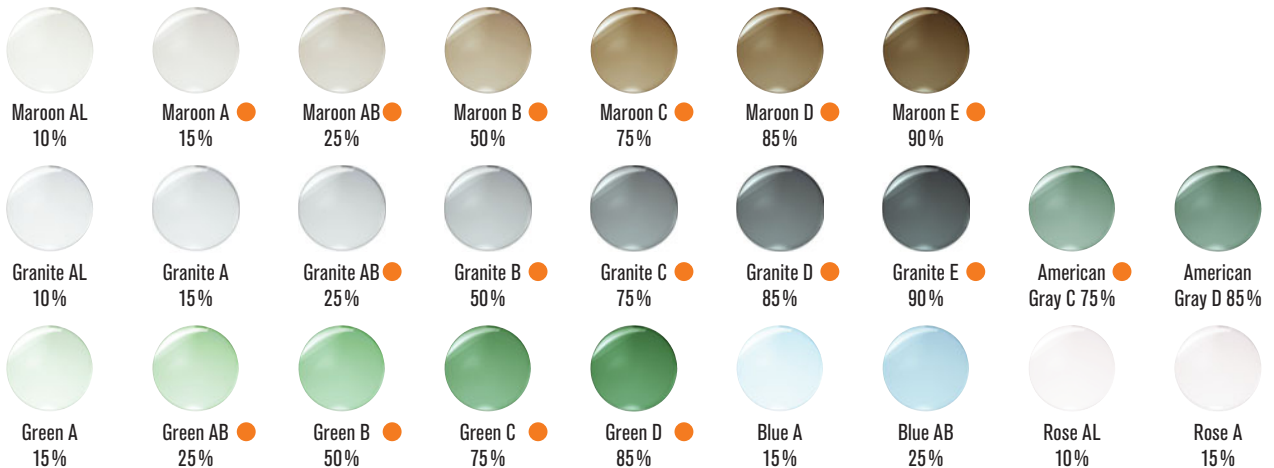

ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

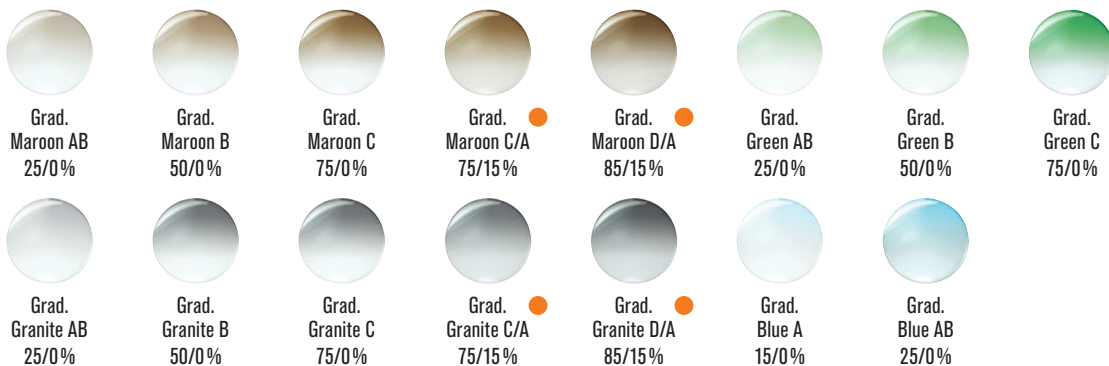

● Доступно в сочетании с опцией UV400.

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 184 и возможные ограничения на стр. 185–186.

Окрашивание

SPORT, OFFICE И E40



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT


Модное и функциональное окрашивание в цвета Special Tints Sport повышает контрастность зрения и позволяет отчетливо видеть мелкие детали даже при плохой освещенности.

Sport Orange
43 %Sport Copper
65 %Sport Yellow
15 %Sport Brown
85 %Sport Purple
77 %Sport Green
63 %


Окрашивание Sport автоматически предоставляет УФ-защиту для линз из материала 1.50.

При окрашивании линз из материала 1.50 в цвета Sport Orange и Purple допускается отклонение цветового тона от образца.

Важно! Интенсивность затемнения линз, окрашенных в цвета Sport, может отличаться от указанных.

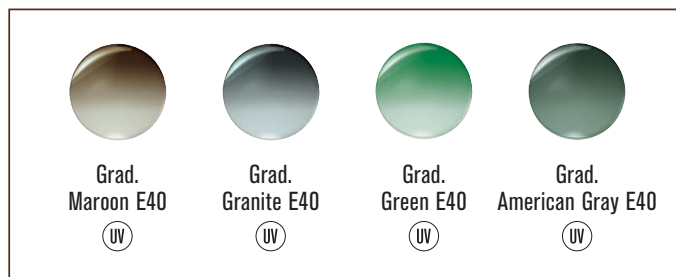

Special Tints	Погода	Виды спорта
Зеленый		
Оранжевый		
Желтый		
Медный		
Коричневый		
Фиолетовый		

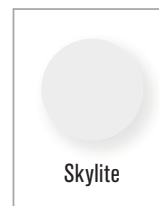

Skylite



Office Green

Office Brown



ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Градиентные окрашивания E40 (90/40 %)

Не предназначено для вождения (см. стр. 185).
Проверяйте доступность на стр. 184.

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 184 и возможные ограничения на стр. 185–186.

Окрашивание

SPECIAL И FASHION

TINTS

SPECIAL

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

					
Lava 60 %	Orange 30 %	Lemon 15 %	Mauve 40 %	Iceblue 30 %	Lilac 40 %
					
Grad. Lava 60/0 %	Grad. Orange 30/0 %	Grad. Lemon 15/0 %	Grad. Mauve 40/0 %	Grad. Iceblue 30/0 %	Grad. Lilac 40/0 %




TINTS

FASHION

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

				
Rose A 15 %	Violet A 15 %	Marin A 15 %	Amethyst A 15 %	Purple A 15 %
				
Rose AL 10 %	Violet AL 10 %	Marin AL 10 %	Amethyst AL 10 %	Purple AL 10 %

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.
Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 184 и возможные ограничения на стр. 185-186.

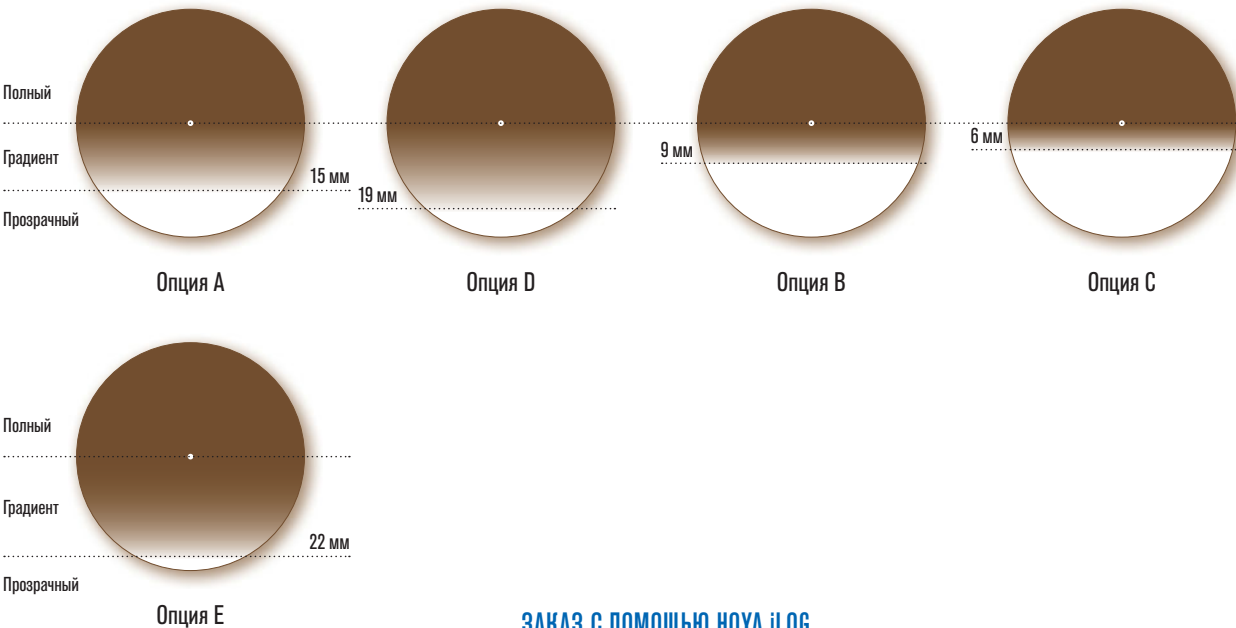

Вы можете выбрать наш специальный градиент для оправ с большим или маленьким световым проемом – размер В. Это значит, что можно выбрать наилучший градиент, основываясь на размере оправы по вертикали.

Опции градиента А, D и Е – наилучший выбор для оправ с большим световым проемом, в то время как опции В и С – лучший выбор для узких оправ. Градиент Е особенно рекомендуется для крупных оправ и солнцезащитных очков.


Вы можете выбрать нужную длину градиента из 5 предлагаемых вариантов (опции А, В, С, D и Е).

ВАЖНО!


Плотность цвета при градиентном окрашивании сохраняется на протяжении 10 мм выше оптического центра.

Подробная информация о категориях ISO для вождения находится на стр. 185-186. Из-за более короткой части градиента фактический номер категории может быть меньше.

ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ NOVA iLOG

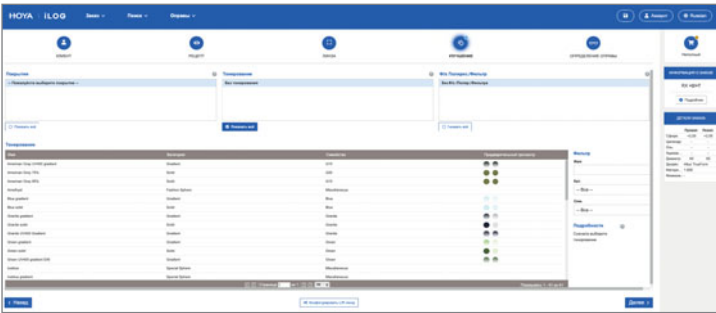

Шаг 1	Откройте окно ОКРАШЕННЫЕ ЛИНЗЫ и выберите желаемый оттенок в поле ЦВЕТА . Например, Grad. Granite C .
Шаг 2	Выберите подходящую для вашей оправы (по размеру В) опцию градиента и укажите её в поле ДЕТАЛИ . Например, D: 19 мм .

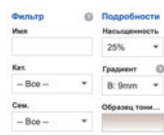

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НОУА

EYVIA 1/4		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Skylite				✓									

EYNOA 1/7		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✗									
	Skylite				✓									
	E40**				✗							✓		

EYAS 2.0 1/80		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints*				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown*				✓									
	E40**				✗							✓		

PNX 1/23		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	E40**				✗							✓		

ПОЛИМЕР 1/30		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints*				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown*				✓									
	UV400 (для Maroon A)				✓									
	E40**				✗							✓		



Линзы EnRoute невозможно заказать с какими-либо окрашиваниями.

*** Ограничения для материалов Eyas 2.0 1.60 и Полимер 1.50**
Линзы Hoyalux iD WorkStyle 3 и все линзы EyeGenius недоступны для заказа с окрашиваниями Special Tints и Office.

**** Ограничение для окрашивания E40**
Градиентное окрашивание E40 невозможно на линзах для высоких рефракций и бифокальных. Срок поставки – 10 рабочих дней.

Ограничение для материала PNX 1.53
Линзы дизайна Sportive недоступны для заказа с интенсивностью окрашивания D и E (полное окрашивание), а также с градиентным окрашиванием C/A и D/A (для Maroon A).

Ограничения для материала Полимер 1.50 UV 400 с покрытием Hi-Vision Meiryo
Окрашивание для данных линз недоступно.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НОУА

Ограничения

TINTS SPECTRUM	СПЛОШНОЕ	Maroon							Granite							Green					Blue		Rose		Am. Gray			
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	A (15%)	AB (25%)	AL (10%)	A (15%)	C (75%)	D (85%)		
Категория		0	0	1	2	2	3	4	0	0	1	1	2	3	4	1	1	1	2	3	0	1	0	0	2	3		
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Для ночного вождения		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗		

TINTS SPECTRUM	ГРАДИЕНТНОЕ	Maroon					Granite					Green			Blue	
		AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	A (15/0%)	AB (25/0%)
Категория		1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	0	1
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

TINTS SPECIAL	СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		Sport Orange	Sport Yellow	Sport Green	Sport Copper	Sport Brown	Sport Purple
Категория		1	0	2	2	3	2
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения		✗	✓	✗	✗	✗	✗

TINTS OFFICE	ОКРАШИВАНИЕ OFFICE	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ		
		Office Green	Office Brown	Skylite
Категория		0	0	0
Для вождения		✓	✓	✓
Для ночного вождения		✓	✓	✓

TINTS E40	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ			
	Maroon	Granite	Green	Am. Gray
Категория	4	4	4	4
Для вождения	✗	✗	✗	✗
Для ночного вождения	✗	✗	✗	✗

TINTS FASHION	СПЛОШНОЕ	Rose		Violet		Marin		Amethyst		Purple	
		AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)
Категория		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TINTS SPECIAL	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	2	1	0	1	1	1
Для вождения	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✗	✓	✗	✗	✗

TINTS SPECIAL	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	1	0	0	1	0	1
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✓	✓	✗	✓	✗

Ограничения

NOVA MIRROR СПЛОШНОЕ	Mirror Blue						Mirror Silver						Mirror Gold					
	Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey	
	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)
Категория	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NOVA MIRROR LIGHT MIRROR	Light Mirror Blue / Light Mirror Silver/ Light Mirror Copper/ Light Mirror Violet					
	Maroon gradient			Granite gradient		
	C/A (75/15%)		D/A (85/15%)	C/A (75/15%)		C (75/0%)
Категория	2		3	2		2
Для вождения	✓		✓	✓		✓
Для ночного вождения	✗		✗	✗		✗

NOVA POLARIZED	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ		
	Brown	Gray	American Grey
Категория	3	3	3
Для вождения	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✗	✗

DRIVEWEAR
2/3
✓
✗

SENSITY 2 линзы, чувствительные к свету ● ● ● ●	ФОТОХРОМ		КАТЕГОРИЯ
	SENSITY 2	Brown/Green/Grey/Blue	0/3
	SENSITY DARK	Brown/Green/Grey	0/3
	SENSITY SHINE	Brown/Green/Grey	0/3
	В колонке «Категория» первое значение для линзы в неактивированном состоянии, второе – для линзы в активированном (затемненном) состоянии.		

ВНИМАНИЕ! При обработке по контуру линз с фотохромным слоем Sensity всех типов и поколений необходимо снимать фаску по передней и задней поверхности линзы.



На рецептурных линзах HOYA вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Гравировка

Однофокальные линзы		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Nulux iDentity V+*		Ni7	Ni5	Ni3		Ni1	Ni1L
SYNC III i	5	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1	SYi1L
	9						
	13						
SYNC III	5	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1	SY1L
	9						
	13						
Nulux TrueForm		(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF
Hilux TrueForm			(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF
Офисные линзы		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Hoyalux iD WorkStyle 3 xx – длина коридора прогрессии в мм (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	C=Close	WS37 Cxx	WS35 Cxx	WS33 Cxx	WS3X Cxx	WS31 Cxx	WS31L Cxx
	S=Screen	WS37 Sxx	WS35 Sxx	WS33 Sxx	WS3X Sxx	WS31 Sxx	WS31L Sxx
	P=Space	WS37 Pxx	WS35 Pxx	WS33 Pxx	WS3X Pxx	WS31 Pxx	WS31L Pxx
Hoyalux WorkStyle Business xx – длина коридора прогрессии в мм (20, 23)	400	WSB7 xx	WSB5 xx	WSB3 xx	WSBX xx	WSB1 xx	WSB1L xx
	200	WSB7 2xx	WSB5 2xx	WSB3 2xx	WSBX 2xx	WSB1 2xx	WSB1L 2xx
Hoyalux WorkSmart Room	400	DT7	DT5	DT3	DTX	DT1	DT1L
	200	DT7 2	DT5 2	DT3 2	DTX 2	DT1 2	DT1L 2
SUPEREADER	A		DL5 7	DL3 7		DL1 7	DL1L 7
	B		DL5 15	DL3 15		DL3 15	DL3L 15
Прогрессивные линзы по технологии FreeForm		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Hoyalux iD MySelf = MY	16 мм	67	65	63	6X	61	61L
	15 мм	57	55	53	5X	51	51L
	14 мм	47	45	43	4X	41	41L
Hoyalux iD MySelf Profile = MYP	13 мм	37	35	33	3X	31	31L
	12 мм	27	25	23	2X	21	21L
	11 мм	17	15	13	1X	11	11L
Темпоральная гравировка (только MySelf Profile)		Stable = S, Detail = D, Adventure = A, Expert = E, Modern = M					

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Версия EyeGenius линз Nulux iDentity V+ дополнена символами EG выше круга назальной гравировки.

Гравировка



На рецептурных линзах HOYA вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Hoyalux iD LifeStyle 4 = LS Hoyalux iD LifeStyle 4i = LSI	O=Outdoor U=Urban I=Indoor	16 мм	67	65	63	6X	61	61L
		15 мм	57	55	53	5X	51	51L
		14 мм	47	45	43	4X	41	41
		13 мм	37	35	33	3X	31	31
		12 мм	27	25	23	2X	21	21
		11 мм	17	15	13	1X	11	11
Hoyalux Balansis		14 мм	B47	B45	B43	B4X	B41	B41L
		11 мм	B17	B15	B13	B1X	B11	B11L
Hoyalux Daynamic		14 мм		DP45	DP43	DP4X	DP41	DP41L
		11 мм		DP15	DP13	DP1X	DP11	DP11L
Hoyalux Amplitude Plus		15 мм		DA55	DA53	DA5X	DA51	DA51L
		11 мм		DA15	DA13	DA1X	DA11	DA11L
Прогрессивные линзы для вождения EnRoute				1.67	1.60			
EnRoute Progressive				R55V	R53V			
EnRoute Progressive Pro				RP55V	RP53V			
Линзы Sportive по технологии TrueForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Nulux Sportive TrueForm (однофокальные)					SA3	SAX	SA1	SA1
Hoyalux Sportive TrueForm (прогрессивные)					Fa43	Fa4X	Fa41	Fa41
Бифокальные линзы по технологии TrueForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
C28 TrueForm					(-) 6 TF		(-) 5 TF	
S28 TrueForm							(-) 5 TF	

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Гравировки на бесцветных и поляризационных прогрессивных линзах Amplitude Plus совпадают, но дополнены символами PZ выше круга назальной гравировки.

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
NULUX TRUEFORM	Eyvia 1.74	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
HILUX TRUEFORM	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	STAR 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	Lenticular 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
HOVALUX WORKSMART ROOM	Eyvia 1.74	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
SUPEREADER	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗

Специальные
опции

Специальные опции

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
AMPLITUDE PLUS 15 мм	Ey노a 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
AMPLITUDE PLUS 11 мм	Ey노a 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗

Поляризационные и спортивные солнцезащитные линзы

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Drivewear	✗	✓	✓	50 мм	✓	✓
ПРОГРЕССИВНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗

Бифокальные линзы

C 28 TRUEFORM	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗
S 28 TRUEFORM	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗

МАРКИРОВКА CE

Вся продукция в этом каталоге соответствует базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE.

Соответствие продукции подтверждается маркировкой CE, которую можно найти на этикетке каждой поставляемой линзы.

В соответствии с законодательством, базовые требования – предоставление покупателям исчерпывающей информации и их защита. Все продукты, соответствующие директиве, могут свободно перемещаться по всему Европейскому союзу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оптические характеристики нашей продукции соответствуют базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE и отвечают требованиям следующих стандартов:

ISO 8980-1/2/3/4;

ISO 10322-1/2;

ISO 14889.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Обратите свое внимание на таблицу на предыдущих страницах, с помощью которой вы можете сообщить клиентам об ограничениях линз, особенно в случае использования линз во время вождения.

Например, поглощение УФ-лучей покрытием UV400 (Maroon A) определяется с помощью источника света, описанного в норме D65 (обычный солнечный свет). В случае иного использования, например, при занятиях альпинизмом, сварке и т. д. необходимо рекомендовать средства индивидуальной защиты.

По запросу возможно заказать специальные линзы по нестандартным рецептам, нестандартной толщины или нестандартного цвета. Мы сообщим вам, какие данные необходимо предоставить в процессе заказа. В директиве ЕС указано, что недопустимо использовать какие-либо покрытия, кроме производимых нами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями директивы мы отслеживаем возможные неблагоприятные последствия для здоровья, которые могут быть вызваны нашими продуктами, чтобы не допустить подобных последствий в будущем. Мы учтем их в процессе будущих разработок, поэтому просим сообщить о любых проблемах со здоровьем, вызванных любым из наших продуктов.

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ


Испытания на соответствие были выполнены в отношении всей нашей продукции, поэтому мы заявляем, что берем на себя ответственность за соответствие всех наших продуктов, которые поставляются на рынок.

Для заметок



Blank lined area for notes.

Нормативы ЕС

ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

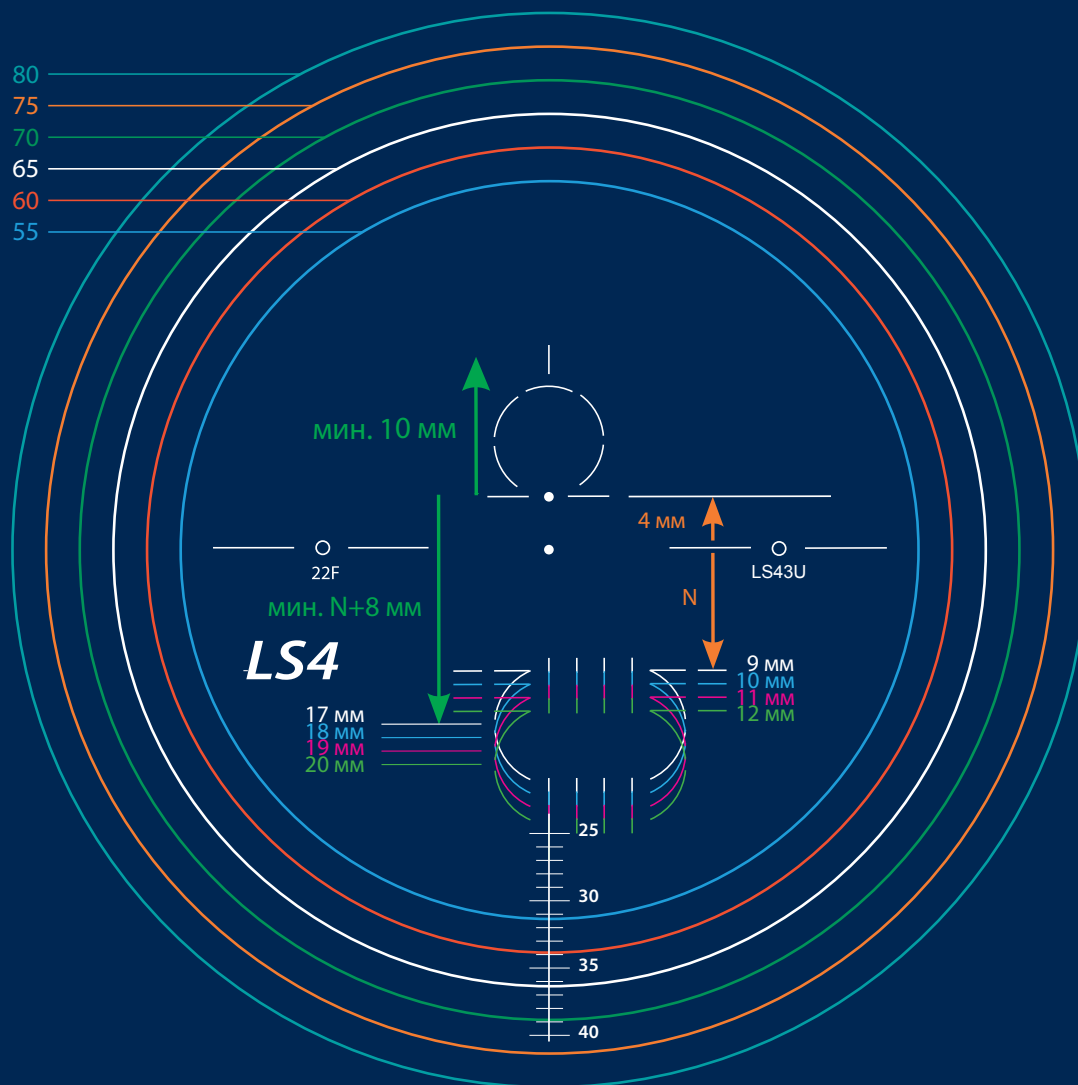

HOYA

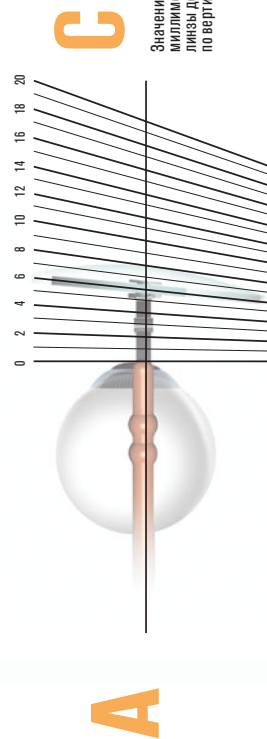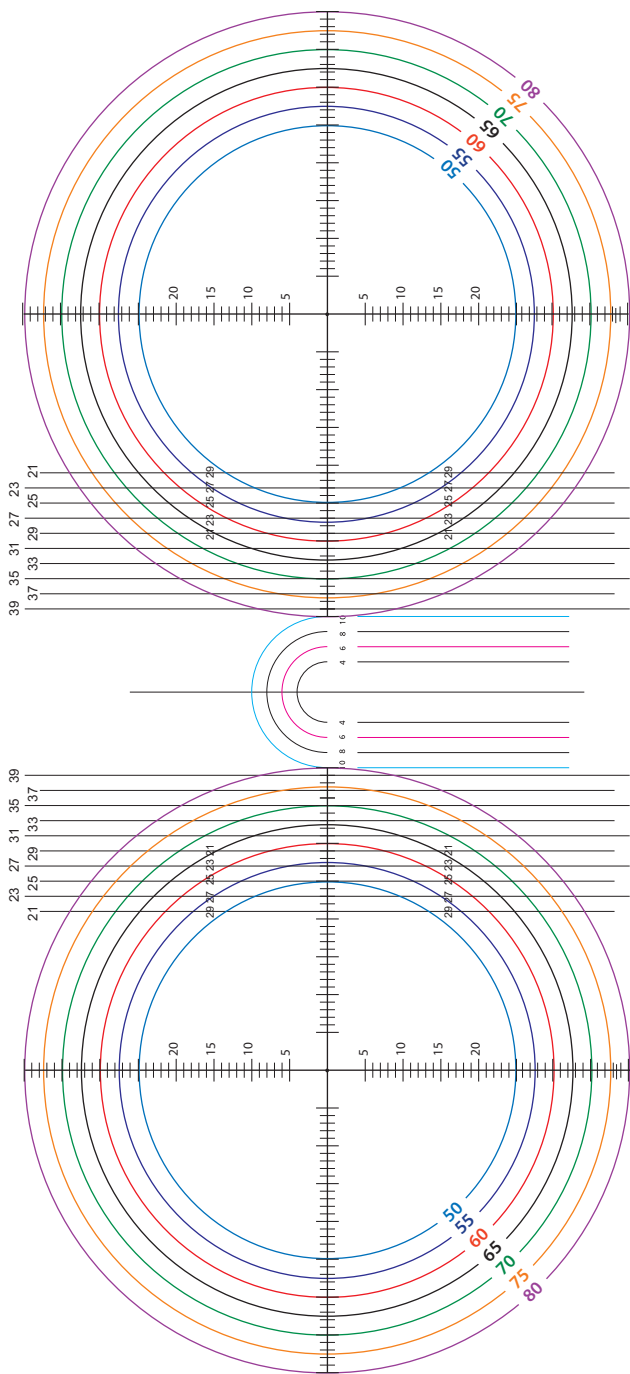

Значение C определяет на сколько миллиметров оптический центр линзы должен быть децентрирован по вертикали от центра зрачка.

Вертикальная децентрация оптического центра на примере линз Nulux.




A 12 мм	B 12 мм	C (мм)	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
			2.2	2.6	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1
			2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.3	8.8	9.3	9.8
A 14 мм	B 14 мм	C (мм)	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
			2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.3	8.8	9.3	9.8
			2.5	3.0	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3	8.9	9.4	10.0	10.6
A 16 мм	B 16 мм	C (мм)	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
			2.5	3.0	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3	8.9	9.4	10.0	10.6
			2.5	3.0	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3	8.9	9.4	10.0	10.6

NULUX

IDENTITY V+

Материал	Еуvia 1.74	Еуnoa 1.67	Еуas 2.0 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка	Ni7	Ni5	Ni3	Ni1	Ni1L


* Линзы NLiDV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG, а также тampoпeчaть NLiDV+ EG.

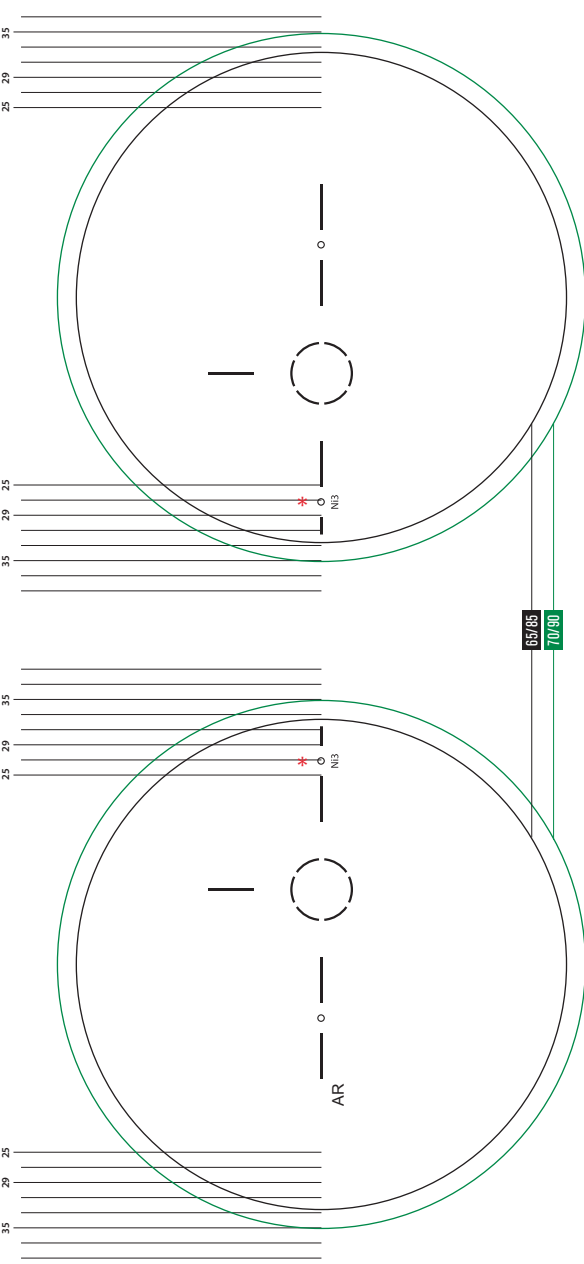

SYNC

III

Материал	Еуvia 1.74	Еуnoa 1.67	Еуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка Sync III i	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1	SYi1L
Гравировка Sync III	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1	SY1L




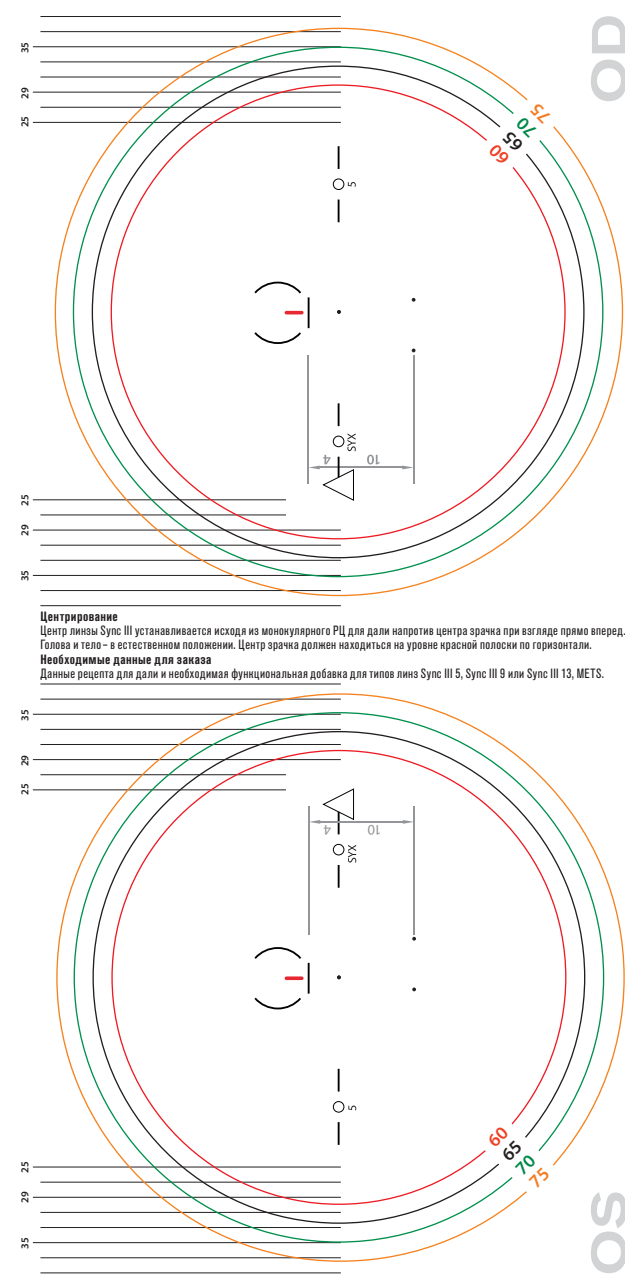


Центрирование
 Центр линзы Sync III устанавливается исходя из монокулярного РЦ для дали напротив центра зрачка при взгляде прямо вперед. Голова и тело - в естественном положении. Центр зрачка должен находиться на уровне красной полоски по горизонтали.
Необходимые данные для заказа
 Данные рецепта для дали и необходимая функциональная добавка для типов линз Sync III 5, Sync III 9 или Sync III 13, METS.

18–20 мм

Способ подбора аддитации (например, Add. 2.25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2.25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2.25; 22W = фороптер Add. 2.25 или суммарная линза в пробной оправе.



Дизайн: C = Close, S = Screen, P = Space
C20 = Дизайн + длина коридора прогрессии

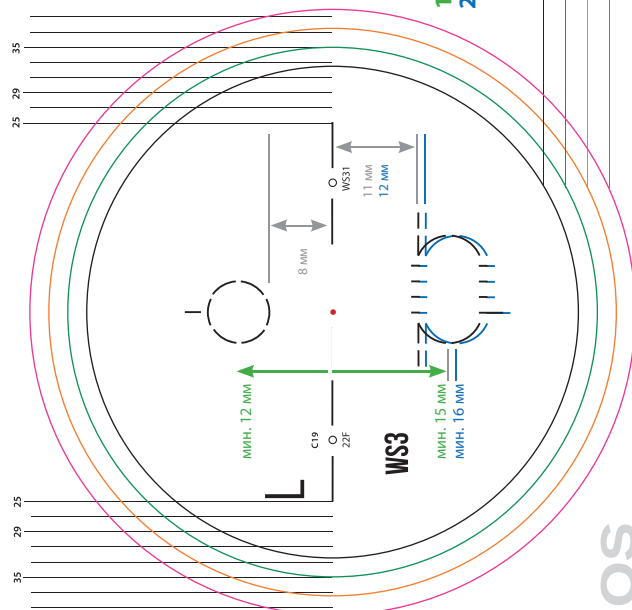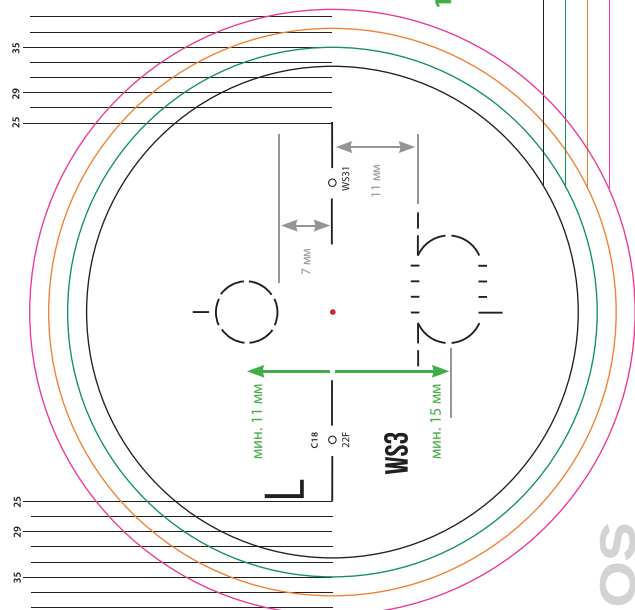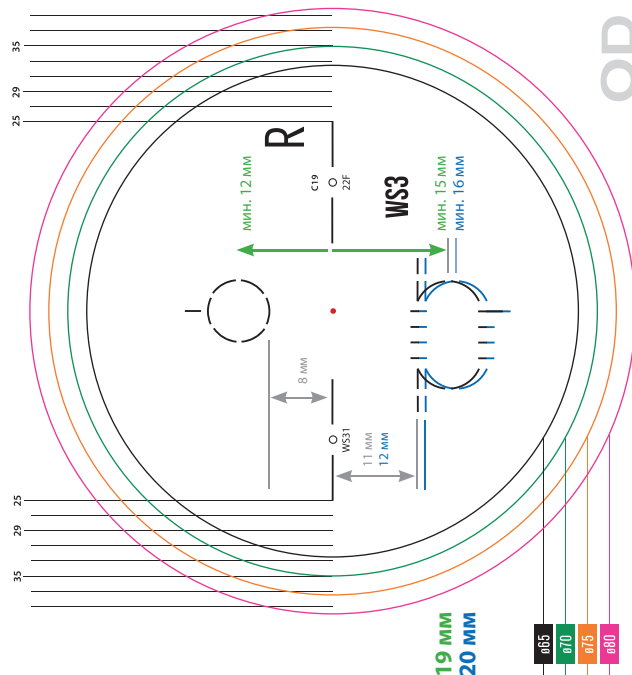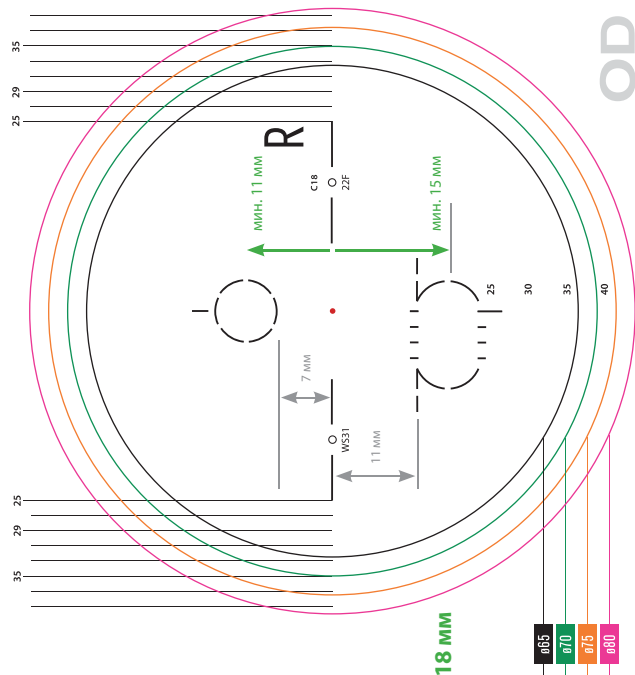

21-24 мм

Материал	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400	Close - коридор прогрессии 20 мм	Screen - коридор прогрессии 20 мм	Space - коридор прогрессии 20 мм
Гравировка	WS37	WS35	WS33	WS3X	WS31	WS31L	C20	S20	P20

Способ подбора аддитации (например, Add. 2.25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2.25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2.25; 22W = фороптер Add. 2.25 или суммарная линза в пробной оправе.

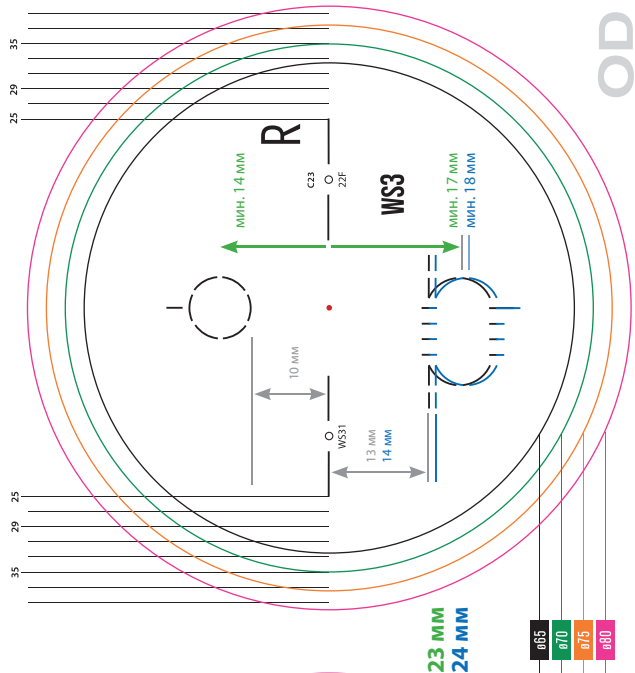
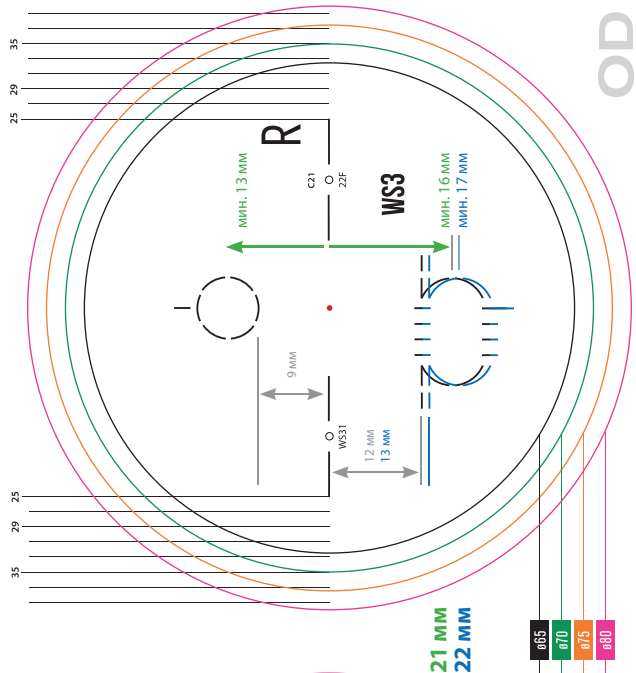


23/20 мм


Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка	WSB7	WSB5	WSB3	WSBX	WSB1	WSB1L

Тип 400 - коридор прогрессии 20 мм	Тип 200 - коридор прогрессии 20 мм
20	220


Способ подбора аддитации (например, Add. 2.25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2.25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2.25 или суммарная линза в пробной оправе.

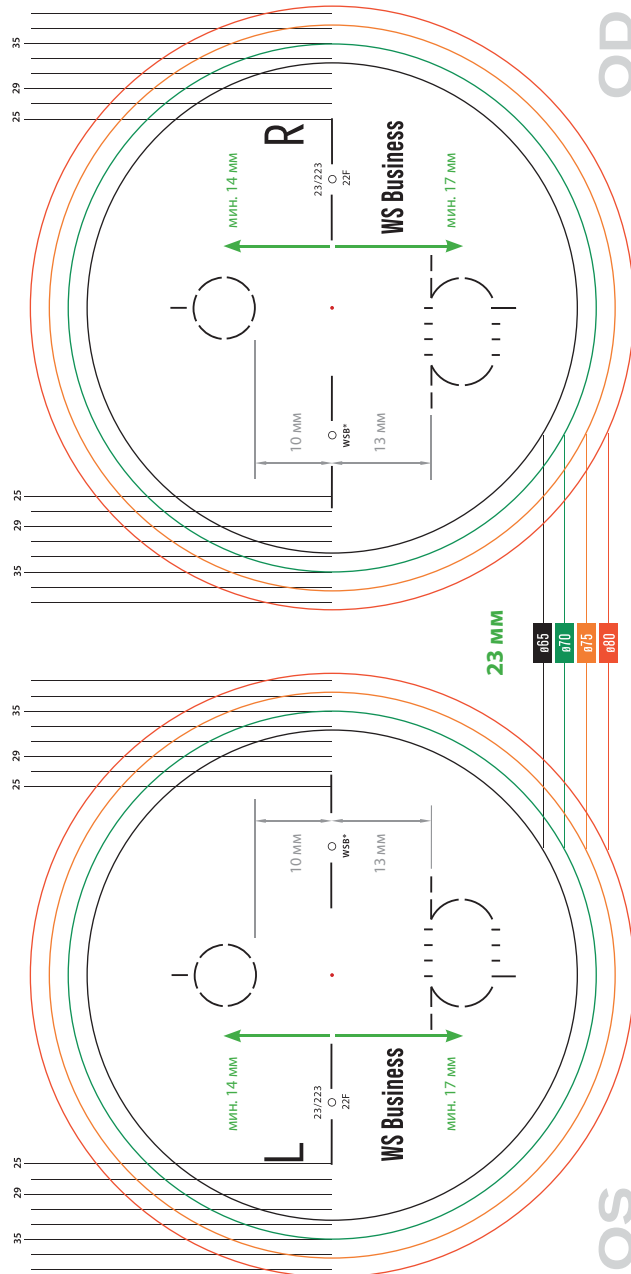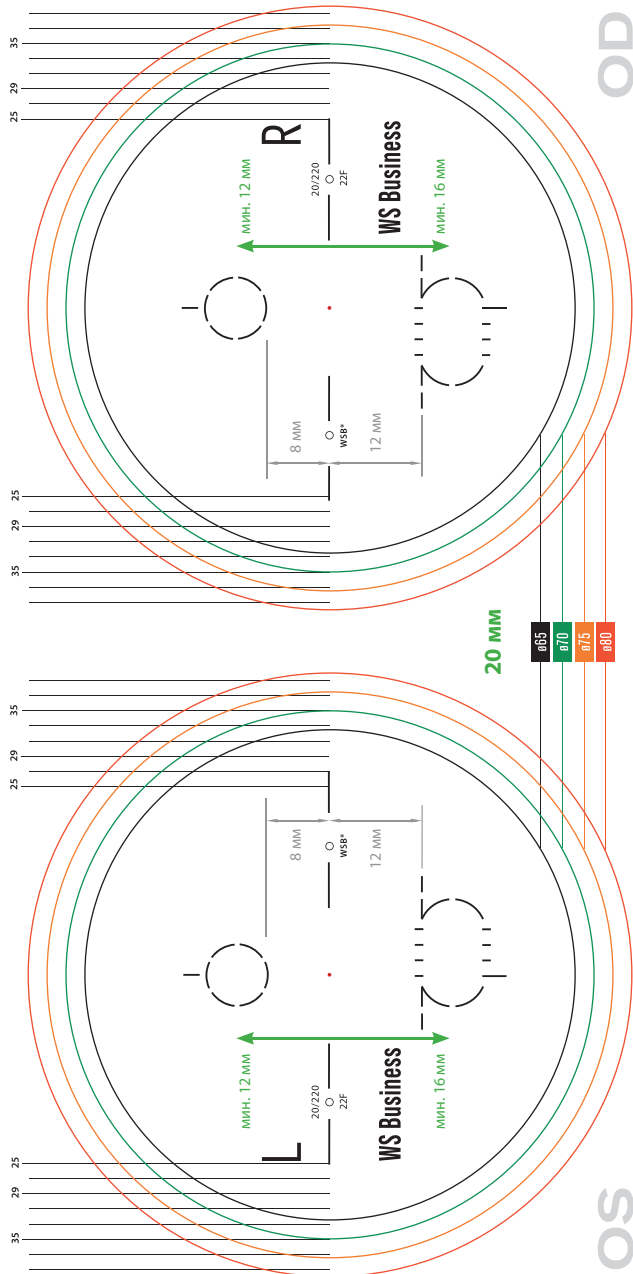

Материал	Еува 1.74	Еува 1.67	Еува 2.0	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Грав. 400	DT7	DT5	DT3	DTX	DT1	DT1L
Грав. 200	DT7 2	DT5 2	DT3 2	DTX 2	DT1 2	DT1L 2


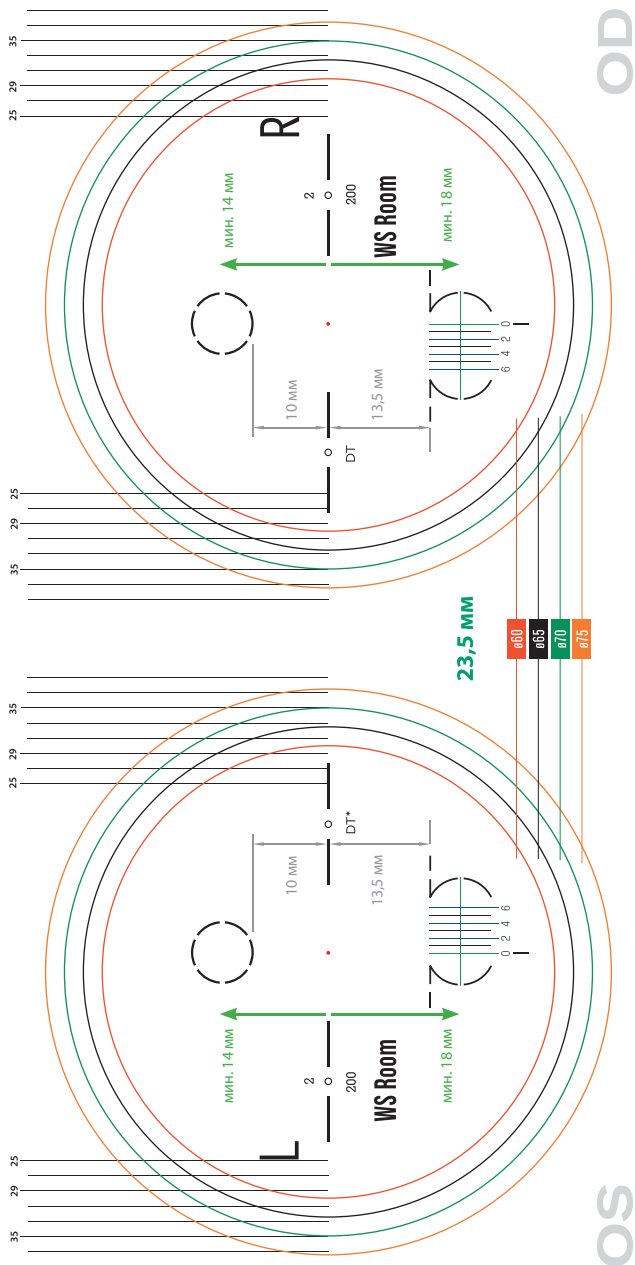


Материал	Еува 1.67	Еува 2.0	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка SUPERREADER A	DL5 7	DL3 7	DL1 7	DL1L 7
Гравировка SUPERREADER B	DL5 15	DL3 15	DL1 15	DL1L 15

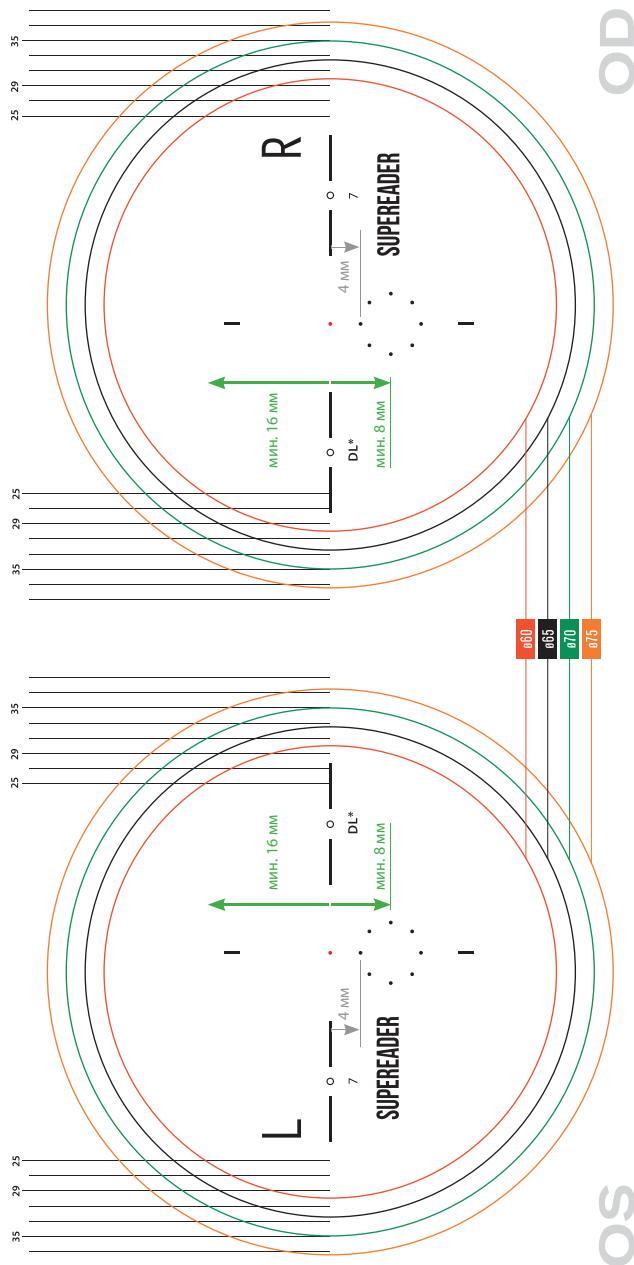

13/14/15/16 мм

OD

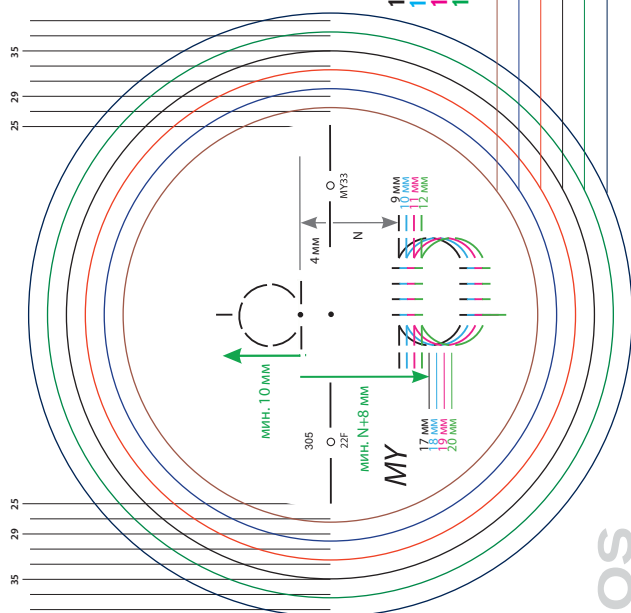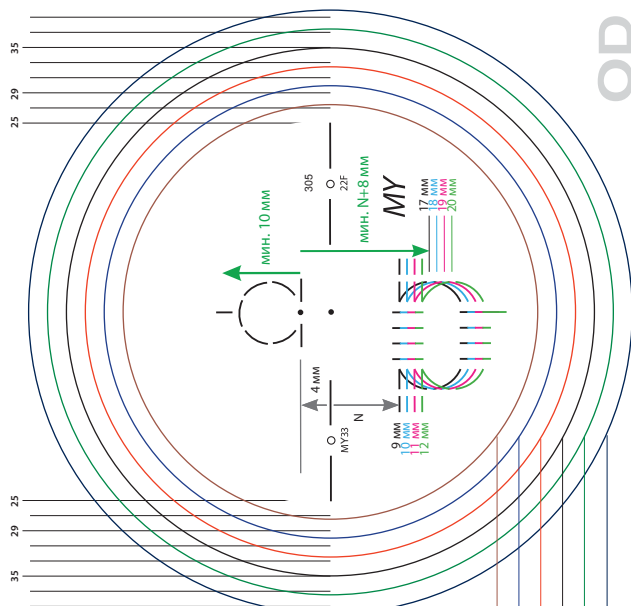

OS

MY = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота


Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Еuvia 1.74	Еупоа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
13 мм	37	35	33	3X	31	31L
14 мм	47	45	43	4X	41	41L
15 мм	57	55	53	5X	51	51L
16 мм	67	65	63	6X	61	61L

OD

OS

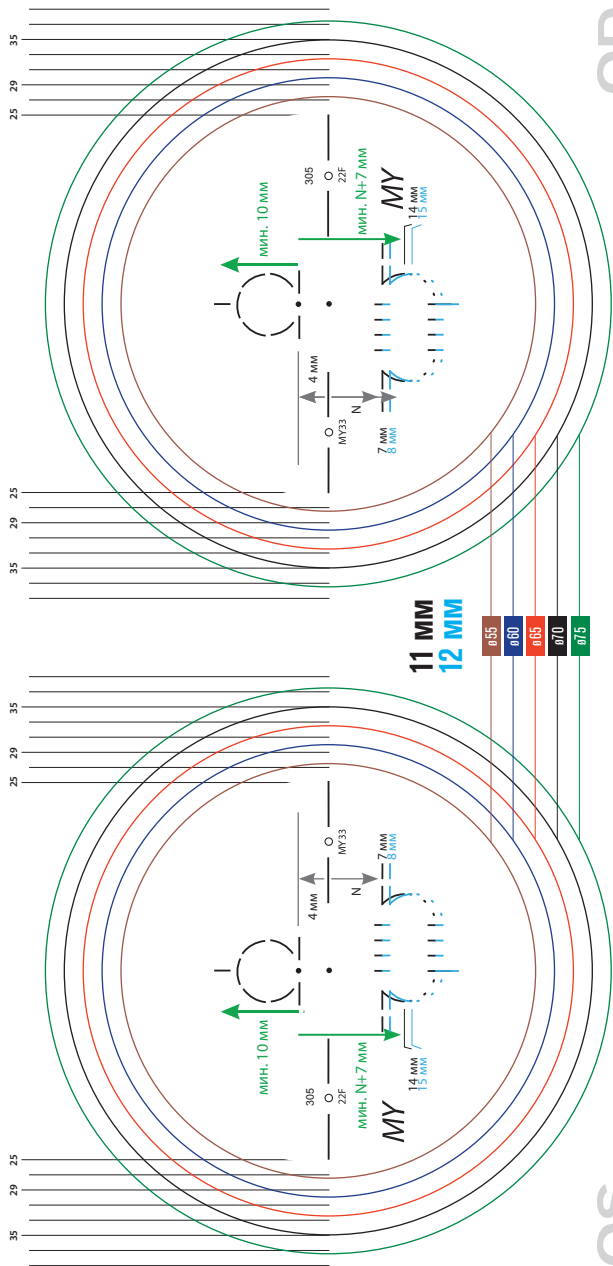

MY = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)


22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
11 мм	17	15	13	1X	11	11L
12 мм	27	25	23	2X	21	21L

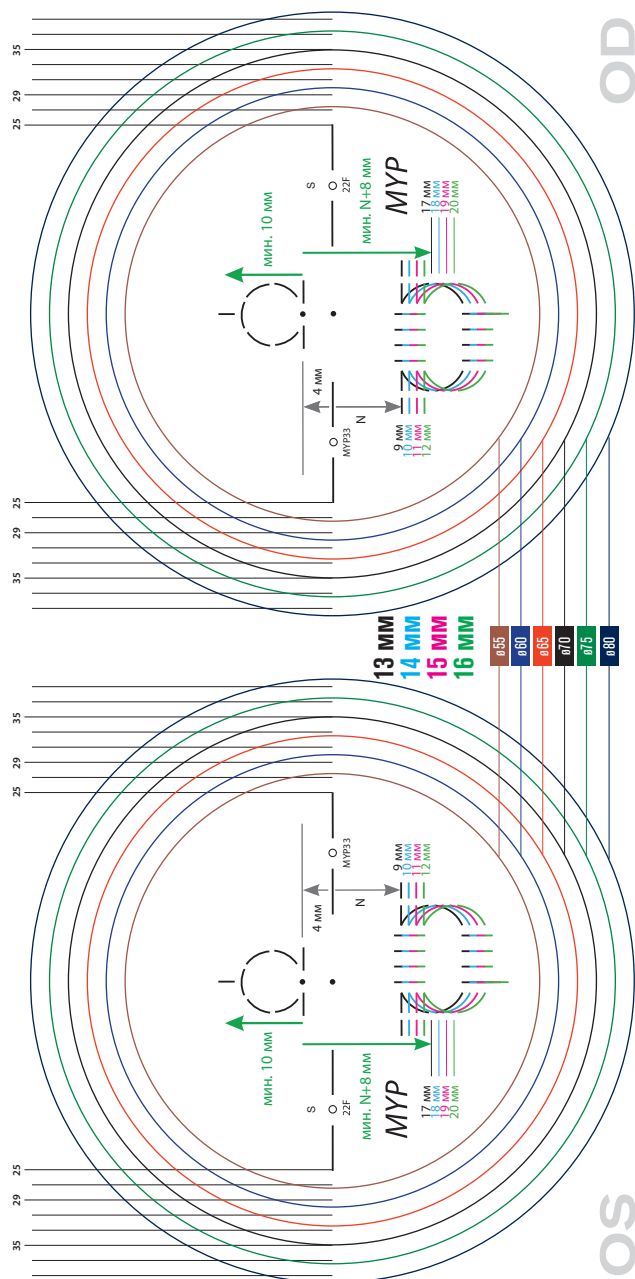

MYP = Hoyalux ID MySelf Profile
S = номер дизайна

Способ подбора
аддитивности
(например, Add. 2,25)

22F = аддитивность впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддитивность позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота


Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Еuvia 1.74	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
13 мм	37	35	33	3X	31	31L
14 мм	47	45	43	4X	41	41L
15 мм	57	55	53	5X	51	51L
16 мм	67	65	63	6X	61	61L

Темпоральная гравировка

Stable	S
Detail	D
Adventure	A
Expert	E
Modern	M

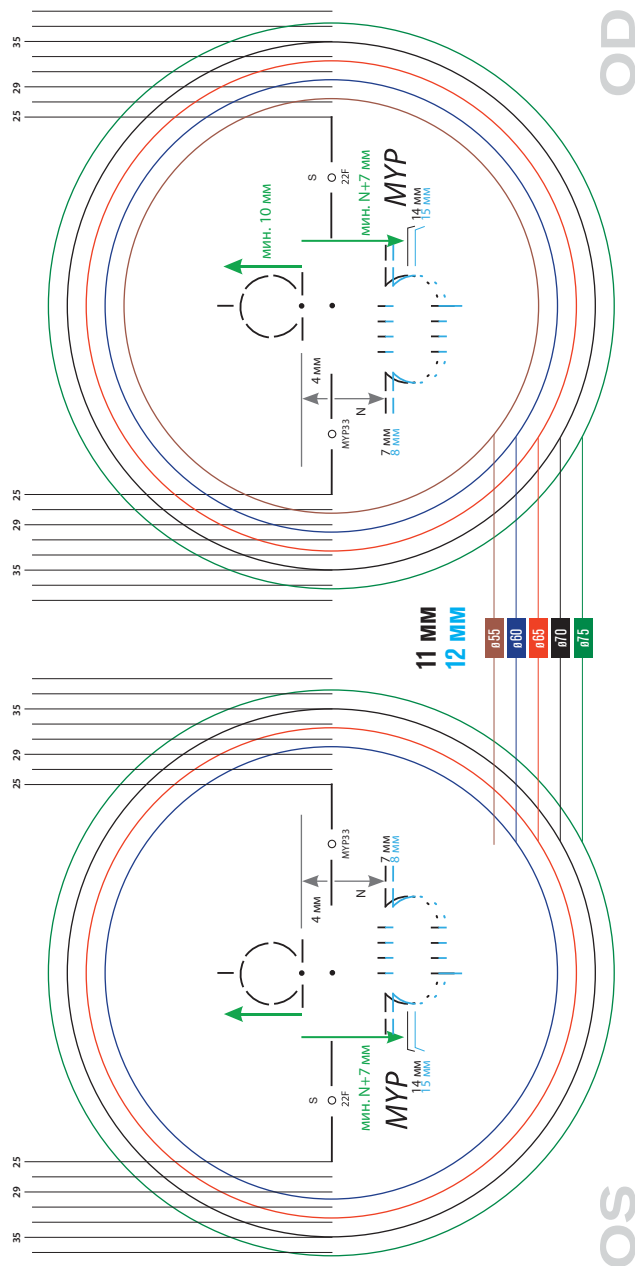

MYP = Hoyalux ID MySelf Profile

S = номер дизайна

Способ подбора
аддиции
(например, Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фронтенг Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	

Гравировка



Длина коридора прогрессии	Еуvia 1.74	Еуnoa 1.67	Еуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
11 мм	17	15	13	1X	11	11L
12 мм	27	25	23	2X	21	21L

Темпоральная гравировка

Stable	S
Detail	D
Adventure	A
Expert	E
Modern	M


Материал		Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400	Outdoor = O Urban = U Indoor = I
Гравировка	LifeStyle 4 = LS	16 мм	67	65	63	6X	61	
	LifeStyle 4i = LSI	15 мм	57	55	53	5X	51	
		14 мм	47	45	43	4X	41	
		13 мм	37	35	33	3X	31	
		12 мм	27	25	23	2X	21	
		11 мм	17	15	13	1X	11L	

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фронттер Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.

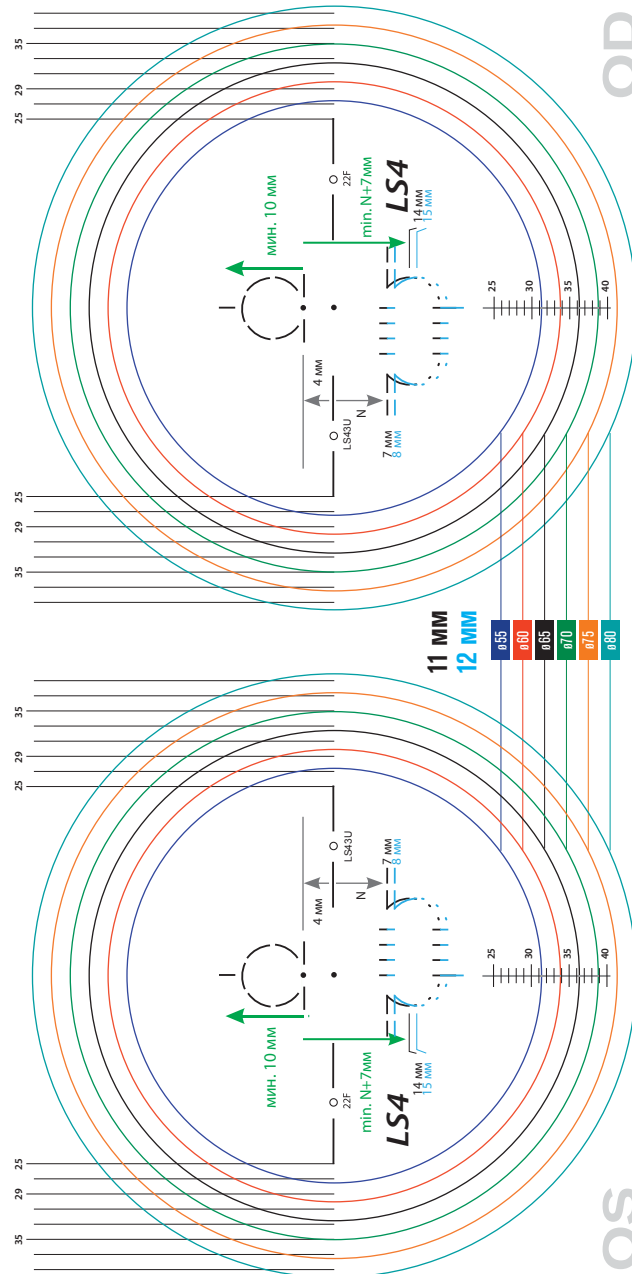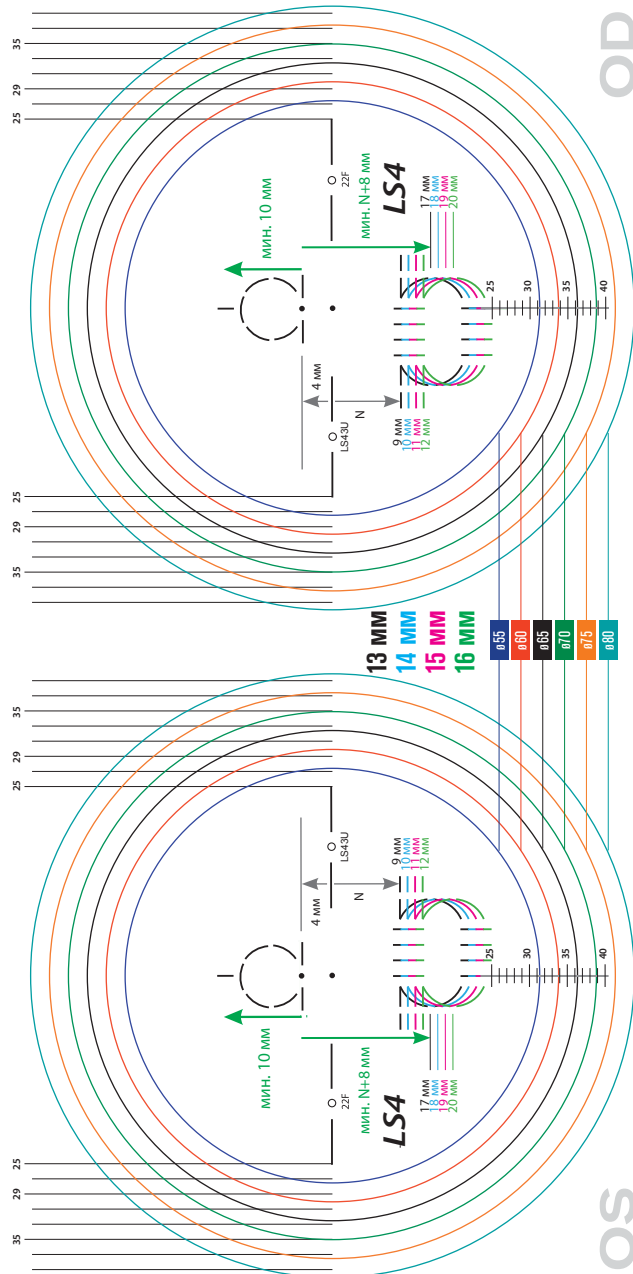



Материал		1.67	1.60
Гравировка EnRoute Progressive	15 мм	R55V	R53V
Гравировка EnRoute Progressive Pro	15 мм	RP55V	RP53V

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.

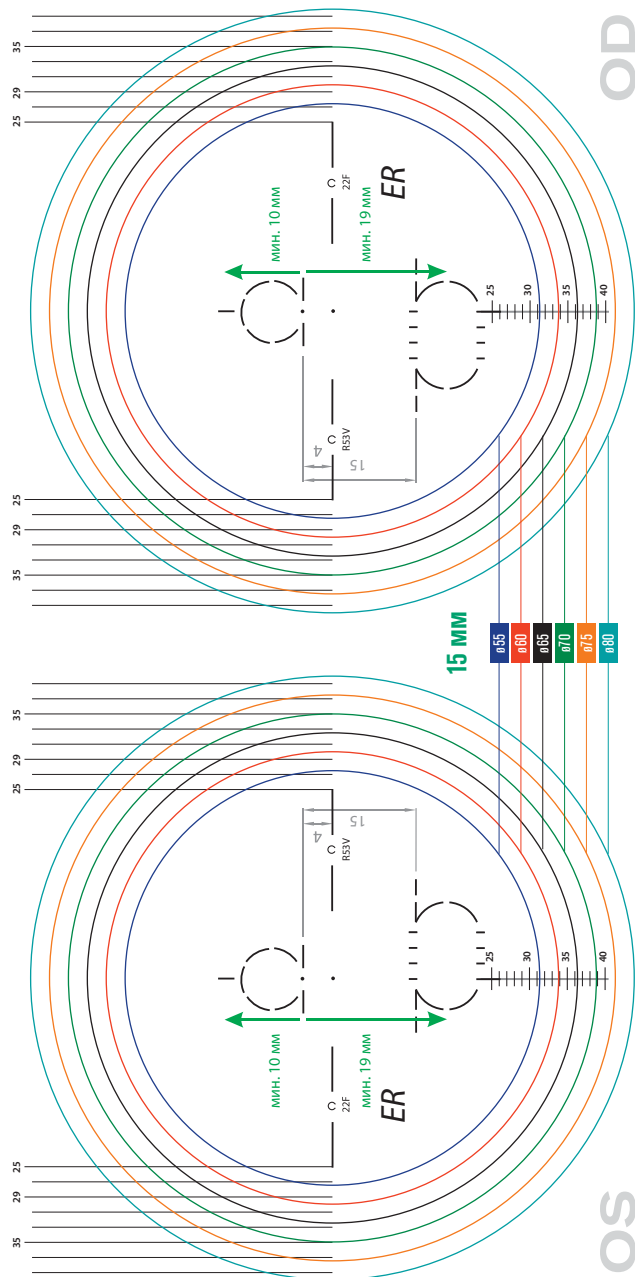



Материал						
	Гравировка	14 мм	11 мм	14 мм	11 мм	14 мм
Еuvia 1.74		B47	B45	B43	B4X	B41
Еупоа 1.67		B45	B43	B41	B4X	B41
Еуас 2.0 1.60		B43	B41	B4X	B41	B41
PNX 1.53		B4X	B41	B41	B41	B41
Полимер 1.50		B41	B41	B41	B41	B41
Полимер 1.50 UV400		B41L	B41L	B41L	B41L	B41L

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.

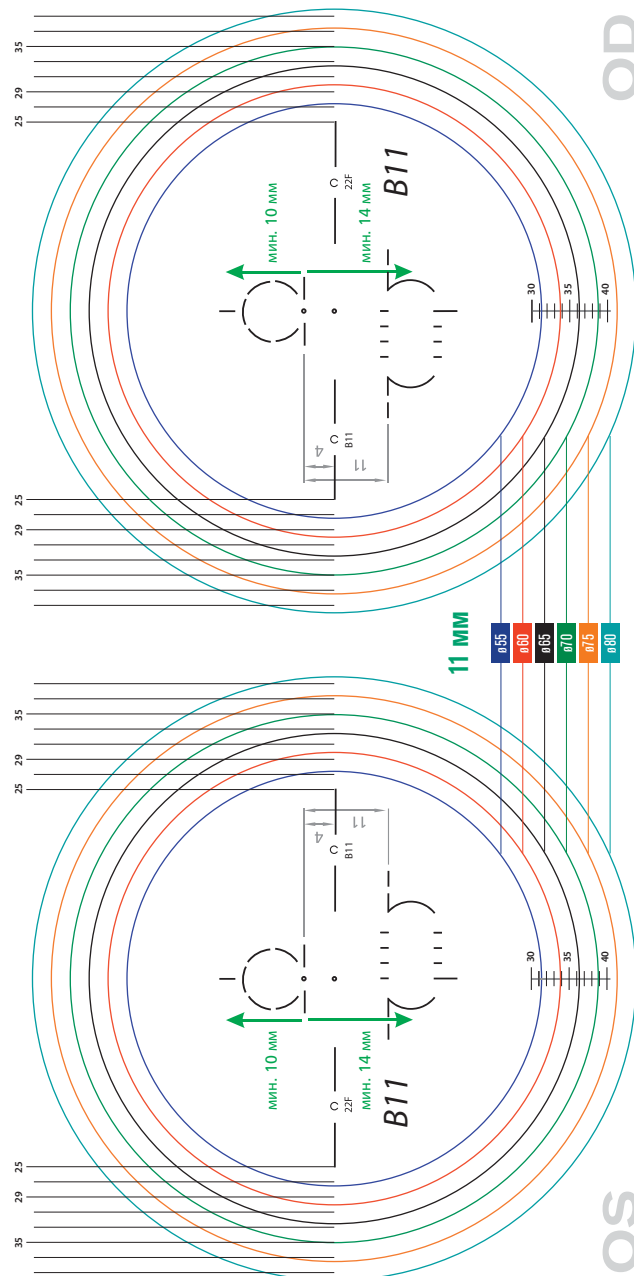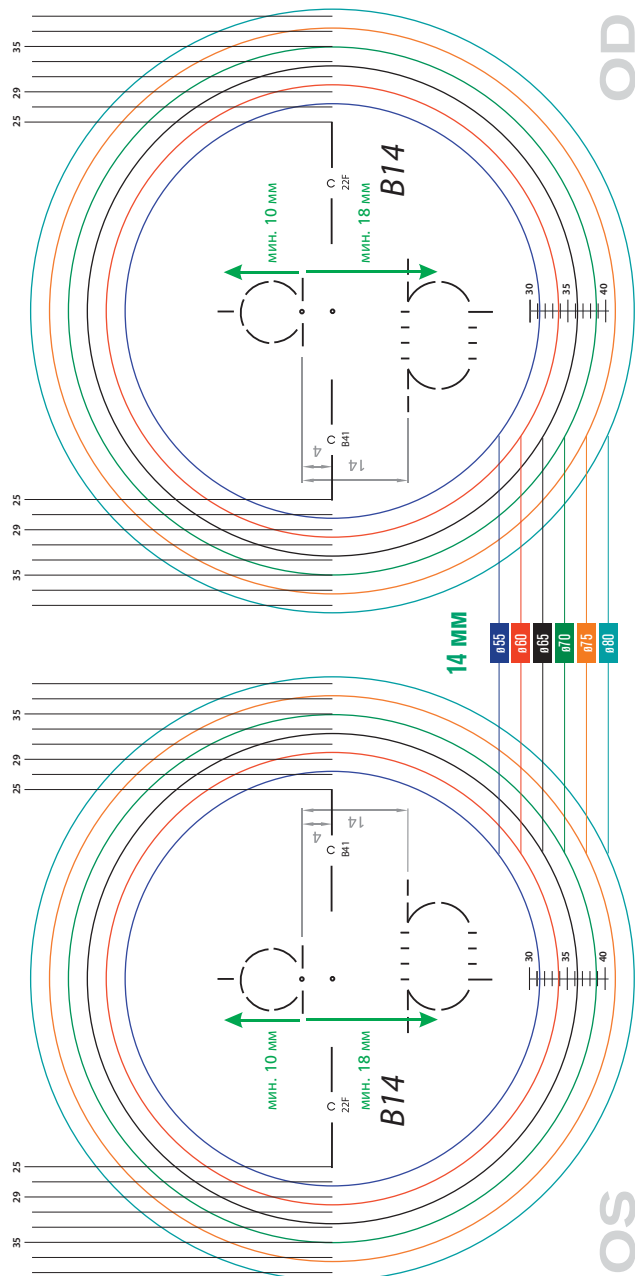



Материал		Еупоа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка	14 мм	DP45	DP43	DP4X	DP41	DP41L
	11 мм	DP15	DP13	DP1X	DP11	DP11L

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 $22F = \text{адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25.}$
 На поляризационных линзах Daynapic имеется
 дополнительная гравировка PZ над значком аддитации.

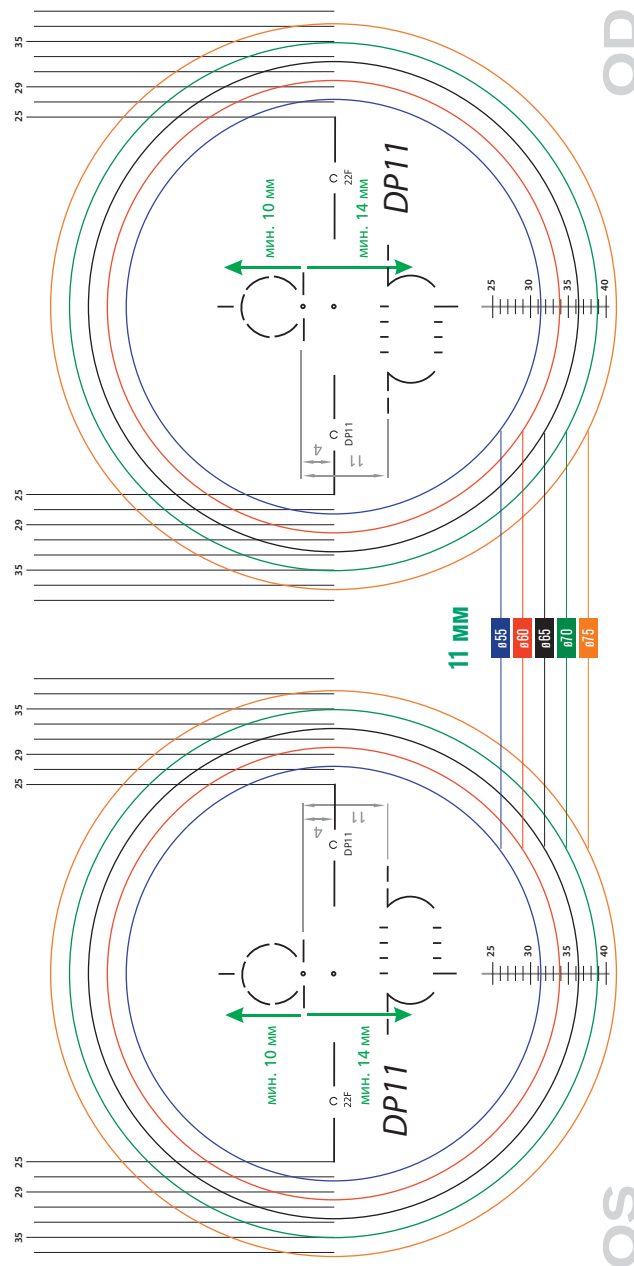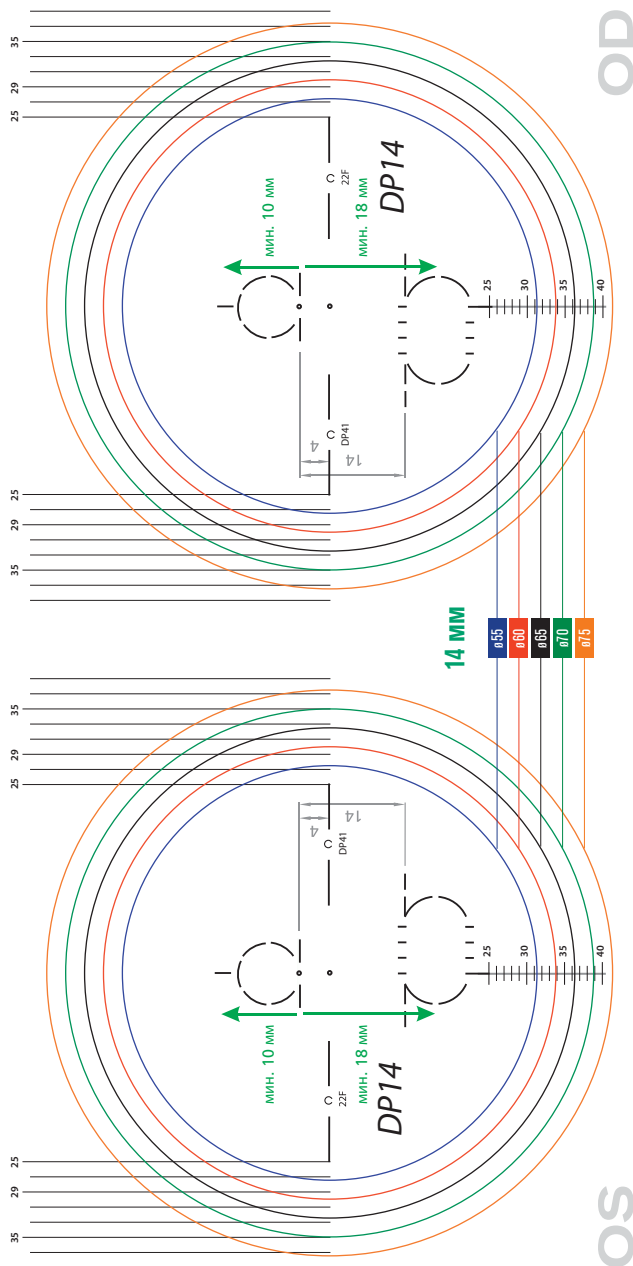

Материал		Еуроа 1.67	Еуа 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка	15 мм	DA55	DA53	DA5X	DA51	DA51L
	11 мм	DA15	DA13	DA1X	DA11	DA11L


Темпоральная гравировка:
FF/ADD

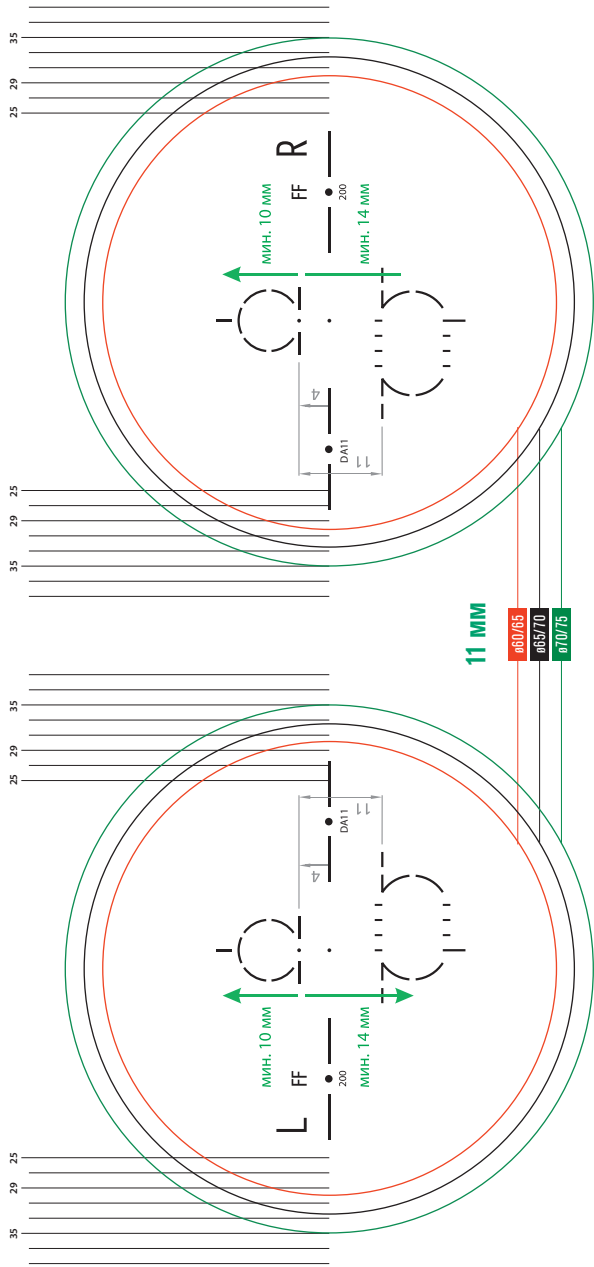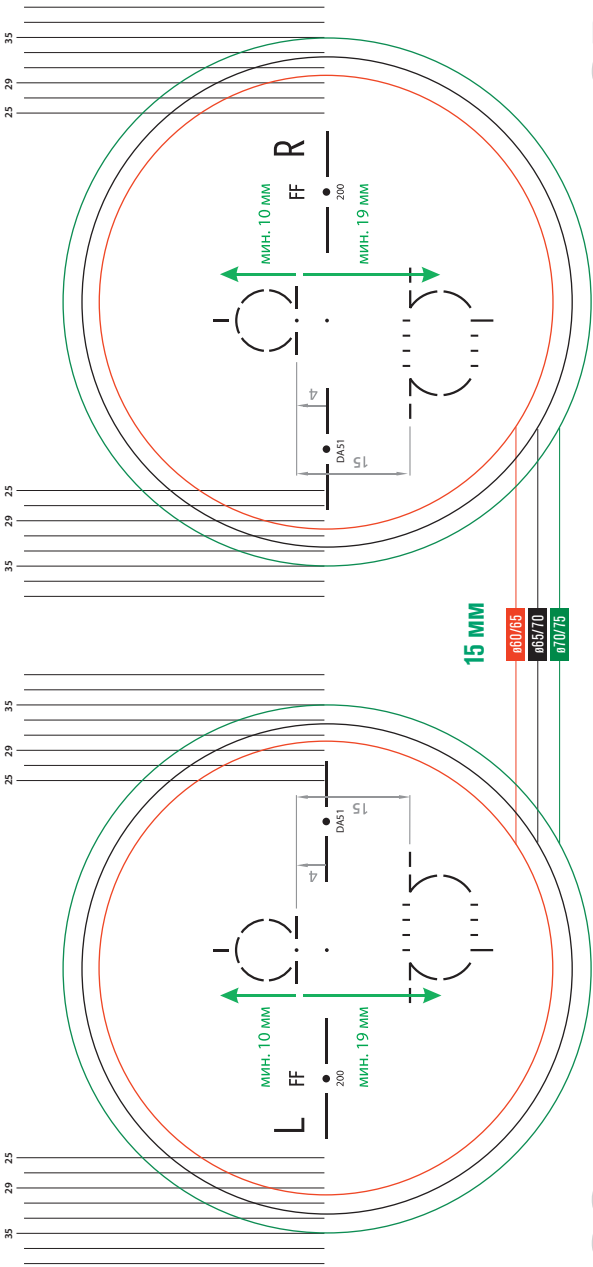

SPORTIVE


Материал		Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50 UV400
Гравировка	Nulux Sportive TF	SA3	SAX	SA1	SA1L
	Hoyalux Sportive TF progressive	14 мм	Fa43	Fa41	Fa41L



NULUX SPORTIVE TF

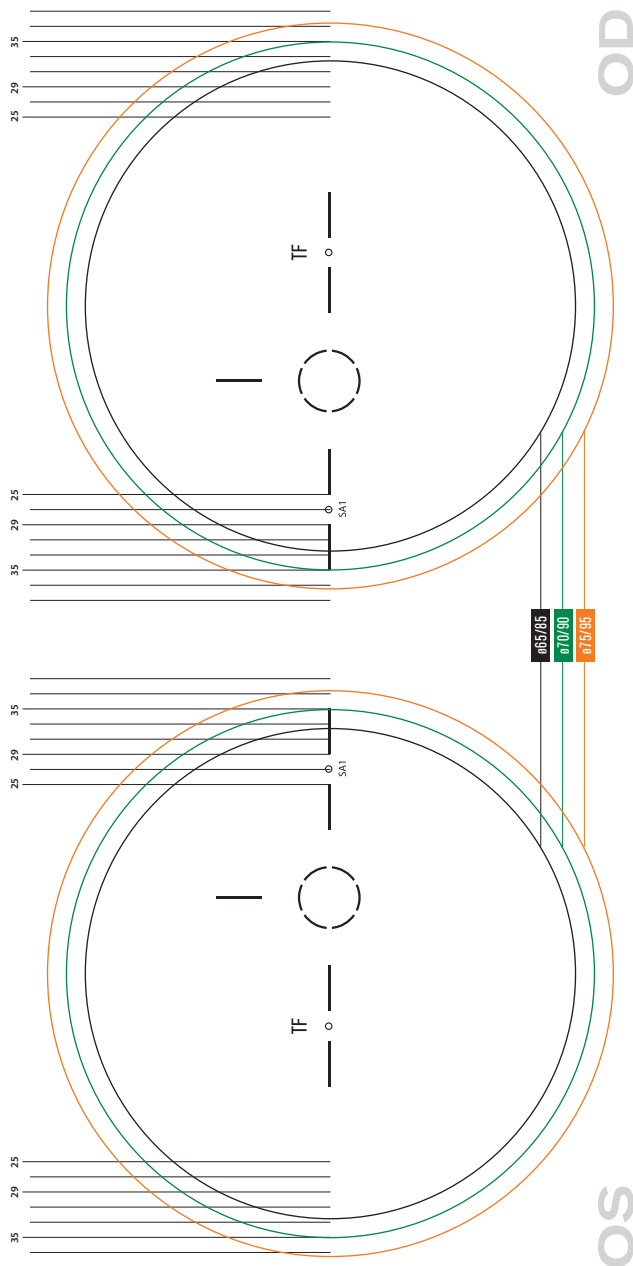



SPORTIVE

HOYALUX SPORTIVE TF

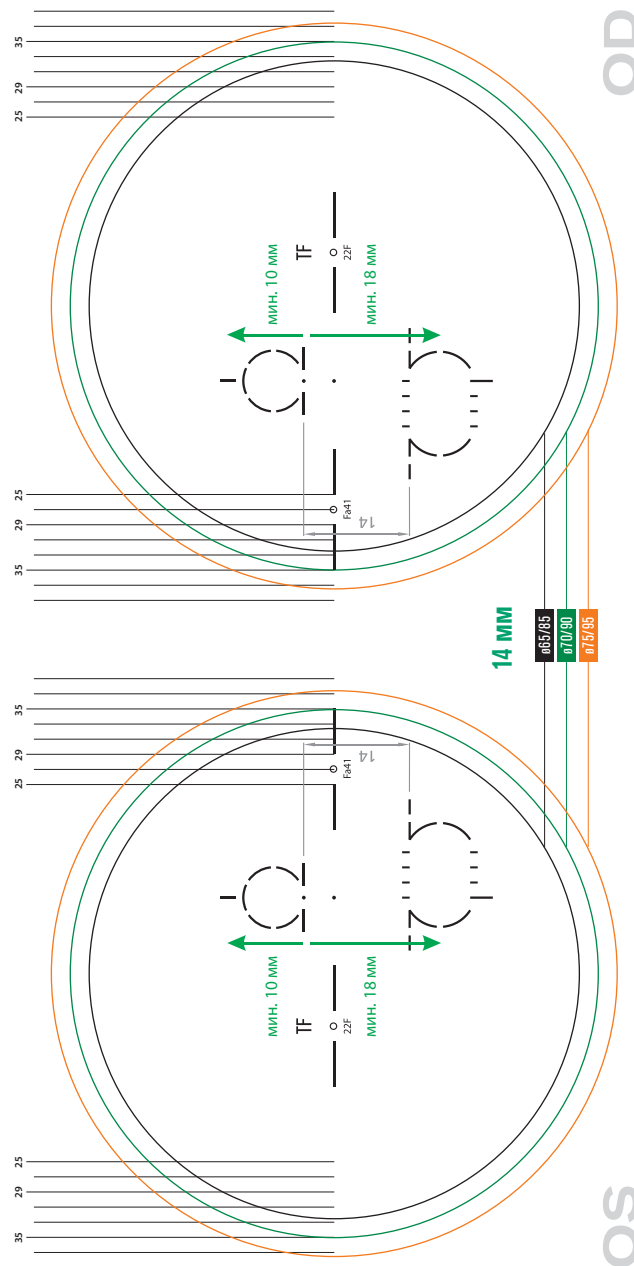

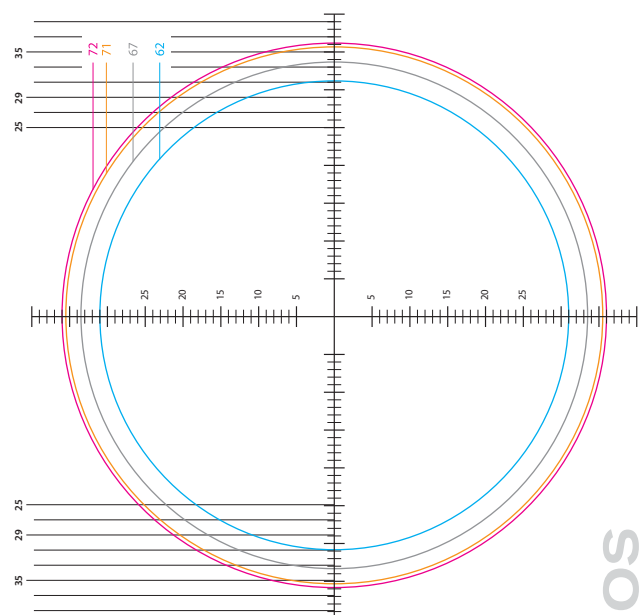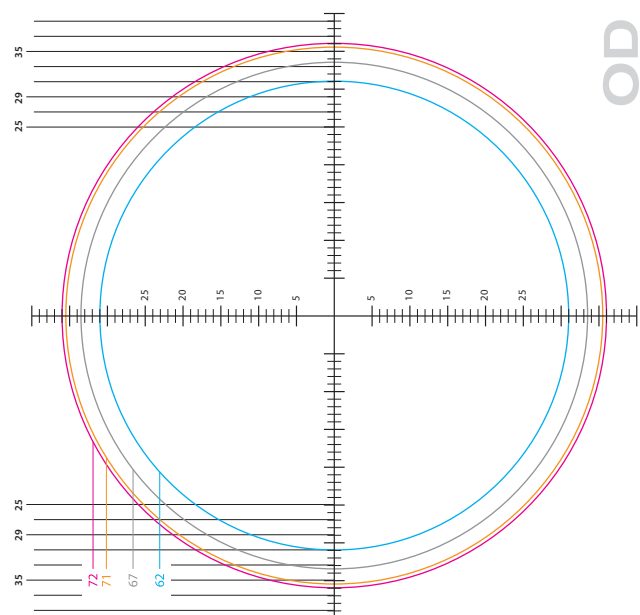

Материал		Еуроа 1.67	Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	LifeStyle 4 = LS	16 мм	65	6X	61
	LifeStyle 4i = LSI	15 мм	55	5X	51
		14 мм	45	4X	41
		13 мм	35	3X	31
		12 мм	25	2X	21
		11 мм	15	1X	11
					Outdoor = O Urban = U Indoor = I

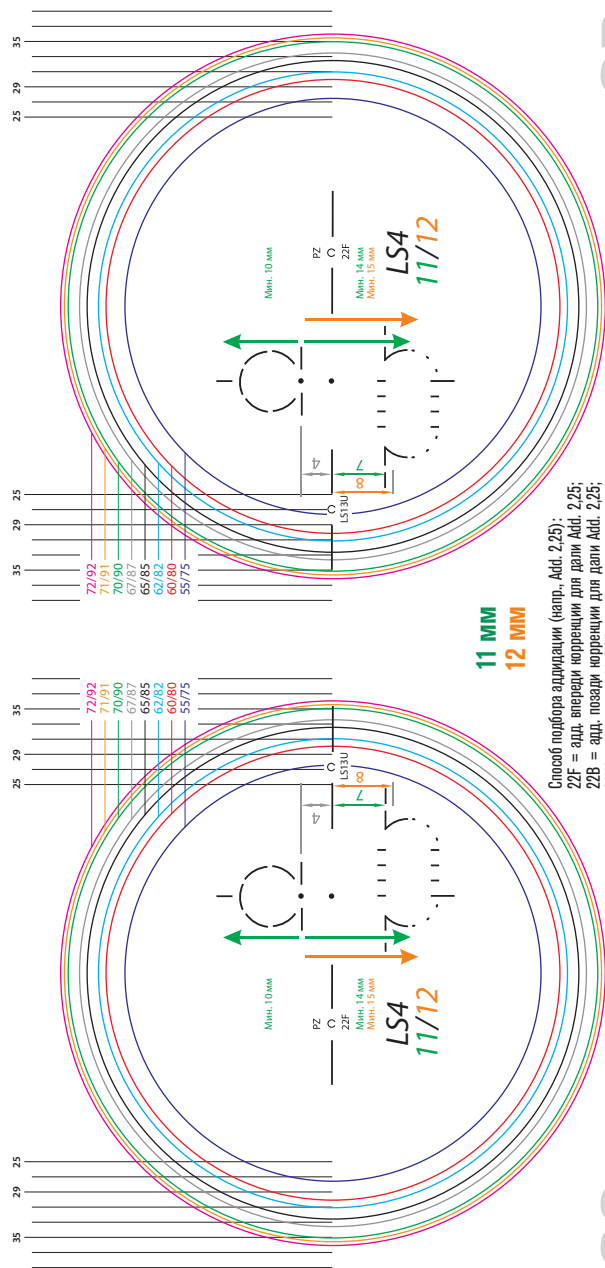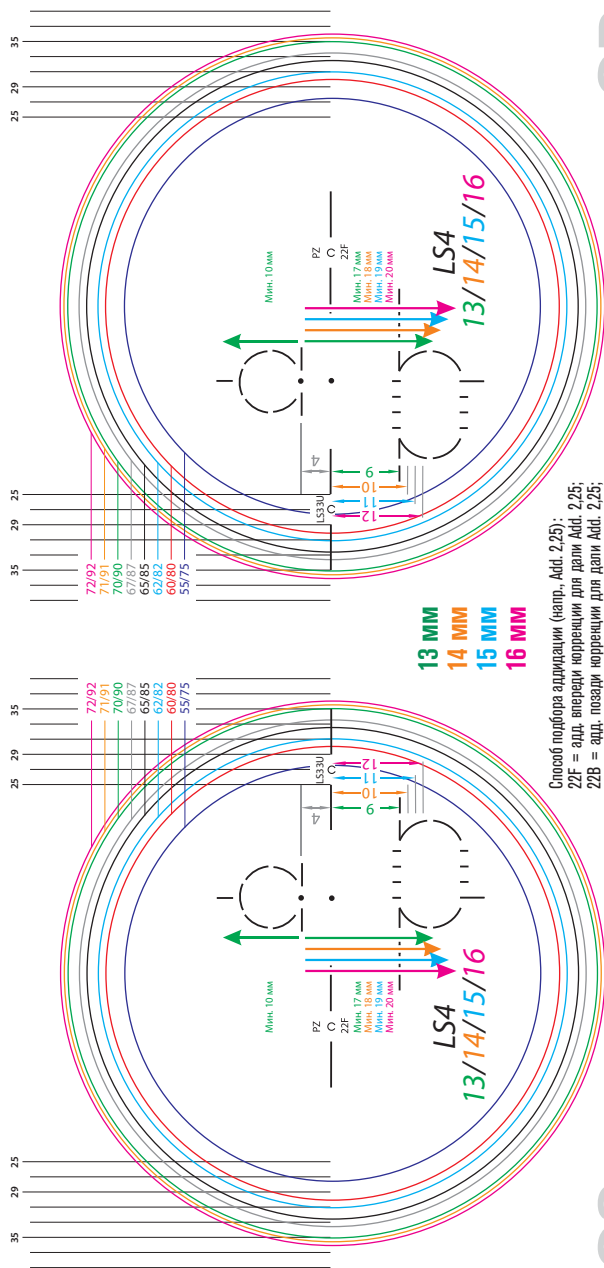

HOYA

POLARIZED

BALANSIS


Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм B45	B43	B4X	B41
	11 мм B15	B13	B13X	B11

HOYA


POLARIZED

DAYNAMIC

Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм DP45	DP43	DP4X	DP41
	11 мм DP15	DP13	DP1X	DP11

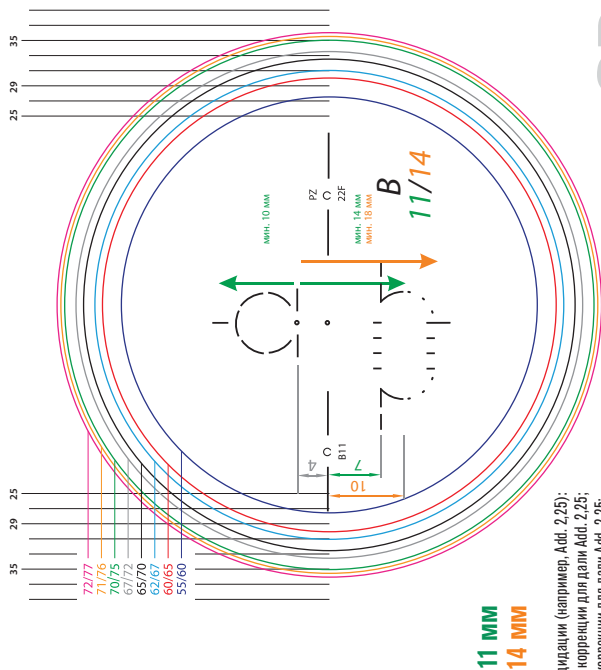

Способ подбора адьюкации (например, Add. 2.25):
22F = ад. вперед коррекции для данн Add. 2.25;
22B = ад. назад коррекции для данн Add. 2.25;
22W = фороптер Add. 2.25
или суммарная линза в пробной оправе.

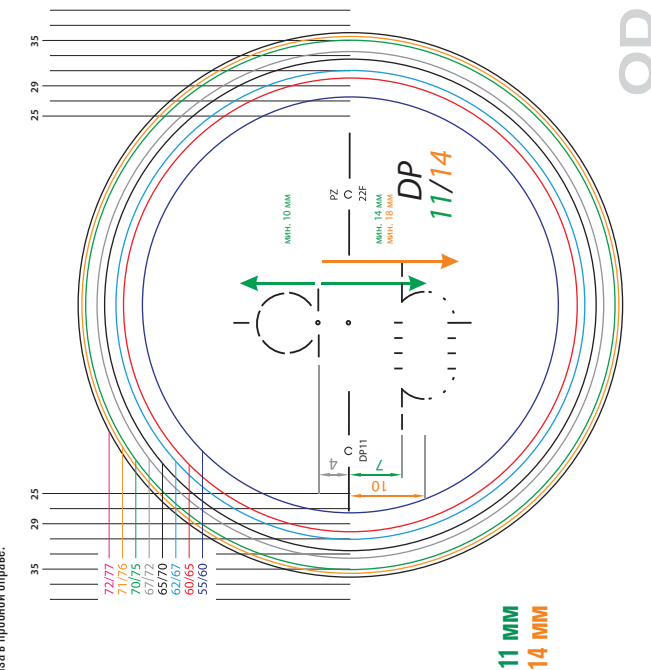


OS

OS




Материал	Еуроа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	15 мм 11 мм	DA55 DA13	DA5X DA1X	DA51 DA11


Темпоральная гравировка:
FF/ADD

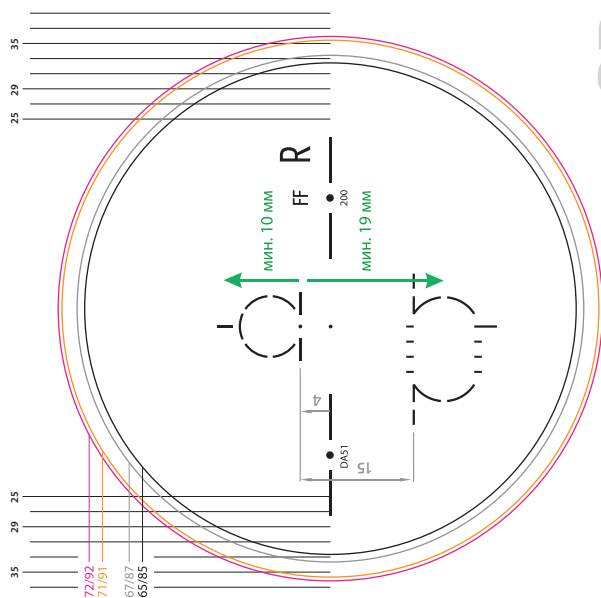


15 mm

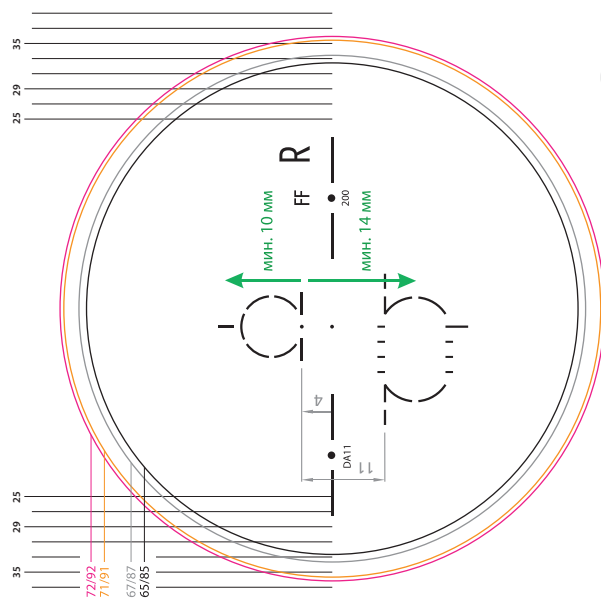

11 mm

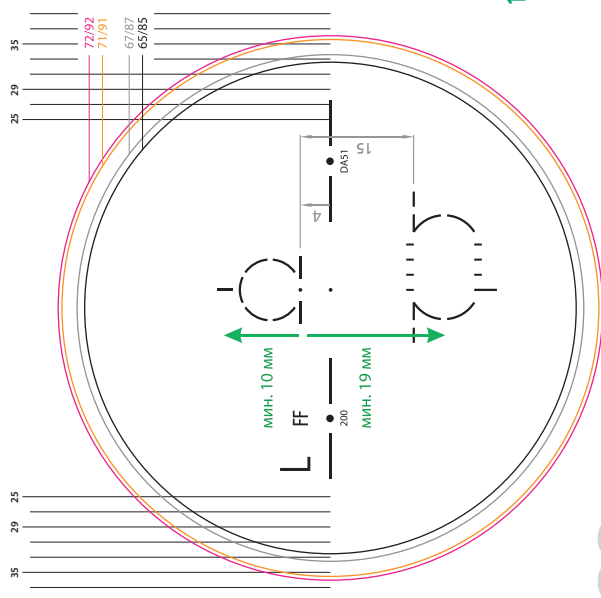

OS

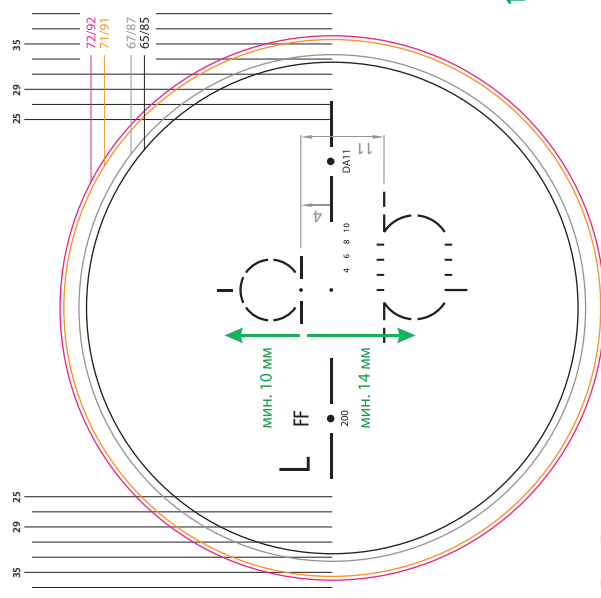

OS

Материал	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	(-)6 TF	(-)5 TF

Материал	Полимер 1.50
Гравировка	(-)5 TF

